



Aplicação  
**Liftera**  
para  
**Rejuvenescimento**

*íntimo*



01


Higienize as **canetas Liftera** que irá utilizar com gaze levemente umedecida em Clorexidina Aquosa, incluindo partes plásticas e película. Após coloque uma pequena gota de gel apenas na parte da película por onde sai o disparo, encapar com filme plástico desde a ponta da caneta cobrindo o botão de disparo até o início da conexão com o cabo isolando assim toda a extensão.

Certifique-se que entre o filme plástico e a ponta da caneta não existam bolhas de ar.

Nunca force, arranhe ou raspe a parte da película de disparo.

02

Posicione a paciente deitada na maca, peça para ela estar **totalmente depilada** e deitada com as pernas abertas e os pés encostados um no outro ou utilize o apoio de perna.

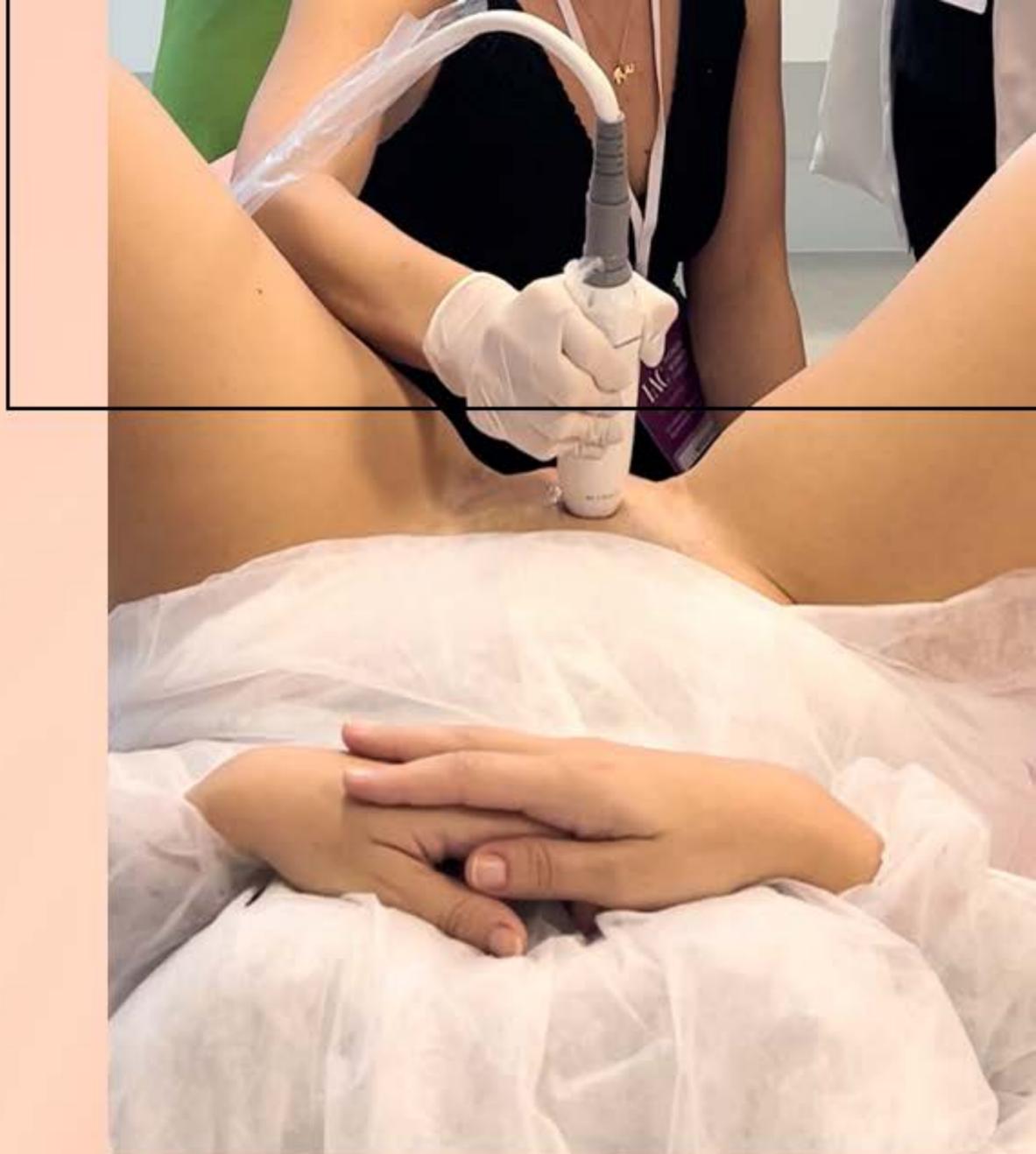

03

Aplique gel nos **grandes lábios** e utilize a primeira caneta iniciando da **mais profunda para a mais superficial**. Em movimentos de vetores da região do **períneo até o monte de Vênus** aplique por todo o **grande lábio**.



04

A espátula para aplicação do gel pode ajudar no posicionamento dos pequenos lábios caso seja necessário.

**Aumente a pressão** na aplicação **para não desacoplar** o disparo da pele da paciente.

Distribua de **forma homogênea a aplicação** afim de não sobrepor disparos em um mesmo ponto.

Após o término da sessão retire o plástico das canetas e repita o processo de higienização com **Clorexidina Aquosa**.

**Região de Risco:** não aplicar na região interna, clitóris e uretra.

