


Liftera



Orientações
de Limpeza
dos **Transdutores**



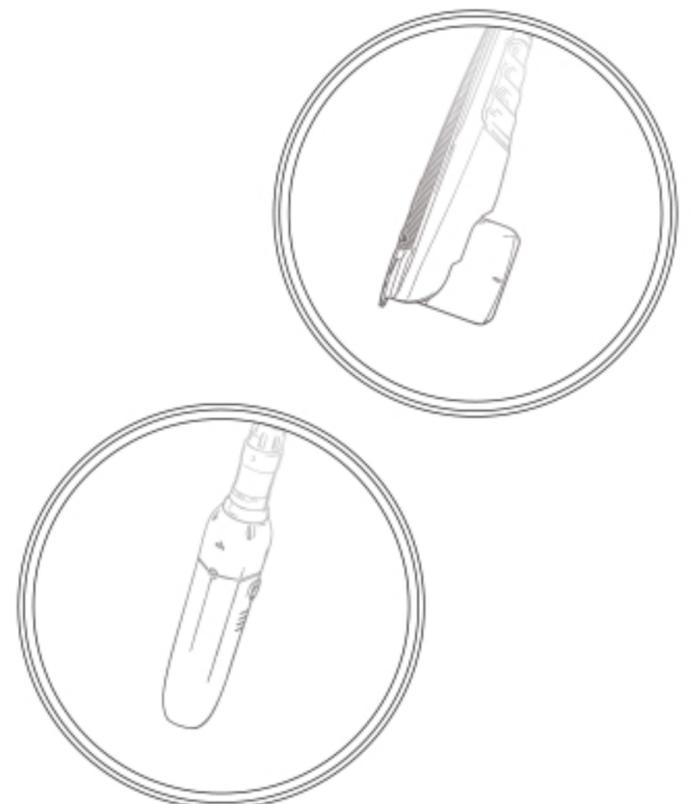

Contato eletrônico entre handpiece e transdutor linear

Utilizar gaze levemente umedecida com **álcool isopropílico**. Esta higienização é realizada apenas quando há necessidade de limpeza na **conexão da ponteira**.

O álcool isopropílico só poderá ser utilizado na parte **eletrônica** (contato eletrônico entre handpiece e cartucho linear e também na tela LCD).

Higienização do

Transdutor Linear e Caneta:

Retirar com gaze seca o excesso de gel,
nunca esfregar apenas passar levemente.

QUANDO FOR NECESSÁRIO
A HIGIENIZAÇÃO DE ESTERELIZAÇÃO:

Com a **gaze levemente umedecida em Clorexidina aquosa** higienizar apenas a película de transdução do disparo **(não esfregar)** e após passar levemente uma gaze ou algodão seco para não deixar nenhum resíduo líquido.





Partes plásticas do **transdutor**

Higienizar com gaze levemente umedecida em álcool 70% e após passar uma gaze ou algodão secos afim de retirar qualquer resíduo líquido.

