

Protocolo **Lift Touch**



Dr. Renato Soriani

Conceito

O protocolo surgiu da ideia de realizar tratamento em pacientes jovens que estejam com início de flacidez e reposicionamento de estrutura que evidenciem os sulcos nasolabiais e que não desejam realizar intervenção com uso de preenchedores na região.

Descrição

Os sulcos nasolabiais têm um impacto estético negativo no rosto. Sua manutenção é determinante na percepção da idade e atratividade. Esse protocolo aborda um tratamento inovador e eficaz da região com uso do Liftera 2.

Avaliação da aplicação

Pacientes que estejam com perda da sustentação estrutural, acentuando a aparência da mandíbula e do sulco nasolabial.

Benefícios

Abordagem minimamente invasiva com remodelamento do colágeno, indução de tensionamento e rejuvenescimento da pele.


Pontos de atenção

O protocolo poderá ser adaptado de acordo com as necessidades do paciente.


Signature

Liftera®

Anatomia do terço médio

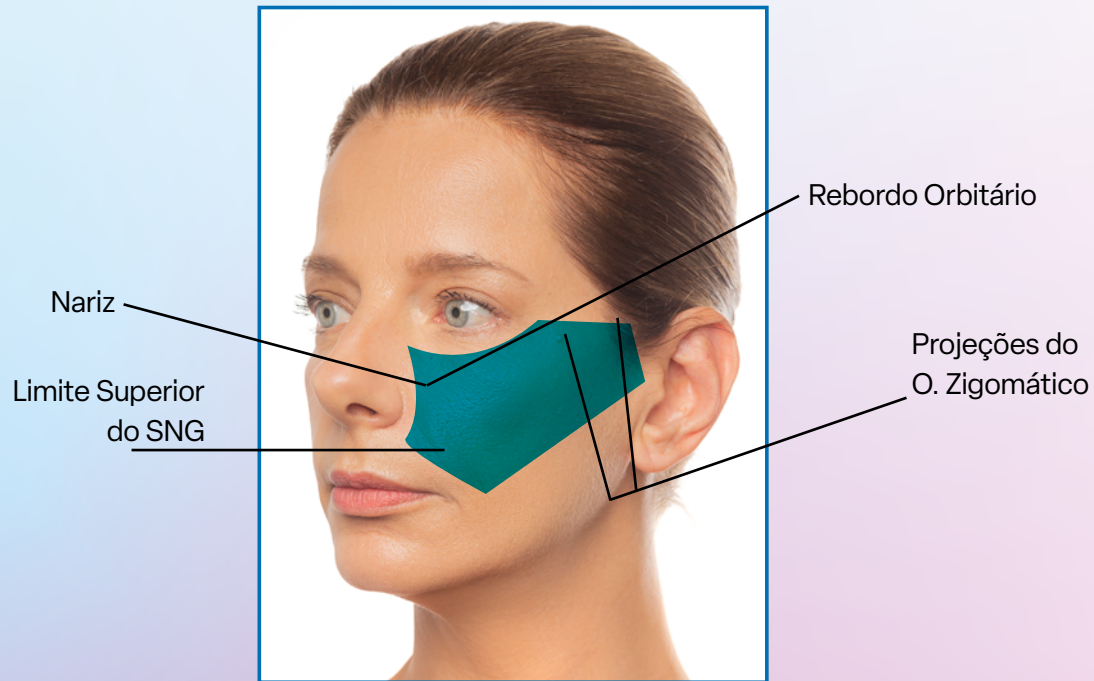

**Área de interesse:
Região nasogeniano e Monte malar**

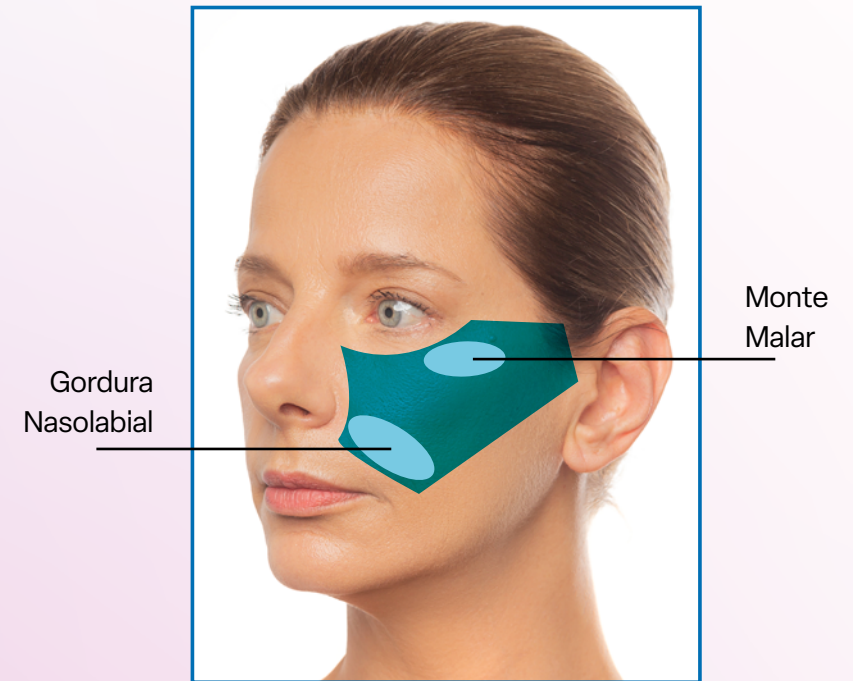




Passo 1

Gordura Nasolabial - Movimentos lentos na direção da seta, com caneta 3.0

Transdutor	Level	Speed	Meia face	Total Caneta
Caneta 3.0	7J	5Hz	150 - 200	300 - 400
	Total			300 - 400

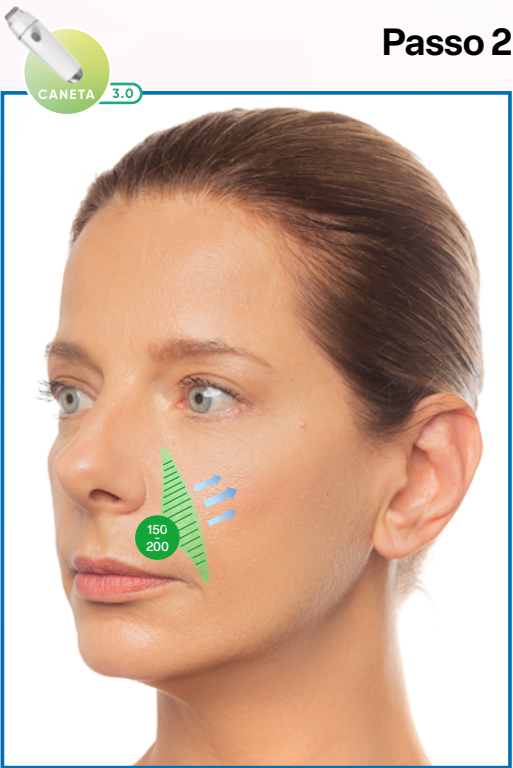

Passo 2

Gordura Nasolabial - Mudança da direção da caneta 3.0 e continua com os mesmos parâmetros

Transdutor	Level	Speed	Meia face	Total Caneta
Caneta 3.0	7J	5Hz	150 - 200	300 - 400
	Total			300 - 400



Passo 3



Monte Malar - Movimento em formato de lua minguante e aumenta o número de disparos.

Transdutor	Level	Speed	Meia face	Total Caneta
Caneta 3.0	7J	5Hz	200 - 300	200 - 300
	Total			400 - 600



Passo 4



Área Total - Mudança para caneta 2.0. Aumento da frequência do equipamento para 7Hz e quantidade de disparos.

Transdutor	Level	Speed	Meia face	Total Caneta
Caneta 2.0	5J	7Hz	150 - 200	600 - 800
	Total			1200 - 1600



Área Total - Movimento de infinito (número 8) com caneta 2.0. Aumento do speed para trabalhar a melhora da pele, com a capacidade de difusão térmica do equipamento.

Transdutor	Level	Speed	Meia face	Total Caneta
Caneta 2.0	5J	10Hz	600 - 800	1200 - 1600
	Total			1200 - 1600