

Liftera



Signature



ENTERA

Liftera


www.liftera.com.br



@lifterabrasil



@lifterabrasil

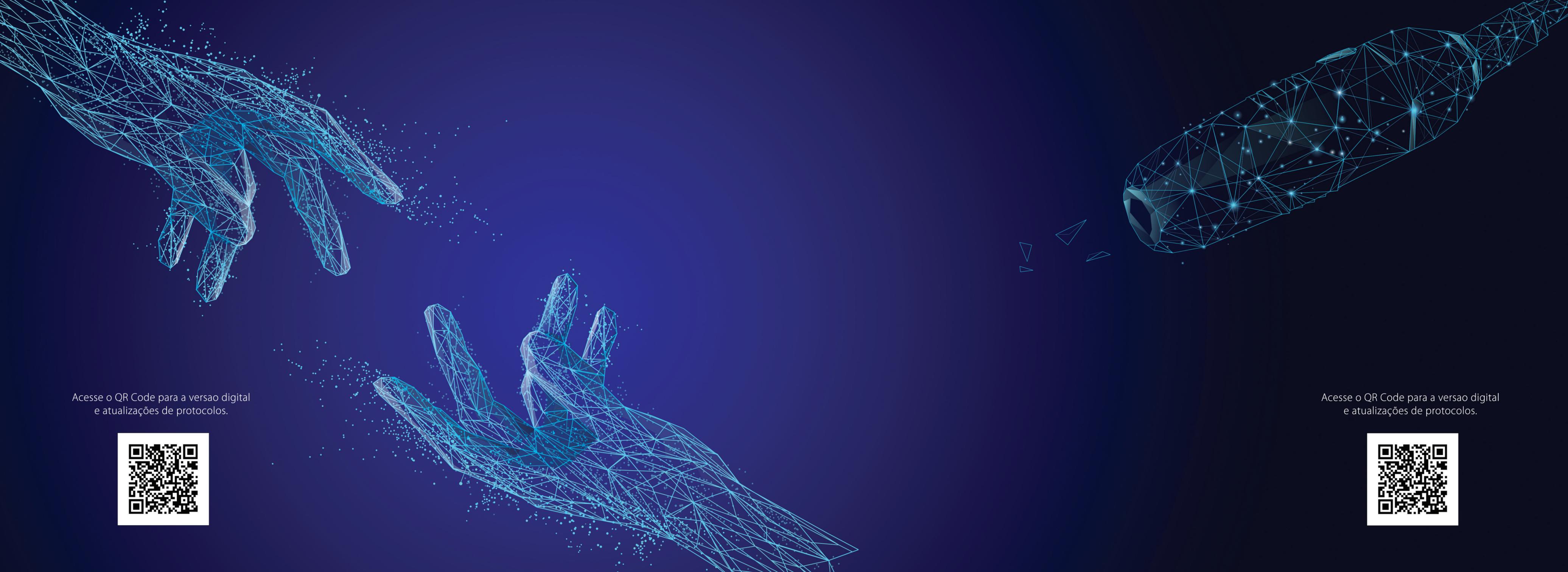

Acesse o QR Code para a versão digital e atualizações de protocolos.



Acesse o QR Code para a versão digital e atualizações de protocolos.



Índice

- Adriana Awada | *Hashtag Pen*
- Alessandra Zawadzki | *AZ Eye-Lift*
- Alessandro Alarcão | *Fox Eyes Tech*
- André Braz | *AB Lifting+Definition*
- Daniel Dziabas | *D-Ponitail Lifting*
- Fernanda Mendes | *Full Face Lifting*
- Fernando Macedo | *Fift Up - 1. Pele Normal*
| *Fift Up - 2. Pele Fina / Envelhecida*
- João Simão | *Eye & Lip*
- Patricia Ormiga | *Anatomical Painting*
- Renato Soriani | *Face Slimmer*



Signature

Índice

- Dra. Natalie Borelli | *Butt lift + Bananinha & Celulite Off*
- Dra. Shirlei Borelli | *Vênustera*
- Dra. Marina Hayashida | *Tri-eye lift*
- Dra Vivian Simões Pires | *Lift 360*
- Dr. André Borba | *Eyebrow & Eyelid Techlift*
- Dr. Francisco Tribulato | *Power Max Definition*
- Dr. Gustavo Peretti Rodini | *Intimate Skin Quality*
- Dr. Luiz Tonon | *T-high Definition*
- Dra. Karolina Lavagnoli Colombo | *TightSkin*
- Dr. Amilton Macedo | *Retract Lobe*



Signature

Índice

- Dra. Livia Sabia | *LS Lift Face*
- Dr. Tiago Silveira | *Up Glúteos*
- Dr. Carlos Bautzer | *Keypoints*
- Dra. Soraya Chantre | *Lift-C*
- Dra. Fernanda Nunes | *Face Frame Lifting*



Signature

Signature

Desenhar, modelar e construir é o trabalho de cada artista, e nós acreditamos que dar liberdade ao talento é contribuir com ferramentas e produtos que facilitem o processo criativo e a entrega de resultados.

O Liftera representa essa grande ferramenta e traz consigo o poder de potencializar e individualizar os tratamentos. Através do projeto *Signature*, temos o objetivo de compartilhar e estimular diferentes perspectivas, a partir da junção do talento de profissionais e suas experiências, cada um com a sua própria assinatura.

Nesse material você terá acesso a visões técnicas desenvolvidas especialmente por médicos usuários do *Liftera*, com a utilização dos transdutores em linha e em *Caneta*. São métodos individuais de trabalho clínico para estimular novas possibilidades e proporcionar novos resultados de forma única para cada paciente.

! Atenção

Reforçamos que esse material tem como único objetivo apresentar as perspectivas de cada médico convidado, atribuindo técnicas e extrações do conhecimento de anatomia e suas experiências clínicas.

Hashtag Pen



Assinado por:




Dra. Adriana Awada

Conceito: O conceito "Hashtag Pen" nasceu devido ao desconforto de outros ultrassons microfocados que inviabilizavam a aplicação. Com a **Caneta Liftera** temos o estímulo no músculo e em todas as profundidades com muito mais conforto.

Descrição: Fazer a avaliação dinâmica da musculatura, assim como realizamos antes de aplicar preenchedores ou bioestimuladores. Nas áreas com maior movimento do músculo é onde vemos a maior melhora ao usar mais disparos.

Benefícios: O conforto com essa técnica é muito grande, o que faz com que o número correto de disparos seja realizado com sucesso no tratamento.

Pontos de atenção: Respeitar sempre: duto lacrimal, área perioral e densidade de gordura, pois o estímulo sobre os nervos pode gerar assimetrias e parestesias com as ponteiros mais profundas.

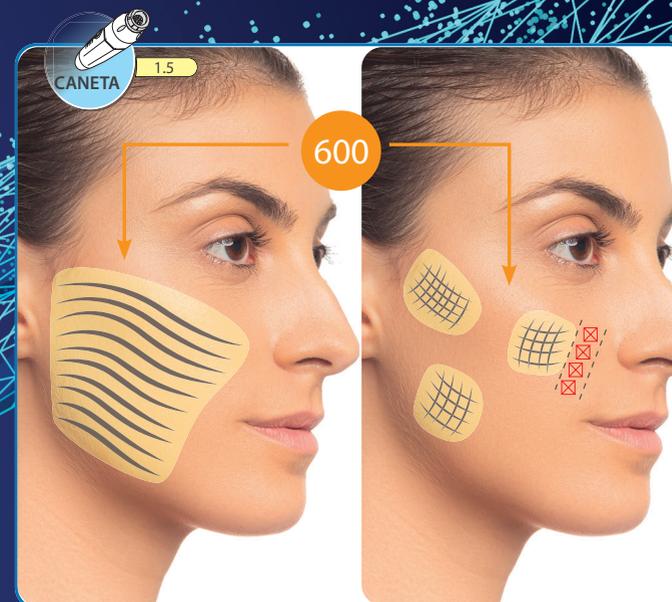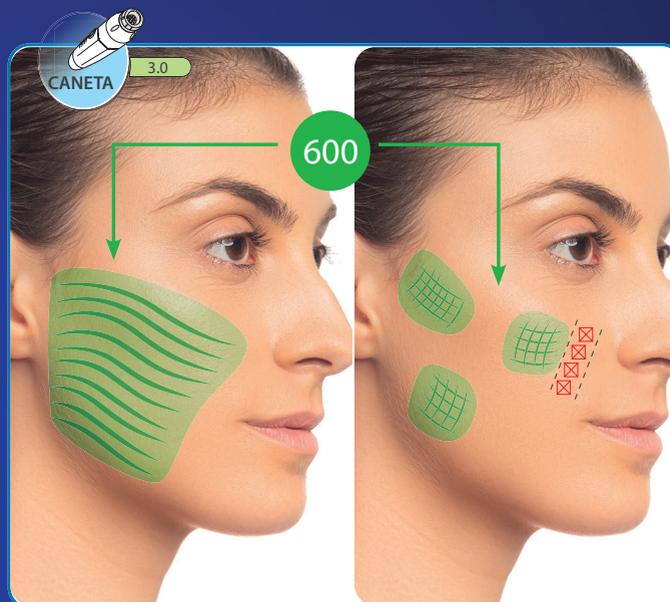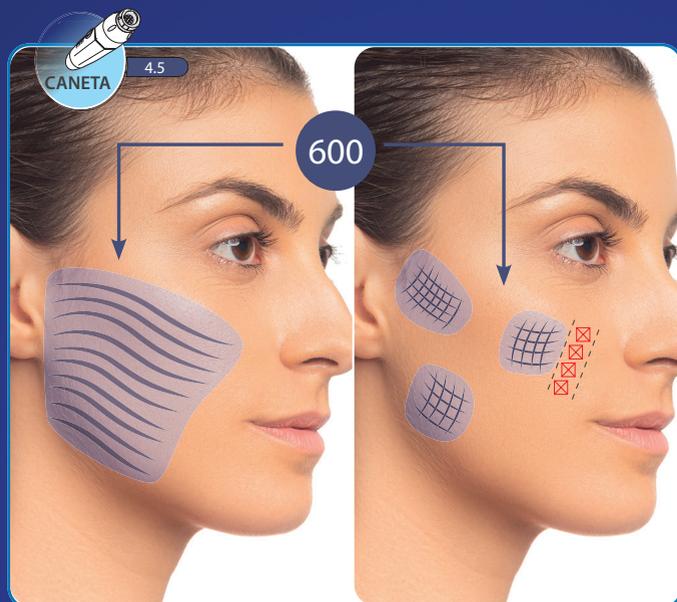


CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	0,60 J	600	-	1200
CANETA 3.0	0,60 J	600	-	1200
CANETA 1.5	0,50 J	600	-	1200
		TOTAL		3600

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

EFEITO BICHECTOMIA E JOWL*



EFEITO BICHECTOMIA E JOWL*

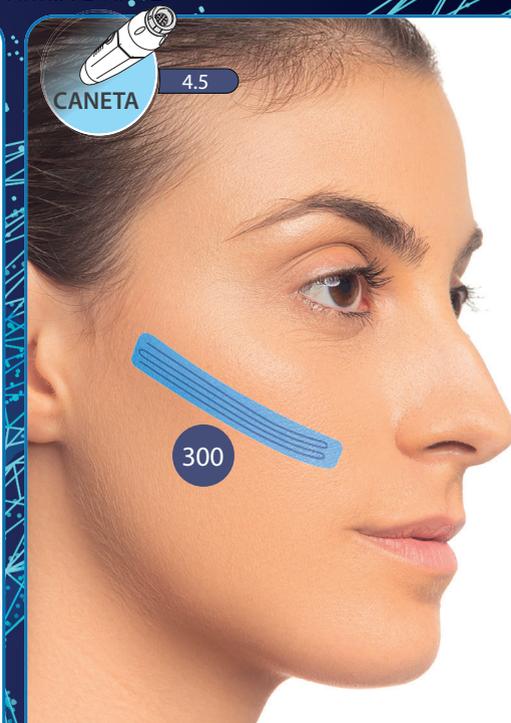

UTILIZAR CANETA DE 7,0MM SOMENTE QUANDO HOUVER GORDURA SUFICIENTE!

UTILIZAR CANETA DE 7,0MM SOMENTE QUANDO HOUVER GORDURA SUFICIENTE!

(*) ATENÇÃO!


Somente usar profundidade de 7,0mm em pacientes com compartimento de gordura profundo. SE NÃO HOUVER PROFUNDIDADE NÃO APLICAR.

Na dúvida, trabalhar a região anterior (bochechas) com a 4,5mm para sustentar.

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 7.0 (jowl e comp. de gordura) <i>*Se houver profundidade</i>	0,70 J	200	-	400
CANETA 7.0 (Efeito Buchectomia) <i>*Se houver profundidade</i>	0,70 J	300	-	600
		TOTAL		1000

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	0,70 J	600 a 800	-	1200 a 1600
CANETA 4.5 (Efeito Buchectomia)	0,70 J	300	-	600
		TOTAL		1800 a 2200

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

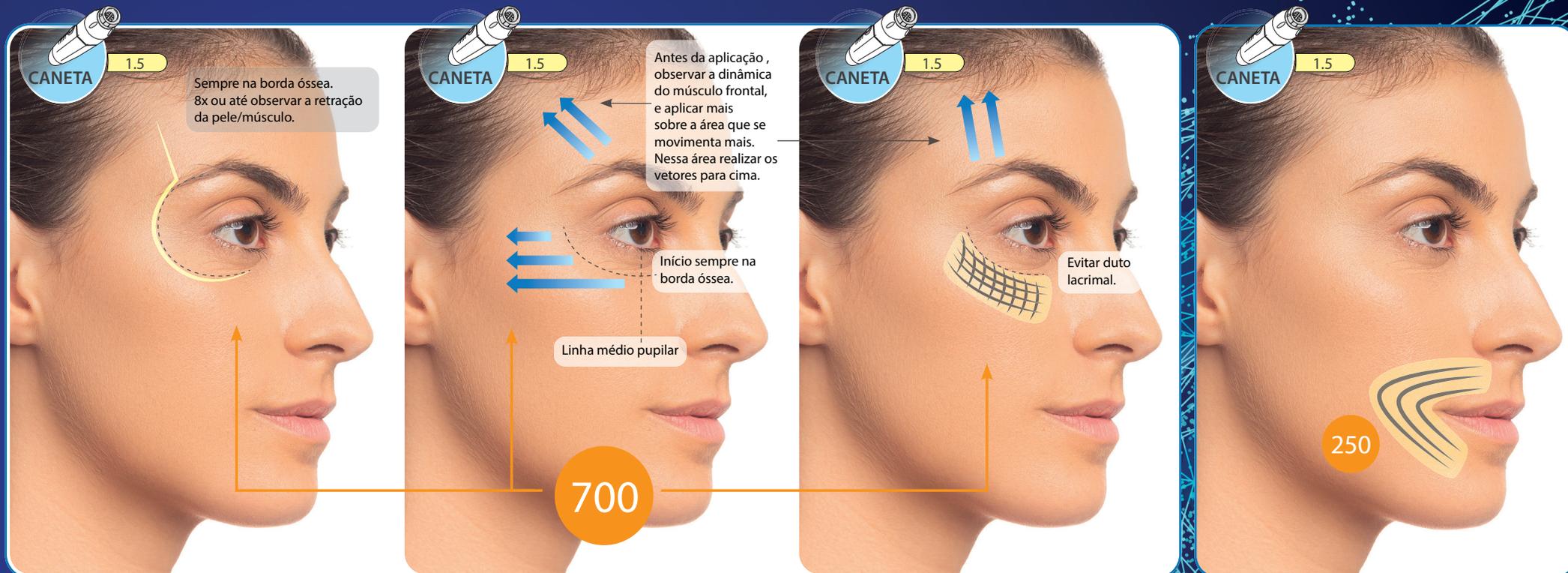

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,50 J	700	-	1400
CANETA 1.5	0,50 J	250	-	500
		TOTAL		1900


! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



DIVIDIR OS 500 DISPAROS ENTRE OS HASHTAGS.



DIVIDIR OS 500 DISPAROS ENTRE OS HASHTAGS.

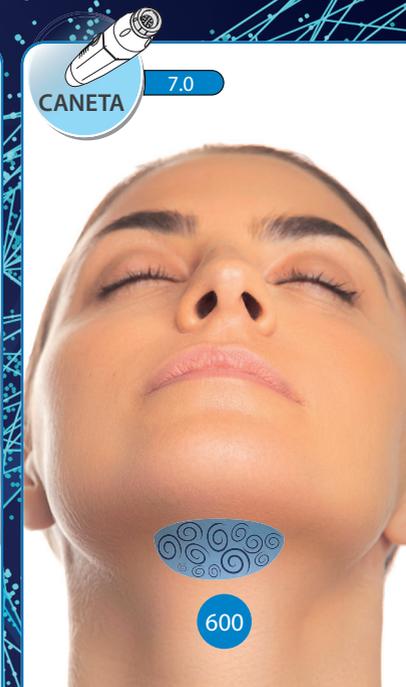

UTILIZAR CANETA DE 7,0MM SOMENTE QUANDO HOUVER GORDURA SUFICIENTE!

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	0,70 J	-	-	1000
CANETA 4.5 (Hashtags)	0,70 J	-	-	500
CANETA 3.0	0,70 J	-	-	1000
CANETA 3.0 (Hashtags)	0,70 J	-	-	500
CANETA 7.0	1,00 J	-	-	600
		TOTAL		3000 a 3600

⚠ Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Az Eye-Lift



Assinado por:

Dra. Alessandra Zawadzki


Conceito: Nos deparamos com diferentes formatos de rostos a cada tratamento proposto! O conhecimento da anatomia da área tratada precisa caminhar ao lado de uma avaliação precisa da individualidade de cada formato de face, da espessura da derme da quantidade de tecido adiposo para assegurar uma técnica segura e ao mesmo tempo eficaz em resultados! O uso da **Caneta Liftera** associada permite o tratamento mais seguro e preciso da área dos olhos.

Descrição: O AZ Eye Lif viabiliza o tratamento da área dos olhos com base na anatomia e nas características individualizadas de cada face.

Benefícios: O uso da **Caneta Liftera** permite o tratamento mais localizado e preciso da flacidez da região periocular. Possibilita a melhora do posicionamento dos supercílios, o que resulta em uma maior abertura ocular. Possibilidade de tratamento do malar mound com mais precisão.

Pontos de atenção:

- evitar os forames infra orbitários com os transdutores acima de 1,5 mm;
- evitar tratar a região frontal medial a linha hemipupilar;
- efetuar disparos de pontos bem próximos ao início do couro cabeludo quando tratamento da região frontal lateral;
- evitar o uso de transdutores de 3.0 mm em pacientes magros ou de pele mais atrofica (em geral mais idosos);
- não associar uso de toxina no mesmo dia do tratamento com o **Liftera**, pelo risco de difusão e assimetrias.

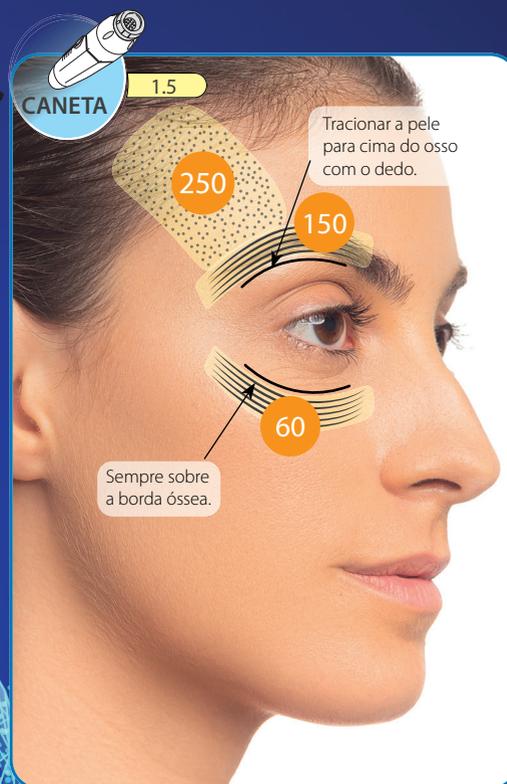

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,50 J	150	-	300
*CANETA 3.0 (malar mound)	0,50 J	60	-	120
LINHA 1.5	0,20 J	15	30	-
CANETA 1.5	0,40 J	460	-	920
CANETA 1.5	0,40 J	40	-	80
*Se houver necessidade		TOTAL	30	1420

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Fox Eyes Tech



Assinado por:




Dr. Alessandro Alarcão

Conceito: Desenvolvido pensando na grande tendência Fox Eyes, onde o objetivo é a elevação da cauda da sobrelance.

Descrição: Usamos a **Caneta Liftera**, Laser fracionado ou RF digital fracionada, **Futera Dots**, pensando em um tratamento em multi-camadas, para conseguir entregar um melhor resultado.

Benefícios: Lasers Fracionados ou RF Digital Fracionada **Futera Dots** aumentam a permeabilidade acústica do ultra-som. Excelente associação. Pode ser usado com laser de Erbium ou CO2 fracionado porque o cromóforo (Alvo) é água, ou com rádio frequência digital fracionada, **Futera Dots**. O edema protege e potencializa resultados.




Pontos de atenção: Preservar a região do forame supra orbital - devido o nervo orbital e cuidado com globo ocular, sempre fazer em cima de rebordo ósseo!

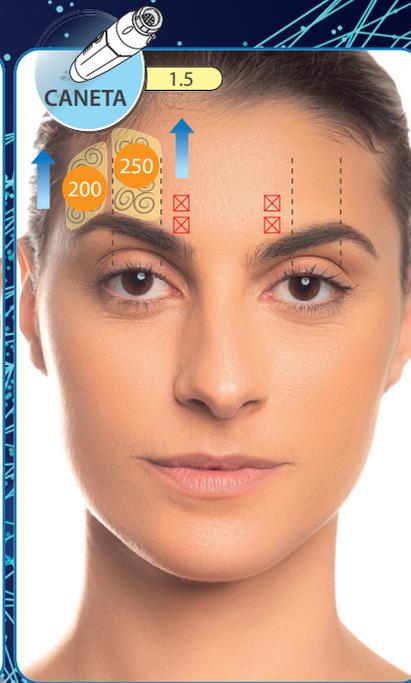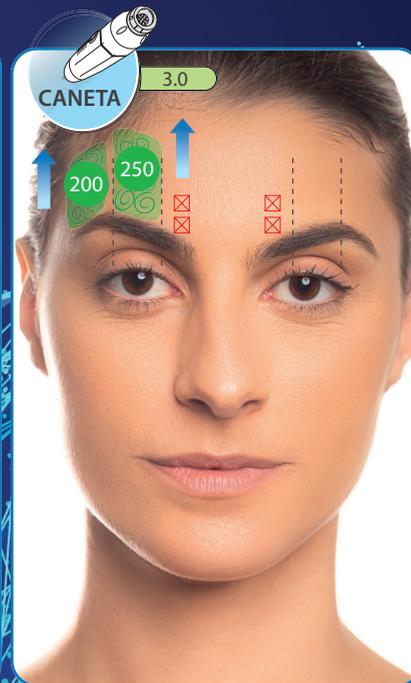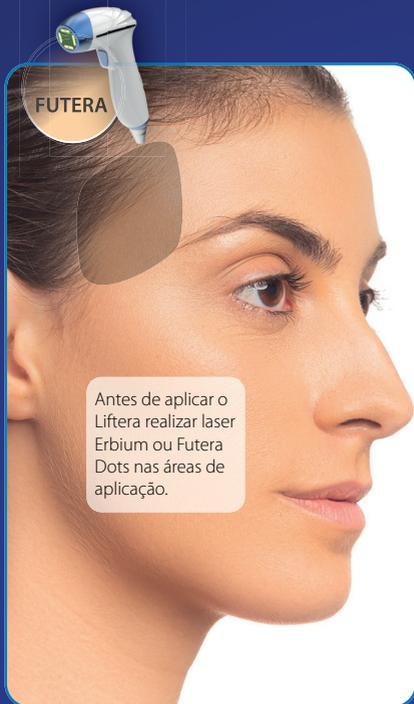

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,40 J	250	-	500
CANETA 1.5	0,20 J	250	-	500
		TOTAL		1000

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,40 J	450	-	900
CANETA 1.5	0,20 J	450	-	900
		TOTAL		1800

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

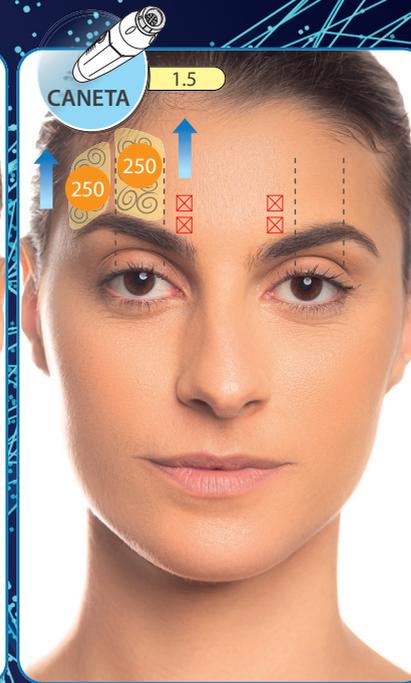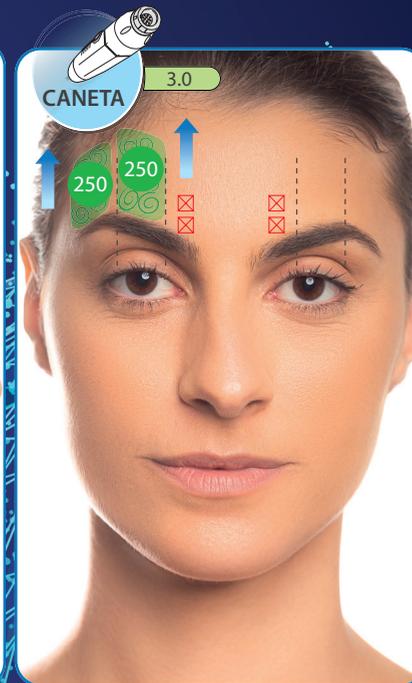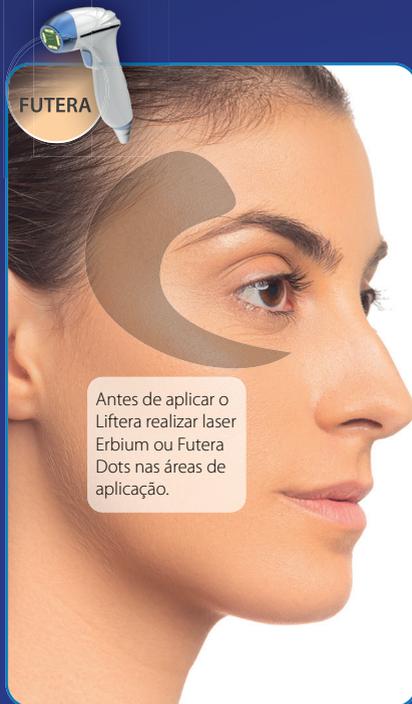

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,40 J	500	-	1000
CANETA 1.5	0,20 J	500	-	1000
		TOTAL		2000

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,40 J	500	-	1000
CANETA 1.5	0,20 J	500	-	1000
		TOTAL	132	2000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

AB Lifting + Definition



Assinado por:

Dr. Andre Braz

Conceito: A beleza no estado da arte sempre foi meu lema! Acredito que os conceitos caminham juntos e se influenciam mutuamente. O rejuvenescimento e o embelezamento facial vão muito além de corrigir desconfortos superficiais. Eles demandam um trabalho nas estruturas da face, onde a aplicação deve ser minuciosamente correta para um resultado satisfatório. Por isso, é imprescindível um diagnóstico perfeito através de uma avaliação facial minuciosa, sendo necessário um profundo conhecimento anatômico facial/cervical para intervenções assertivas, nas quais pode-se ajustar assimetrias e repor estruturas que foram modificadas ao longo do tempo sempre respeitando a individualidade de cada paciente.

Descrição: O conceito apresentado tem base anatômica e respeita a individualidade de cada paciente, sendo importante a classificação do formato facial. Nos formatos em coração, oval e angulado é possível esculpir com a **Caneta Liftera** em áreas que demandam maior detalhamento complementando o tratamento dos injetáveis. A partir dessa precisão, tratamos regiões menores e delicadas sem consumir excessivamente compartimentos de gordura que são essenciais na sustentação da face.

Nos pacientes com o formato facial redondo ("heavy face"), repetimos a idéia apresentada acima e acrescentamos o tratamento da região submalar com a **Caneta Liftera** 4,5 mm e 3,0 mm para um efeito "bichectomia like", além de realçar o preenchimento com ácido hialurônico da região zigomático/malar que é a base do AB face structure.



AB Lifting + Definition






Assinado por:

Dr. Andre Braz

Benefícios: Proporcionar um tratamento individualizado de acordo com os formatos faciais. Causar um efeito lifting ao tratar a região lateral da face pela contração do SMAS + ligamentos massetéricos presentes nessa região. Além de uma maior definição do contorno facial tratando a região cervical inframandibular. Trabalhar com vetores em "pinceladas", onde a **Caneta Liftera** 1,5 mm na frente irá fortalecer a musculatura frontal e palpebral lateral com segurança (efeito toxina like) e depressor do lábio no sentido do sulconasogeniano formando pontos de coagulação lineares.

Pontos de atenção: Ao realizar os disparos lineares na linha e ramo de mandíbula, se utiliza uma energia maior para estímulo intenso de colágeno na região do SMAS e reforço com a **Caneta Liftera** 4,5 mm e 3,0 mm. Além disso, se realiza o contorno do ângulo da mandíbula em movimento "L" abrangendo a região submandibular até a região preauricular. Se atentar para a anatomia local, uma vez que poupamos o consumo dos compartimentos de gordura das regiões que abrangem sulco nasolabial e zigomático malar. Utilizo a **Caneta Liftera** 4,5 mm e 3,0 mm na região submalar somente nos pacientes com formato facial redondo ou naqueles onde a diminuição dessa área seria benéfica para um resultado mais "slim face". Considerar as zonas de risco faciais pela inervação sensitiva (forames supra e infra orbitários além do mentoniano) e motora superficial (ramos temporal e mandibular marginal mais medialmente).

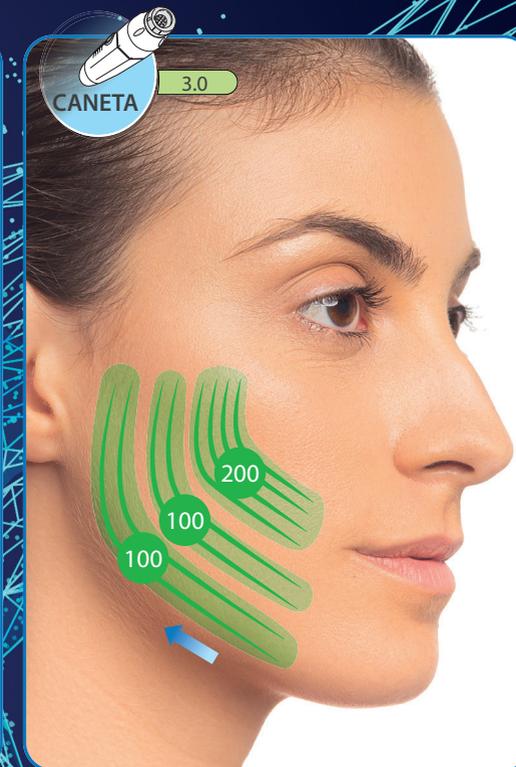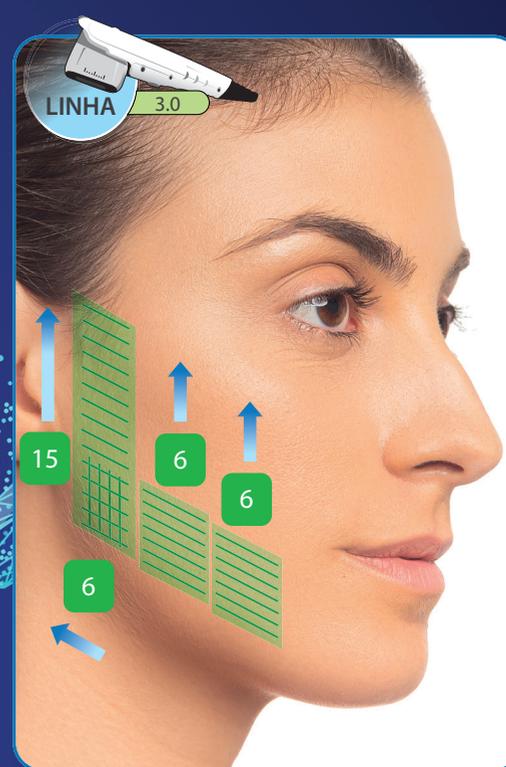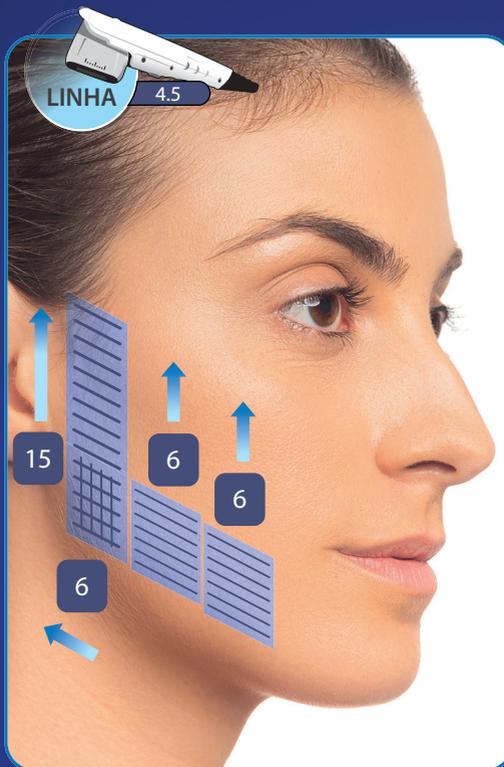

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	1,10 J	33	66	-
CANETA 4.5	1,10 J	400	-	800
LINHA 3.0	0,60 J	33	66	-
CANETA 3.0	0,60 J	400	-	800
		TOTAL	132	1600

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	1,10 J	300	-	600
CANETA 3.0	0,60 J	300	-	600
CANETA 1.5 - Toxina Like	0,30 J	-	-	600
CANETA 1.5 - Perioral	0,50 J	50	-	100
CANETA 1.5 - Fusão Temporo / Zigomático e Mediopupilar	0,50 J	200	-	400
		TOTAL		2300

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

D-Ponytail Lifting



Assinado por:

Dr. Daniel Dziabas

Conceito: São queixas frequentes entre os pacientes a sensação de palpebras caídas e retificação ou queda das sobrancelhas. O protocolo D-Ponytail Lifting tem por objetivo trabalhar estas áreas.

O penteado “rabo de cavalo” valoriza o olhar e ainda reduz a ptose palpebral.

Descrição: Aplicação alternada da **Caneta Liftera** 4.5 mm e 1.5 mm no terço superior da face e área de implantação capilar.

Benefícios: Lifting das sobrancelhas, tratamento da flacidez do terço superior e palpebras e valorização do olhar com penteado “rabo de cavalo”

Pontos de atenção: Evitar aplicar a **Caneta Liftera** 3.0 mm jowl supra orbitário.



CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	0,80~1,00 J	300	-	600
CANETA 3.0	0,50~0,70 J	200	-	400
CANETA 1.5	0,50 J	600	-	1200
		TOTAL		2200

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Full Face Lifting



Assinado por:

Dra. Fernanda B. Rocha Mendes, PhD

Conceito: Para realizar um lifting não cirúrgico e definir o contorno do terço inferior da face.

Descrição:


1. Início com a Linha 4,5 mm em movimentos lineares perpendiculares e ascendentes, em duas colunas. Do ramo da mandíbula até abaixo do arco zigomático.
2. Em seguida faço Linha 3,0 mm em colunas ascendentes e colunas do medial para a lateral da face, além da área submentoniana e submandibular, para definir o contorno do terço inferior da face. Importante respeitar as zonas de risco da face.
3. Sigo com as **Canetas Liftera** 4,5 mm, 3,0 mm e 1,5 mm em movimentos lineares e circulares.

Benefícios: Proporcionar um efeito Lifting da face, tratar a flacidez e fazer pontos de ancoragem.

O resultado inicial é observado de imediato com melhor definição do ramo mandibular, efeito "top model look", melhora do sulco nasogeniano e "abertura do olhar".

Faça uma hemiface, sente o paciente e dê a ele um espelho.

Pontos de atenção: Atenção para o ramo mandibular marginal do ramo facial e artéria temporal.

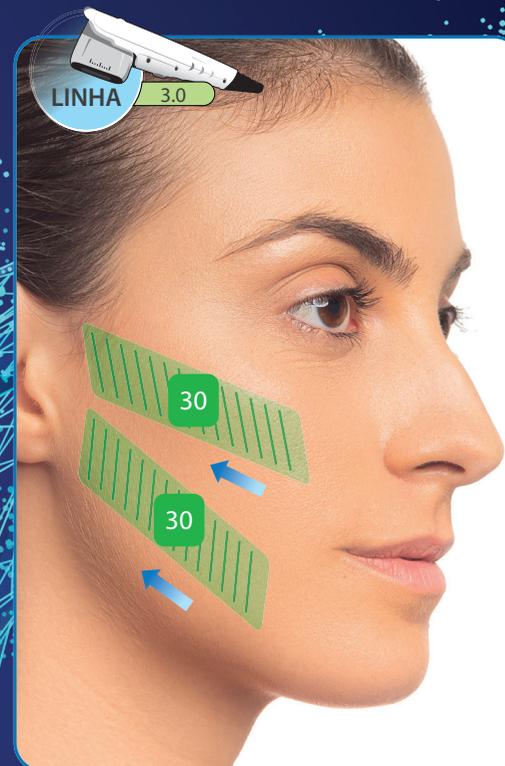





CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	0,90 J	40	80	-
LINHA 3.0	0,70 J	120	240	-
		TOTAL	320	

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	1,00 J	300	-	600
CANETA 3.0	0,70 J	750	-	1500
		TOTAL		2100

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

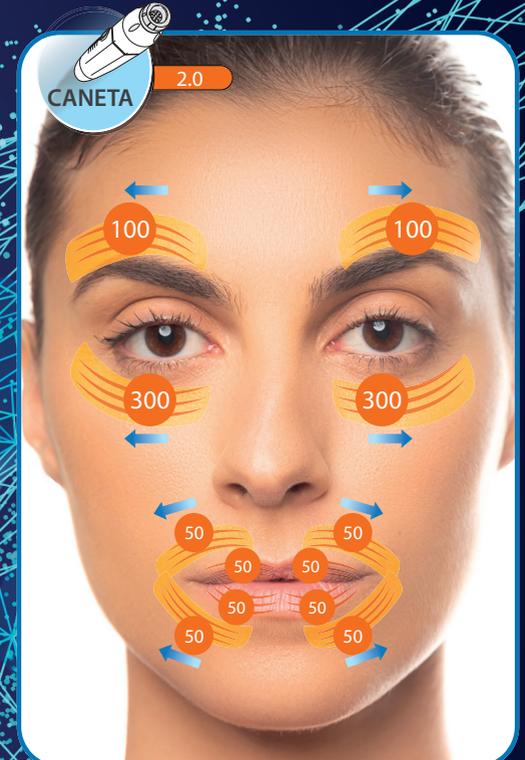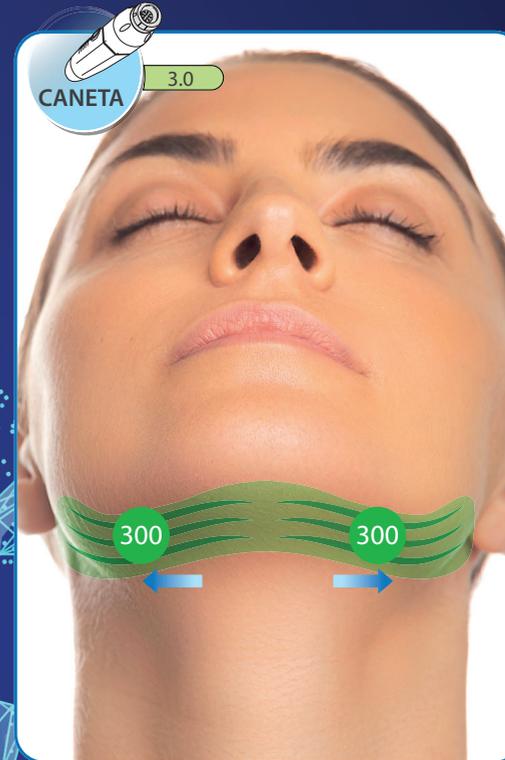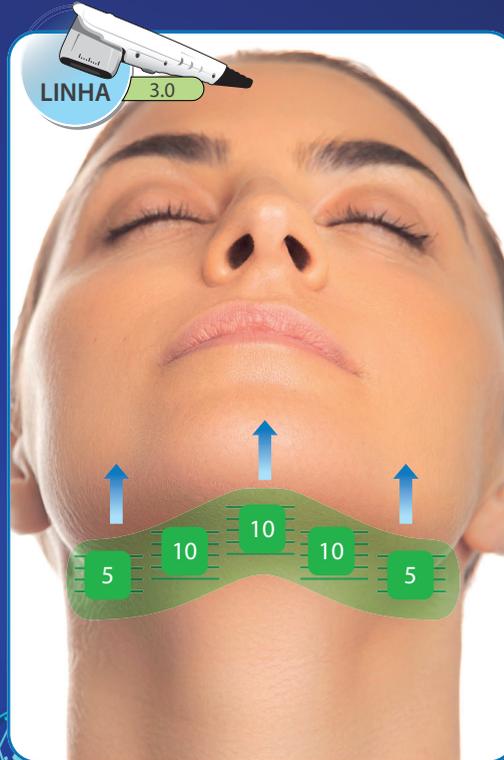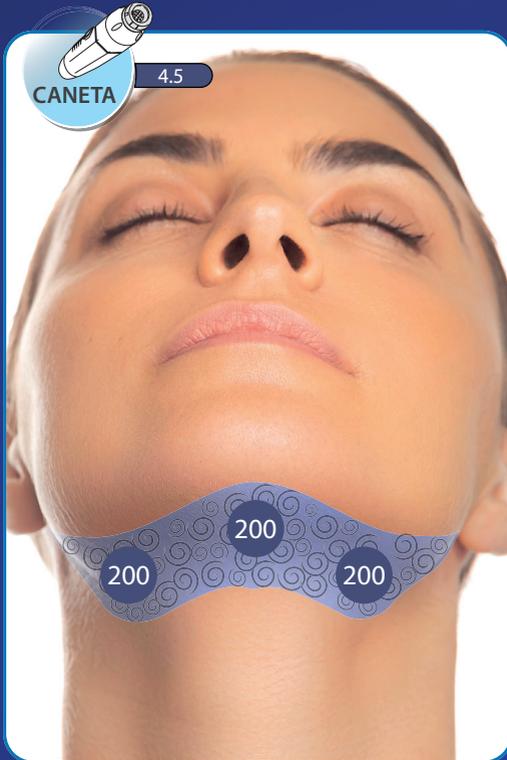

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	1,00 J	-	-	600
LINHA 3.0	0,70 J	-	40	-
CANETA 3.0	0,70 J	-	-	600
CANETA 2.0	0,50 J	-	-	1200
		TOTAL	40	2400

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Lift Up



Assinado por:

Dr. Fernando Macedo

Conceito: Associação do uso de tratamento em linha e **Caneta Liftera** com 3 profundidades (4,5 mm, 3,0 mm e 1,5 mm) para sustentar face, abrir o olhar e melhorar a firmeza e qualidade da pele. Proposta de tratamento desigual utilizando-se áreas de ancoragem, respeitando-se áreas de risco anatômicas gerais e individualizadas para cada paciente.

Descrição: Grande número de pacientes com queixas de flacidez da pele, envelhecimento periocular, olhar "caído" e sensação de peso ou sobra de pele no terço inferior da face.

Possibilidade de associar tratamento mais confortável e individualizado com o uso da **Caneta Liftera** e pelo **disparo digital**.

Abordagem em áreas de acoplamento mais difíceis (periocular e frente) e otimização da sustentação da pele com foco na junção da pele - SMAS - ligamentos com risco minimizado respeitando-se a anatomia geral e individual para cada paciente.



Benefícios: Melhora da qualidade da pele (linhas finas e flacidez) pelo estímulo da produção de colágeno e da sustentação da face; pela melhor ancoragem em pontos de sustentação.

Pontos de atenção: Há variações do tratamento. Na face priorizo sempre a **Caneta Liftera** 4,5 mm em relação à linha pela segurança de poder identificar áreas com inervações mais superficiais e performar com um circuito de tratamento adaptado para poupar estas áreas, seja pela ausência de disparos ou pela movimentação muito rápida da **Caneta Liftera** nestes pontos referidos pelo paciente.

Peles mais espessas e que precisam de mais sustentação, posso substituir uma parte dos disparos com ponteira de 1,5 mm por mais disparos com 3,0 mm ou 4,5 mm de profundidade.


Peles mais finas, envelhecidas e com linhas finas, podemos diminuir ou preterir o uso do tratamento com 4,5 mm pelo uso aumentado do tratamento com 3,0 mm (mesmo para sustentação da face) e com 1,5 mm.

Quando desejamos um tratamento mais uniforme, em alguma parte da face (e principalmente pescoço) devemos priorizar o tratamento em linha, se for tolerado e não for uma área de risco para aquela localização.

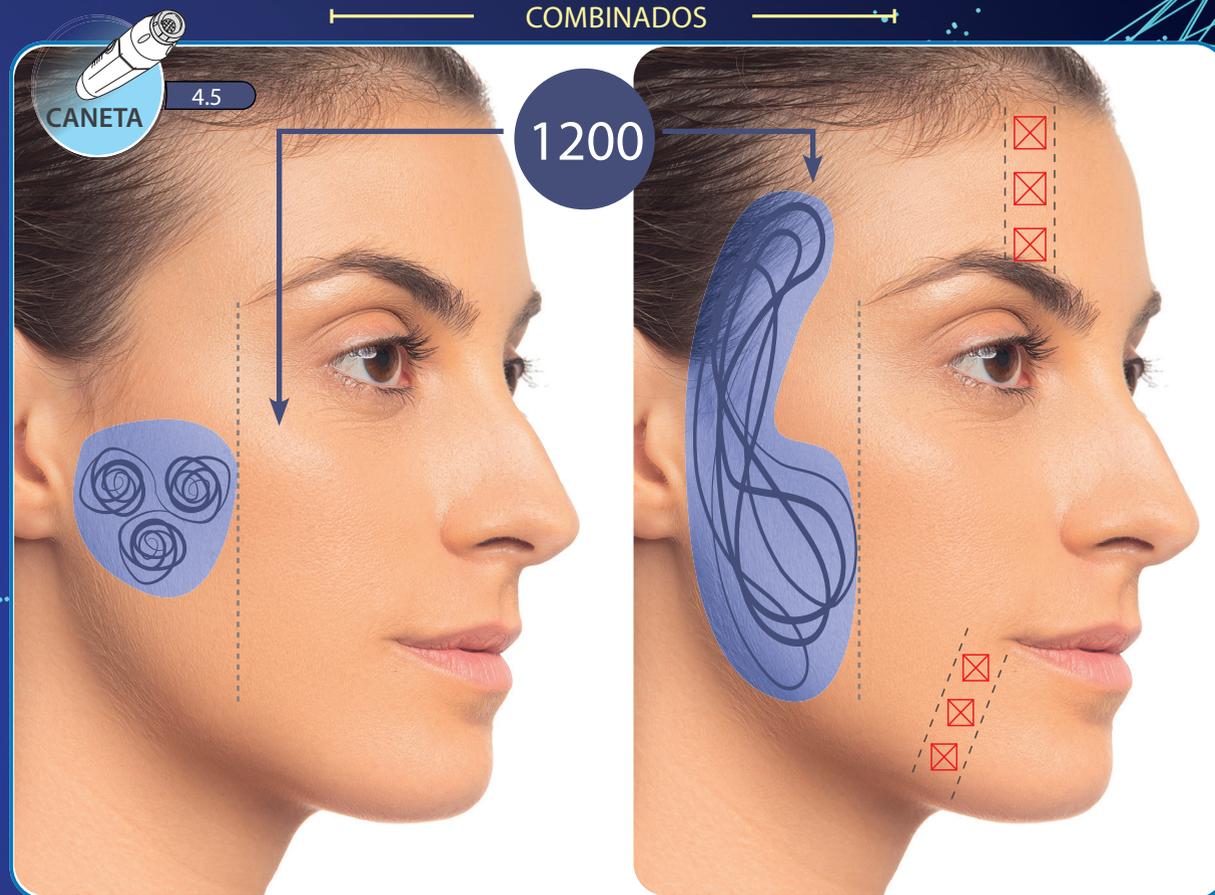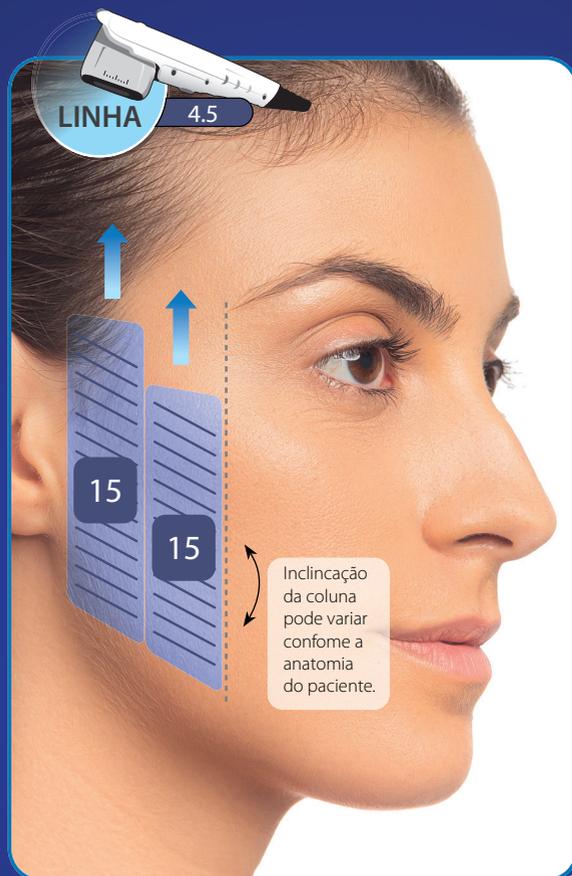




CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	0,70~1,00 J	30	60	-
CANETA 4.5	0,90~1,1 J	1200	-	2400
		TOTAL	60	2400

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

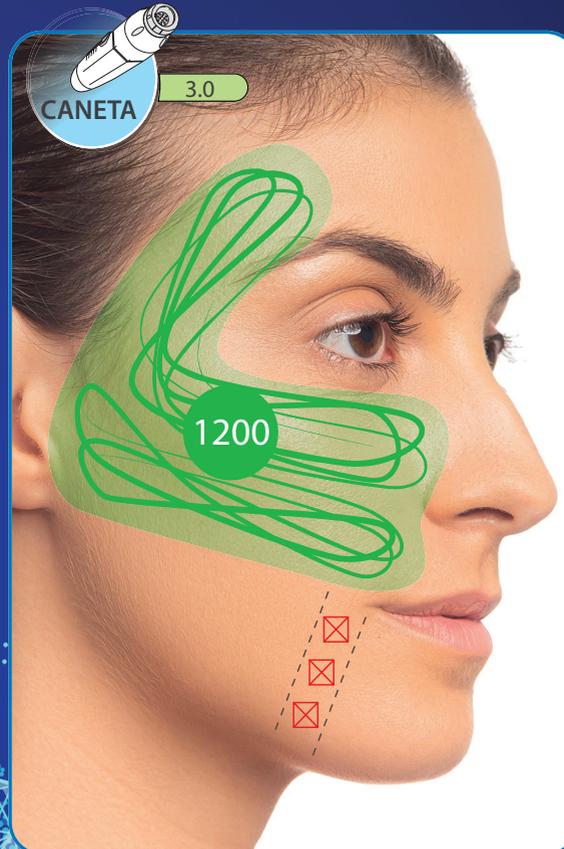

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 3.0	0,70 J	30 a 40	60 a 80	-
CANETA 3.0	0,70 J	1200	-	2400
CANETA 1.5	0,50 J	1200	-	2400
		TOTAL	60 a 80	4800

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

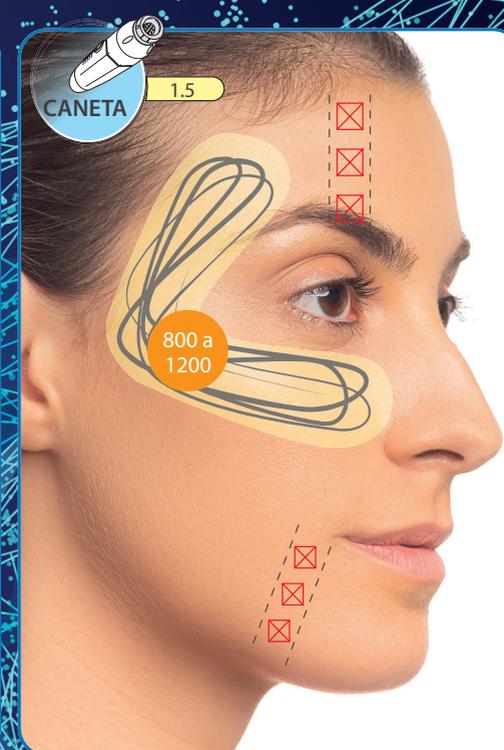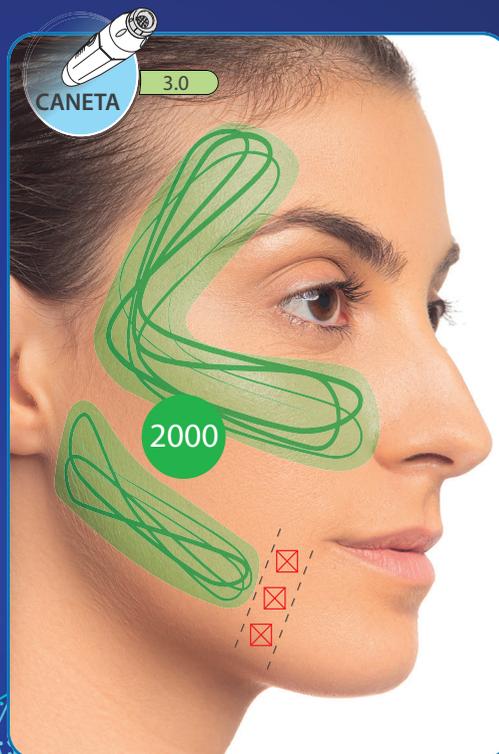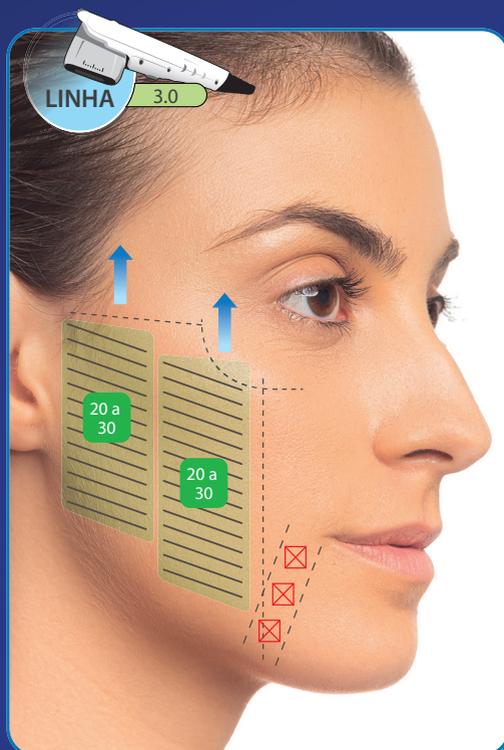

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 3.0	0,70 J	40 a 60	80 a 120	-
CANETA 3.0	0,70 J	2000	-	4000
LINHA 1.5	0,50 J	30 a 40	60 a 80	-
CANETA 1.5	0,50 J	800 a 1200	-	1600 a 2400
		TOTAL	140 a 200	5600 a 6400

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Eye & Lip



Assinado por:


Dr. João Carlos L. Simão

Conceito: Nova perspectiva para tratar áreas especiais: periocular, perioral e lábios. Nessas áreas, as **Canetas Liftera** promovem perfeita acoplagem além de facilidade, rapidez e segurança da aplicação.


Descrição: Aplicação das **Canetas Liftera** de 3,0 mm e 1,5 mm nas áreas: perioculares, perilabiais e nos lábios.

Benefícios: A técnica promove retração da pele das áreas periocular e perioral, melhora das linhas finas, melhora do contorno labial, melhora da qualidade e do brilho da mucosa labial externa além de discreto aumento do volume labial, ideal para pacientes que não desejam ou têm receio de se submeter a preenchimento labial.

Pontos de atenção: Na região periocular, é importante tracionar as pálpebras para que fiquem apoiadas no rebordo ósseo periorbicular dos olhos e não direcionar a **Caneta Liftera** para o globo ocular. Na aplicação da pálpebra superior, o paciente deve ficar com os olhos fechados. Na aplicação da pálpebra inferior, o paciente deve ficar com os olhos abertos e olhar para cima. Na aplicação da região perioral e na boca, o paciente deve proteger os dentes com a própria língua ou com gaze por dentro da boca.

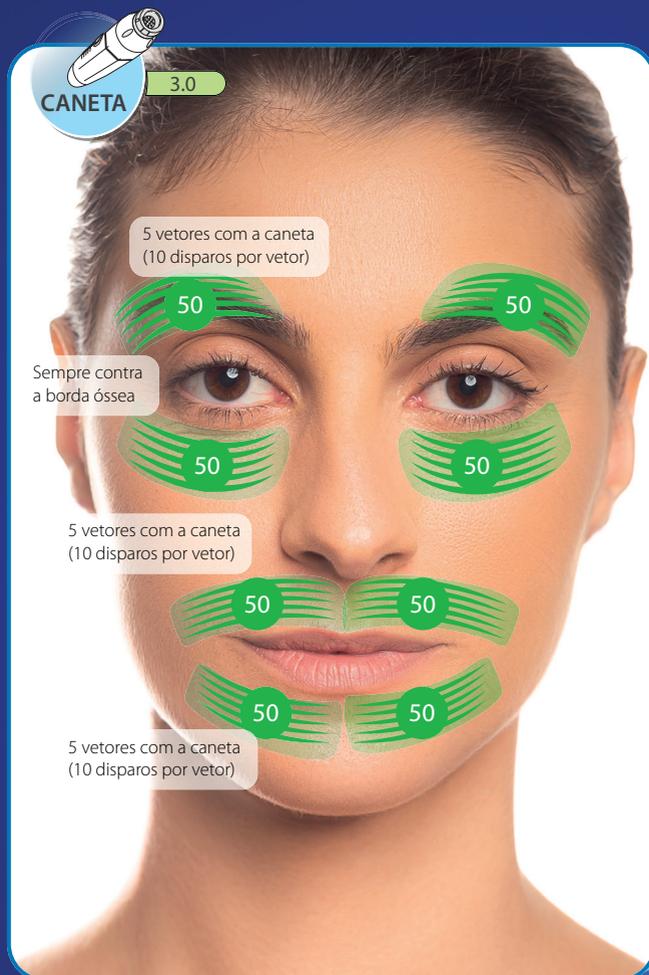

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,50 J	-	-	400
CANETA 1.5	0,40 J	-	-	400
		TOTAL		800

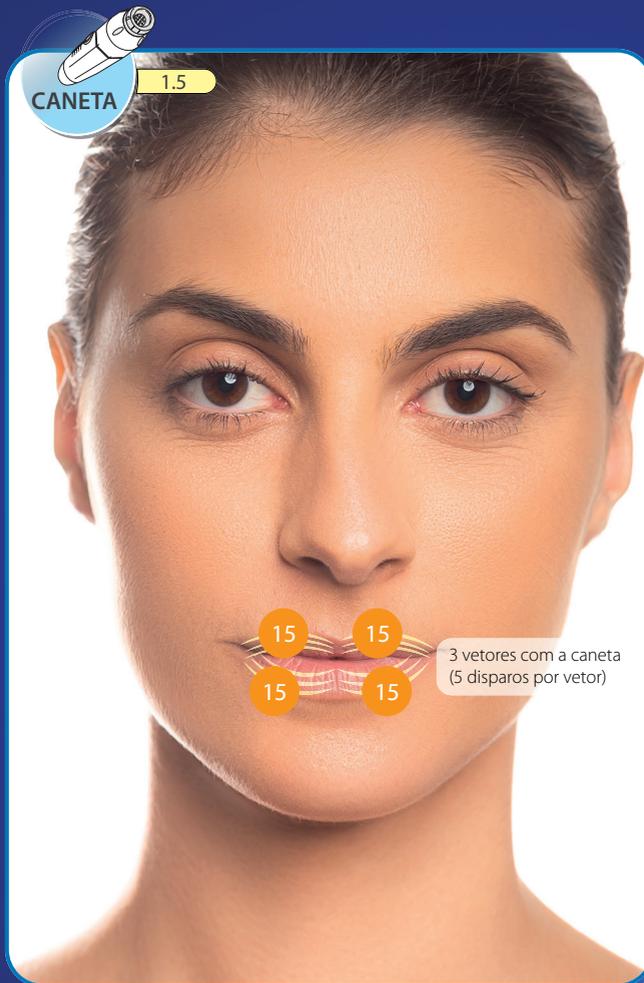

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,30 J	-	-	60
CANETA 1;5	0,40 J	-	-	30
		TOTAL		90

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Anatomical Painting



Assinado por:

Dra. Patricia Ormiga


Conceito: O conhecimento da anatomia tem fundamental importância na obtenção dos melhores resultados de qualquer tratamento facial. Com o **Liftera**, além de trazer segurança, traz a possibilidade de potencializar resultados e evitar efeitos indesejados. Assim, considero fundamental o desenvolvimento de tratamentos que priorizem o conhecimento de todas as estruturas anatômicas que possam ter impacto na resposta terapêutica. Além disso, o uso da **Caneta Liftera** traz novas possibilidades tanto para atingir estruturas como para otimizar a cobertura com os pontos de coagulação, quando associada a conceitos ligados a técnicas de pintura.

Descrição: Conceito de tratamento que prioriza o conhecimento da anatomia, levando em consideração o SMAS, a linha ligamentar, o ligamento de retenção orbital e a espessura da camada areolar de gordura, bem como técnicas de pintura para cobertura, com o objetivo de produzir “efeito lift” e rejuvenescimento global da face.

Benefícios: A Melhor resposta pelo tratamento dos pontos de interesse da linha ligamentar; diminuição do efeito de esvaziamento com queda do “jowl” que muitas vezes surge com o tratamento da área anterior à linha ligamentar com o transdutor linear de 4,5 mm; tratamento do ligamento de retenção orbital com consequente melhora do resultado da região infra-orbital; maior segurança com diminuição dos disparos com o transdutor linear de 4,5mm.



Pontos de atenção:

- diminuir número de disparos com o transdutor linear de 4,5mm em pacientes de rosto mais magro;
- evitar o forame infraorbitário (1,5 cm abaixo do rebordo orbitário inferior, na linha medio-pupilar) com os transdutores acima de 1,5 mm;
- evitar adentrar a região temporal, da região frontal medial à linha medio-pupilar, o arco zigomático e a linha de mandíbula;
- diminuir o número de disparos sobre os pontos da linha ligamentar em pacientes com gordura subcutânea muito reduzida.

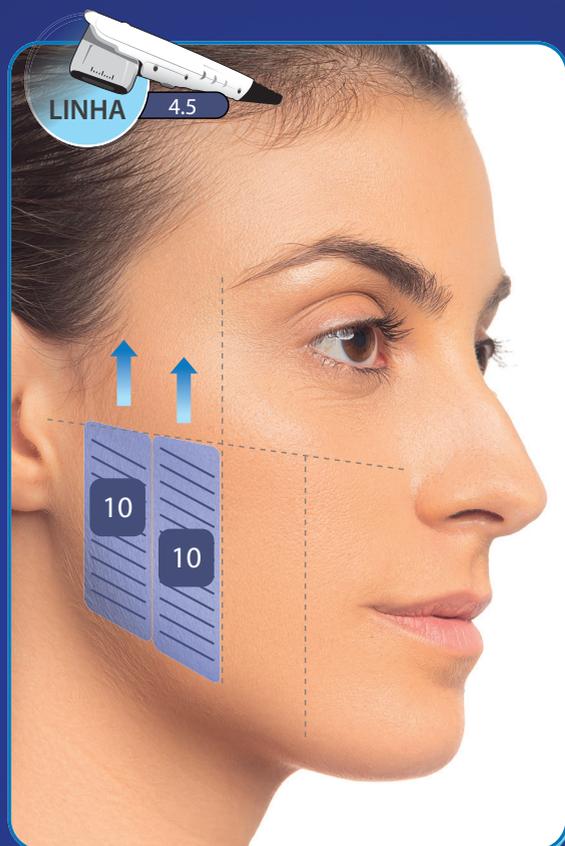



CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	0,90 J	30	60	-
CANETA 4.5	1,20 J	500	-	1000
		TOTAL	60	1000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

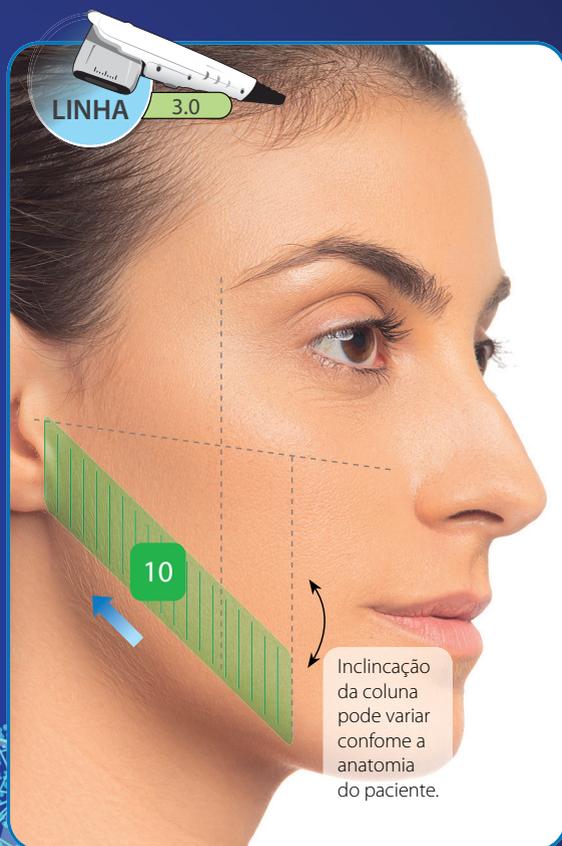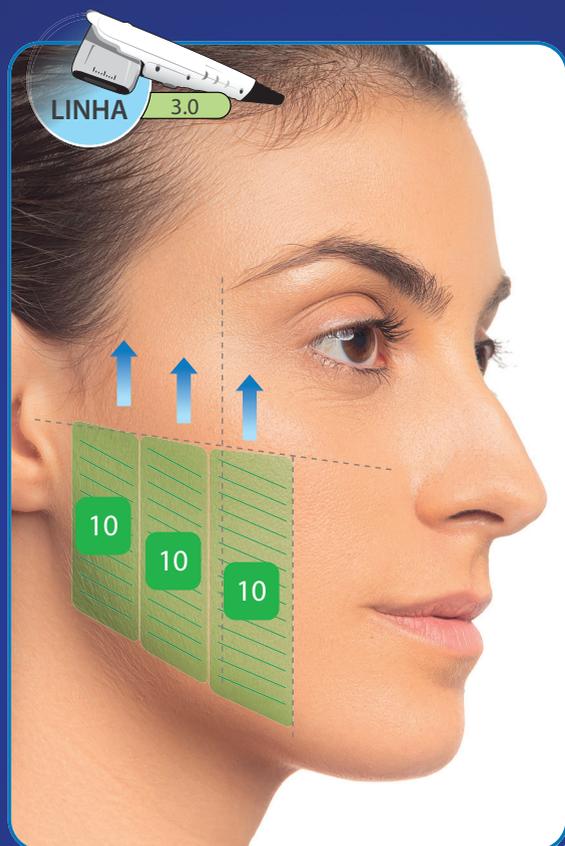

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 3.0	0,50 J	40	80	-
CANETA 3.0	0,60 J	700	-	1400
		TOTAL	80	1400

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

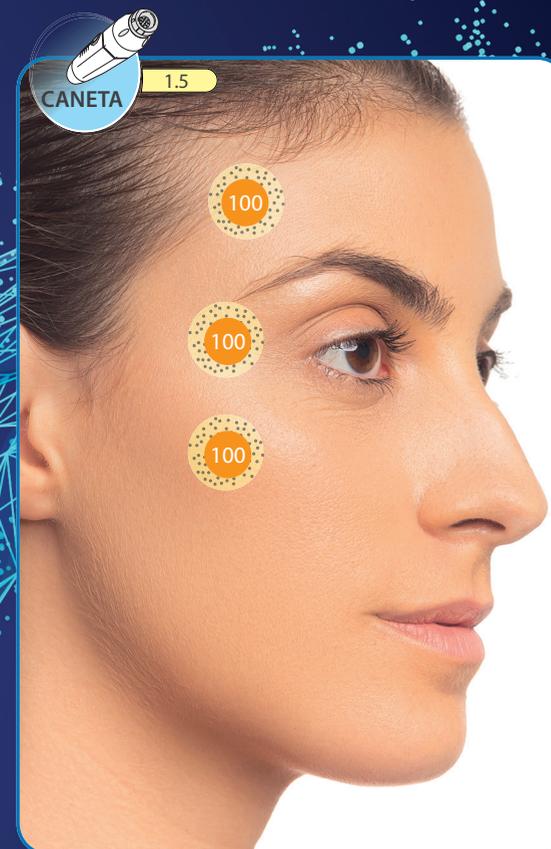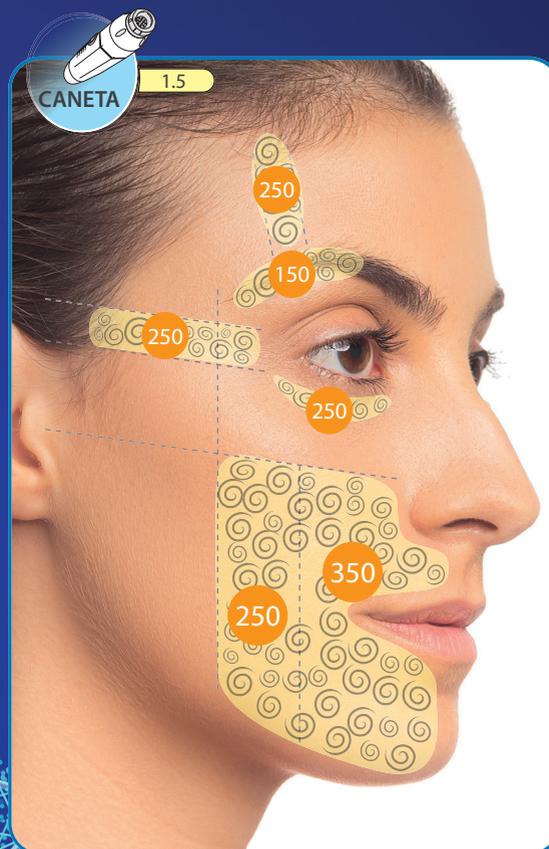

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 2.0	0,40 J	750	-	1500
CANETA 1.5	0,40 J	1500	-	3000
CANETA 1.5 - Pontos de Ancoragem	0,40 J	300	-	600
		TOTAL		5100

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

PROTOCOLO

Buff Lift + Bananinha & Celulite Off



Assinado por:

Dra. Natalie Borelli

Conceito: Desenvolvido com base nas principais queixas que recebemos na clínica quando o assunto é glúteos, lipodistrofia ginoide e gordura sub glútea.

Descrição: Essa aplicação foi pensada para quando o paciente deseja sustentação glútea, melhora da qualidade da pele e tratamento da gordura sub glútea.

Avaliação da aplicação: A aplicação apresentada foi desenvolvida e executada em um paciente com a seguinte avaliação:

- Perda da sustentação glútea
- Pele com aspecto de “casca de laranja” e depressões cutâneas
- Gordura sub glútea pronunciada

Benefícios: Estímulo de colágeno; Projeção e melhora do contorno dos glúteos; Lifting dos glúteos; Tratamento para celulite; Tratamento da gordura sub glútea (bananinha).

Pontos de atenção: Cuidado ao realizar a aplicação concentrada nos pontos de celulite com acúmulo excessivos de disparos.

Atenção ao número de disparos com a ponteira 3.0 mm se o glúteo já apresentar consumo pronunciado de gordura (se necessário, compensar o número de disparos com a ponteira 1.5 mm).

Avaliar a necessidade de tratamento na gordura sub glútea, utilizar a ponteira 4.5 mm somente nos casos com acúmulo de gordura.


Liftera

Natalie Borelli

Liftera

PROTOCOLO ASSINADO |

| BUTT LIFT + BANANINHA

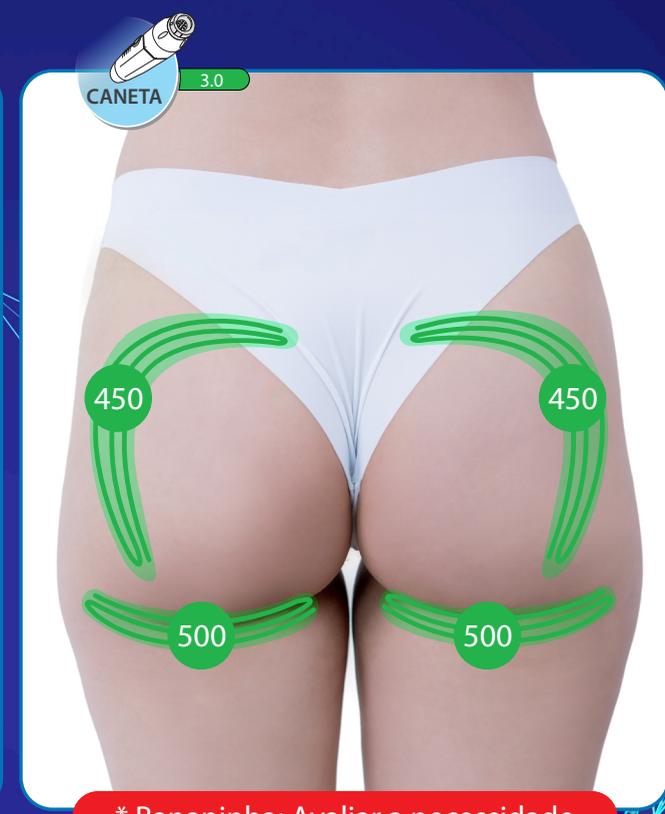

* Bananinha: Avaliar a necessidade

* Bananinha: Avaliar a necessidade;
Utilizar Caneta Liftera 4.5 se houver gordura.

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,70 J	2900
CANETA 3.0 (*) Bananinha	0,70 J	1000
CANETA 4.5 (*) Bananinha	1,00 J	600

Maria
Natalie Borelli

Liftera

PROTOCOLO ASSINADO |



| BUTT LIFT + BANANINHA





CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,50 J	2900

Natalie Borelli

PROTOCOLO ASSINADO | CELULITE OFF

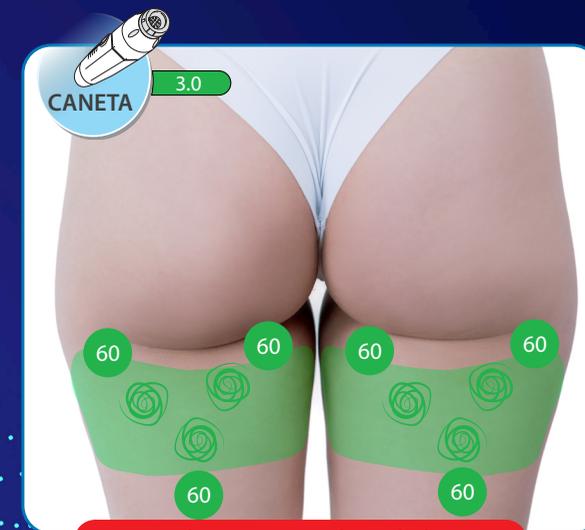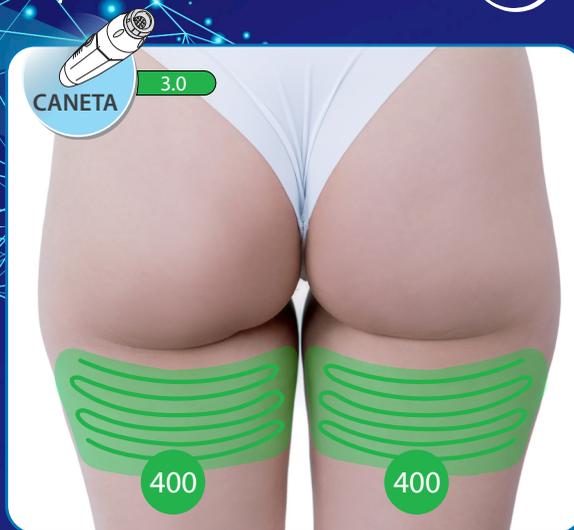

Avaliar o grau da celulite

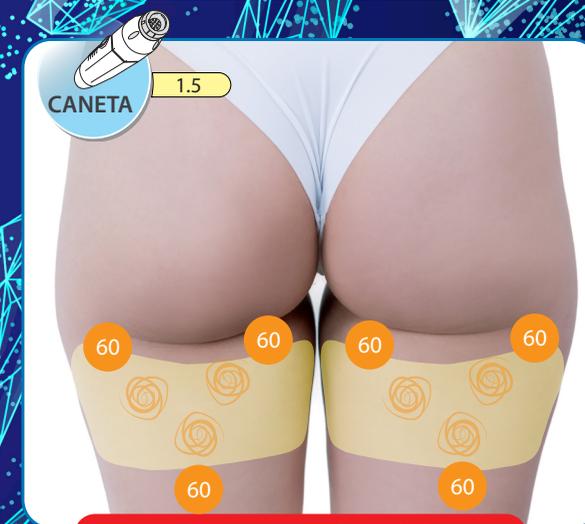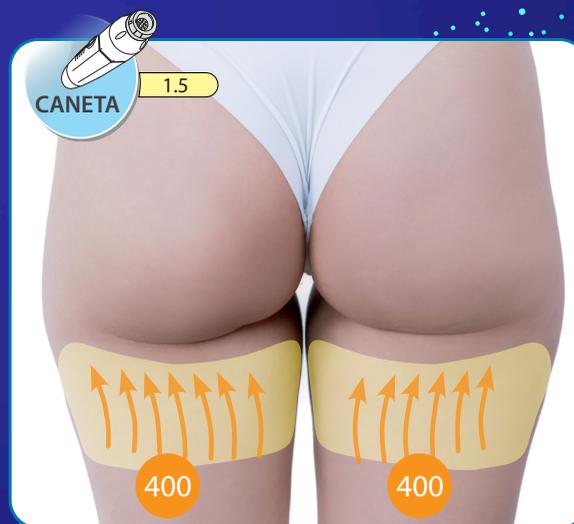

Avaliar o grau da celulite

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,70 J	1600
CANETA 3.0 (*) por celulite	0,40 J	(*)60

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,50 J	1600
CANETA 1.5 (*) por celulite	0,30 J	(*)60

PROTOCOLO

Vênustera



Liftera

Assinado por:

Dra. Shirlei Borelli

Conceito: Aumento da procura por procedimentos de rejuvenescimento íntimo feminino.

Descrição: Essa aplicação foi pensada para a paciente que deseja a melhora da flacidez de grandes e pequenos lábios e diminuição da gordura de monte pubiano.

Avaliação da aplicação: A aplicação apresentada foi desenvolvida e executada em uma paciente com a avaliação de:

- Flacidez de pequenos e grandes lábios
- Acúmulo de gordura em monte pubiano

Benefícios: Melhora estética de grandes e pequenos lábios; Melhora da flacidez de pequenos lábios; Melhora da flacidez de grandes lábios; Diminuição do volume de monte pubiano.




Pontos de atenção: Não realizar disparos no clítoris, uretra e dentro do canal vaginal. Se os grandes lábios forem flácidos atenção ao número de disparos da ponteira 3.0 mm para evitar um consumo de gordura local.

Se os grandes lábios forem mais volumosos e a paciente desejar diminuir volume, aumente o número de disparos da ponteira 3.0 mm.

Avaliar espessura dos pequenos lábios para definir possibilidade de fazer disparos com a ponteira 2.0 mm, caso não seja possível, aumentar o número de disparos e utilizar a ponteira 1.5 mm.

PROTOCOLO ASSINADO |

| VÊNUSTERA

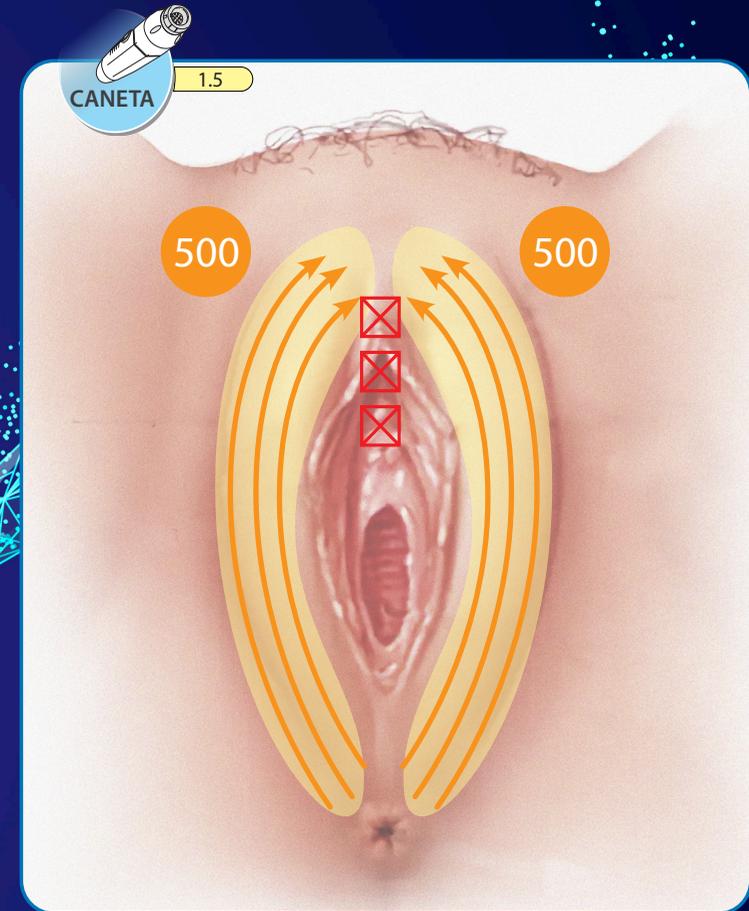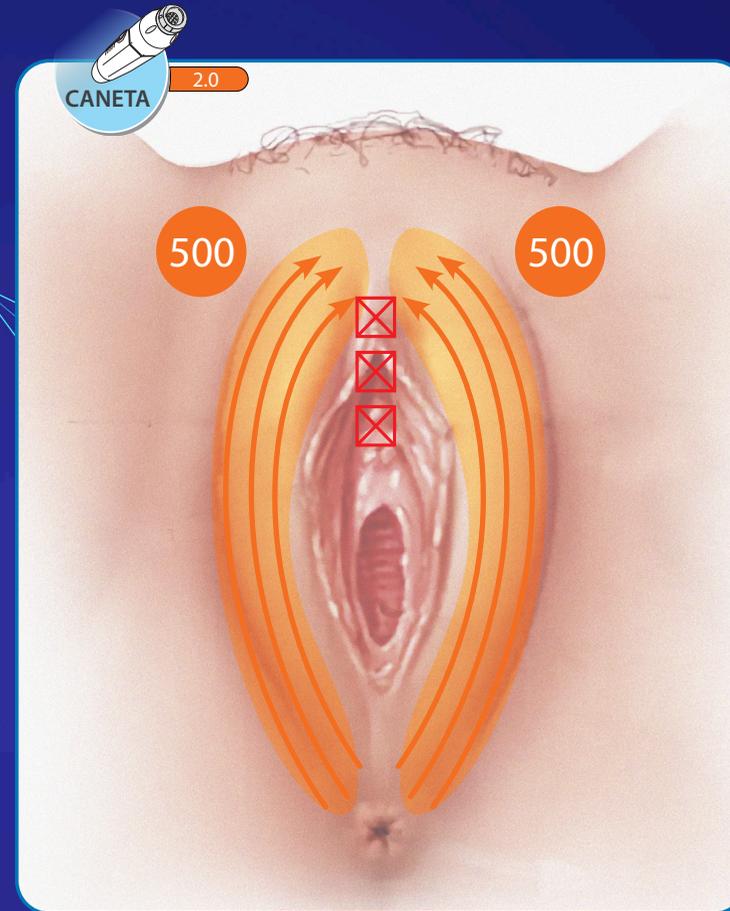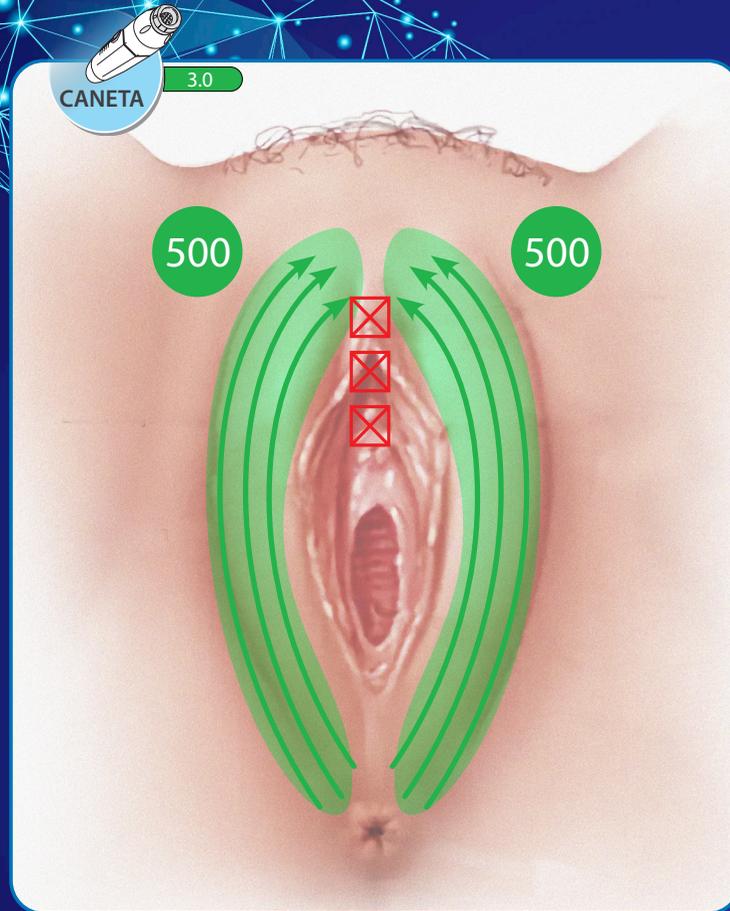

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,50 J	-	1000
CANETA 2.0	0,40 J	-	1000
CANETA 1.5	0,40 J	-	1000
TOTAL			3000

TÉCNICA "FLAP"





Aplicar de **fora para dentro** utilizando o dedo indicador da mão para proteger e dar apoio durante os disparos.



Aplicar de **dentro para fora** utilizando o dedo indicador da mão para proteger e dar apoio durante os disparos.

EM AMBOS PEQUENOS LÁBIOS

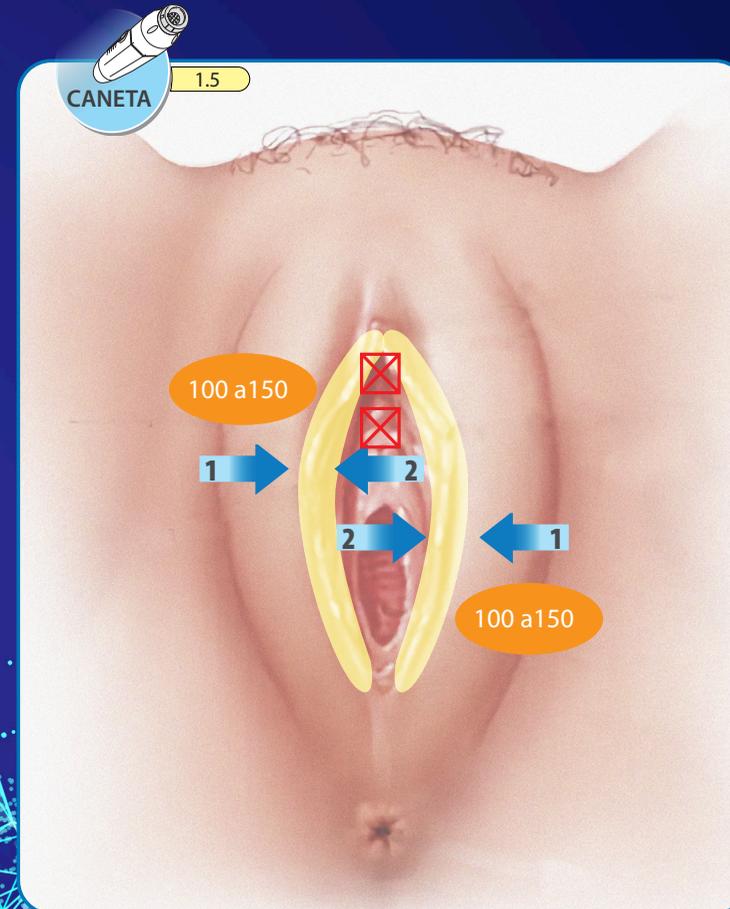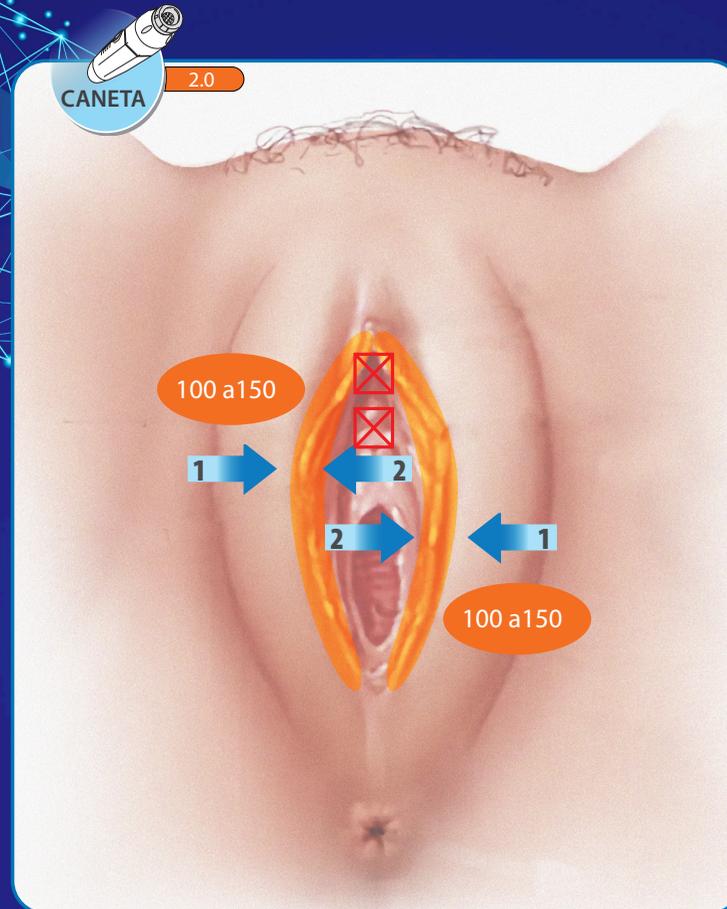

TÉCNICA "FLAP"




Aplicar de **fora para dentro** utilizando o dedo indicador da mão para proteger e dar apoio durante os disparos.



Aplicar de **dentro para fora** utilizando o dedo indicador da mão para proteger e dar apoio durante os disparos.


EM AMBOS PEQUENOS LÁBIOS

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 2.0	0,40 J	200 a 300
CANETA 1.5	0,40 J	200 a 300

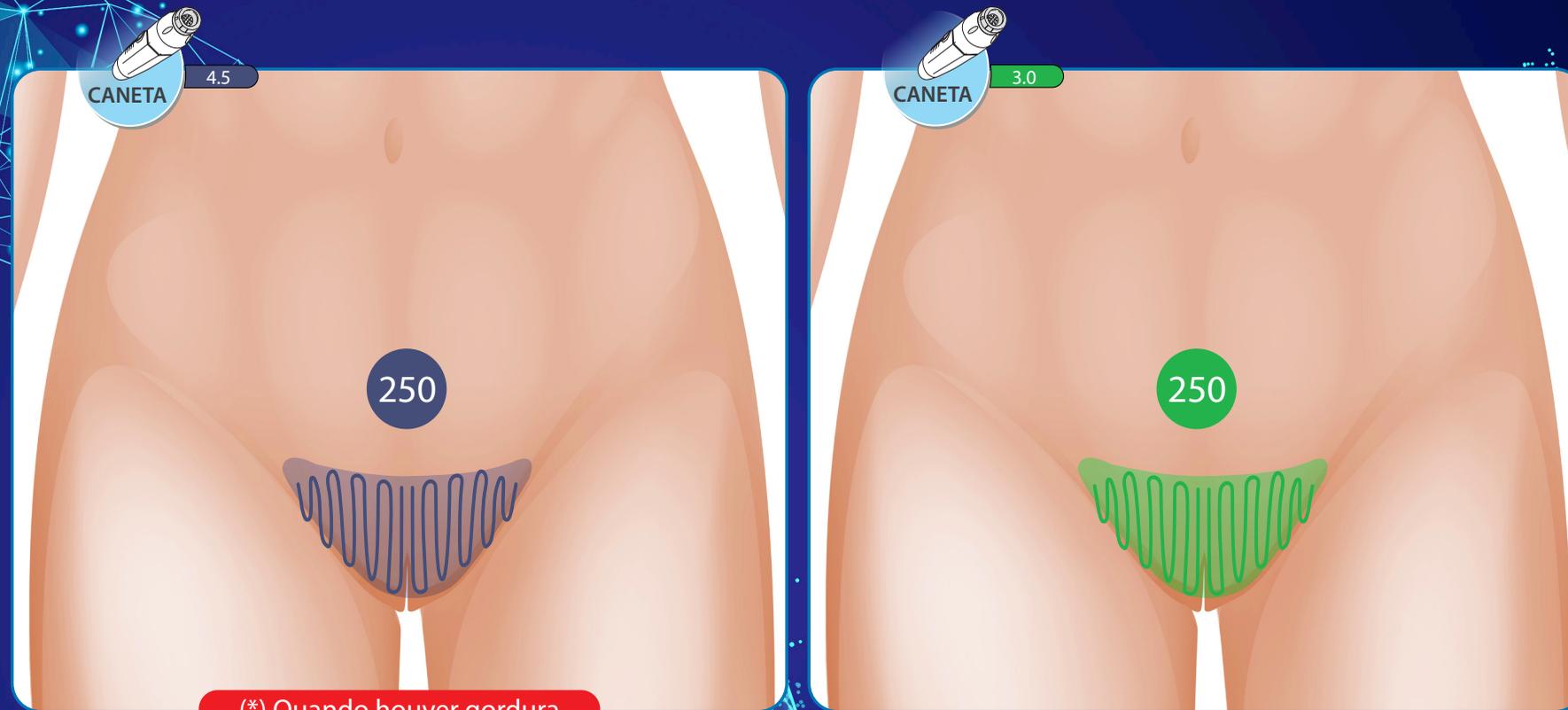

(*) Quando houver gordura

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5 (*) quando houver gordura	1,00 J	-	250
CANETA 3.0	0,70 J	-	250
TOTAL			500

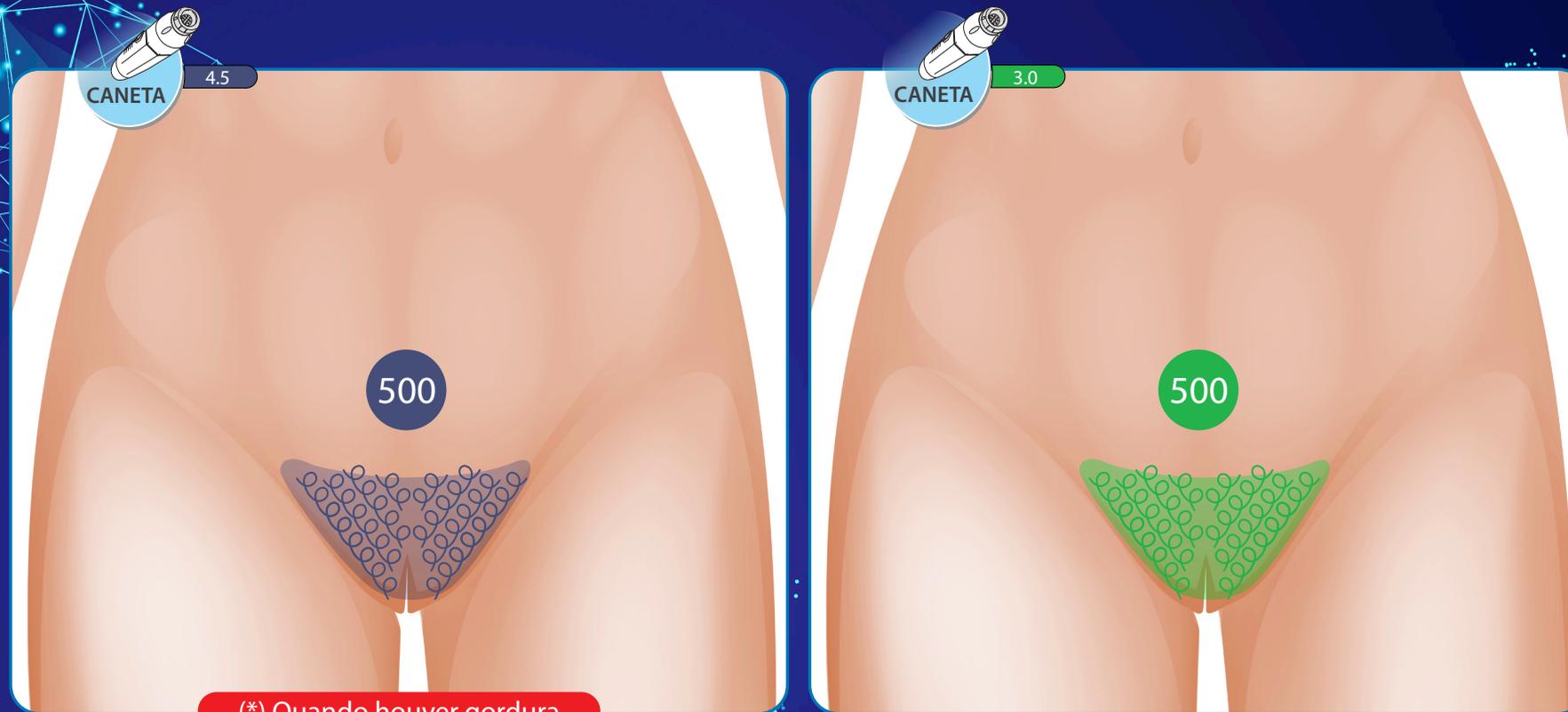

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5 (*) quando houver gordura	1,00 J	-	500
CANETA 3.0	0,70 J	-	500
TOTAL			1000

PROTOCOLO

Tri-eye Lift



Assinado por:

Dra Marina Hayashida

Conceito: Melhora da abertura do olhar e da flacidez periorbitária.



Benefícios: Melhora da abertura do olhar e da flacidez periorbitária.

Pontos de atenção: A aplicação deve ser SEMPRE feita apenas sobre anteparo dos rebordos ósseos, nunca sobre pálpebra móvel superior ou globo ocular. Não aplicar em cima dos nervos supraorbitarios, supratrocleares e temporais.

Dr.^a Marina Hayashida

PROTOCOLO ASSINADO |

| TRI-EYE LIFT

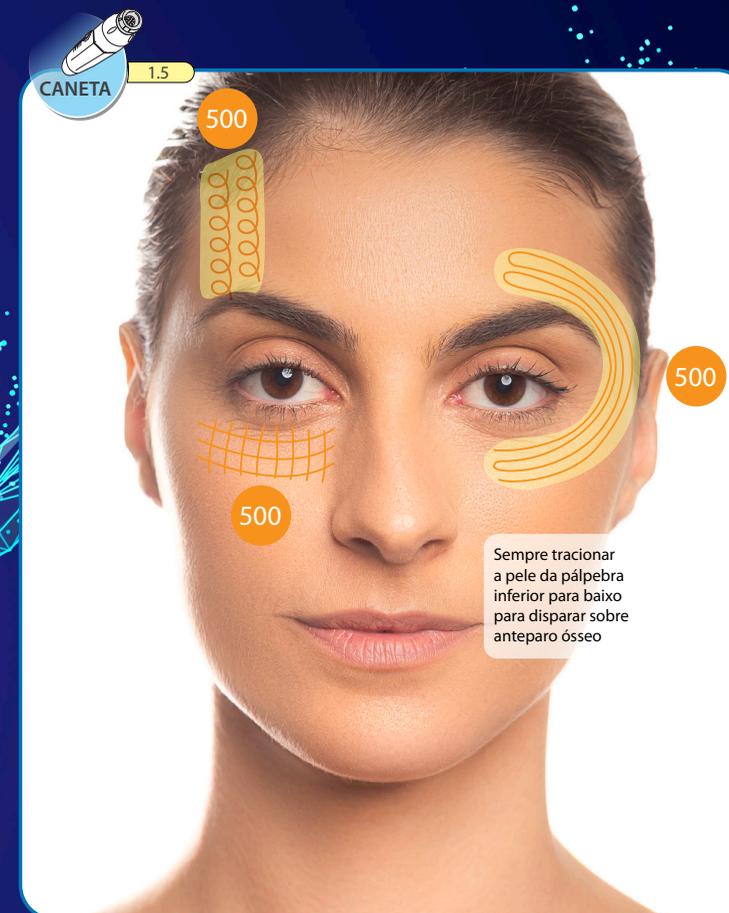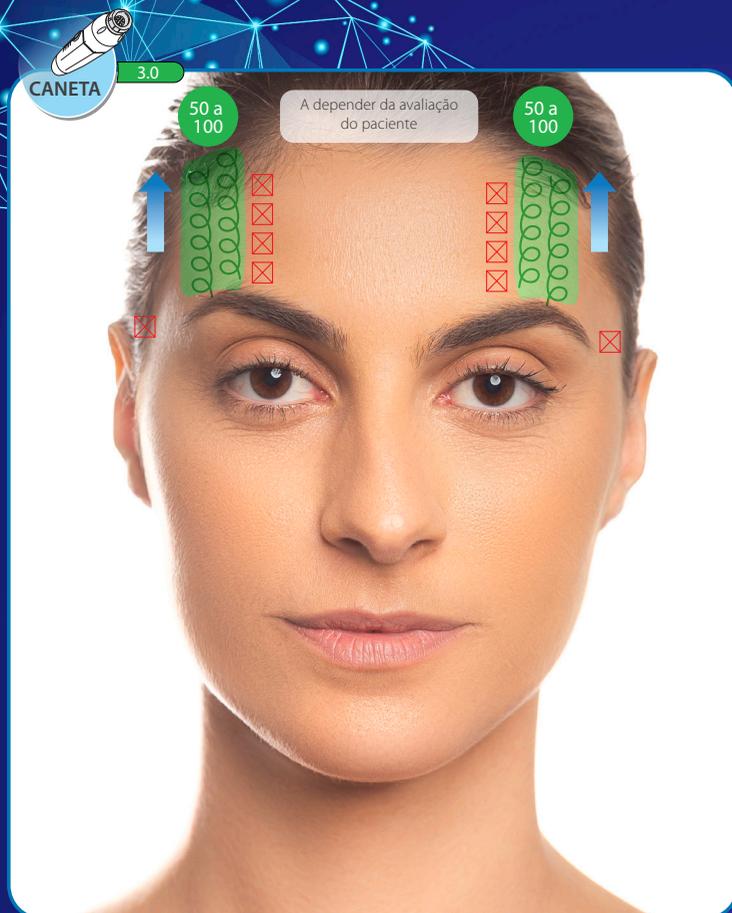

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 3.0 A depender da avaliação do paciente	0,50 J	100 a 200
CANETA 2.0	0,40 J	1500
CANETA 1.5	0,40 J	1500
TOTAL		6100 a 6200

PROTOCOLO

Lift 360



Liftera

Assinado por:

Dra Vivian Simões Pires

Conceito: Desenvolvido para atender as diverças queixas dos pacientes em uma área de difícil tratamento e resultados naturais efetivos.


Descrição: Essa aplicação foi pensada para quando o paciente tem queixas de gordura, flacidez e busca maior definição na região dos braços.

Avaliação da aplicação: A aplicação apresentada foi desenvolvida e aplicada à um paciente com a seguinte avaliação.

- Gordura e flacidez presentes na região do trícepes;
- Busca por definição do braço como um todo.

Benefícios: Efeito lifting imediato, estímulo de colágeno e sustentação da pele junto com a musculatura, redução do diâmetro dos braços e definição.

Pontos de atenção: Atenção as regiões próximas aos cotovelos e axilas.

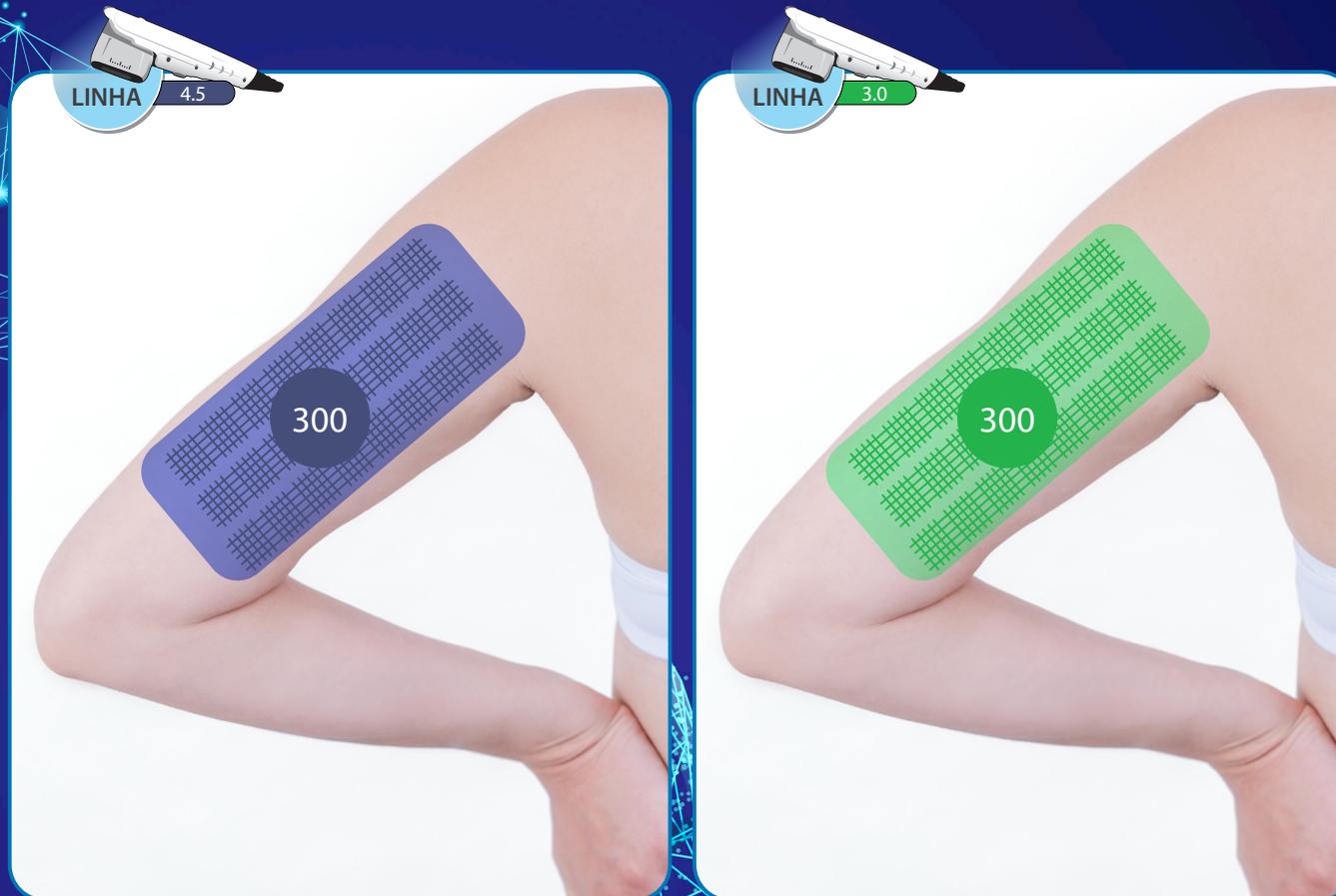

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	1,20 J	-	600
LINHA 3.0	0,70 J	-	600
TOTAL			1200



(*) Quando houver gordura utilizar Caneta Liftera 7.0

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 7.0 (*) Quando houver gordura utilizar Caneta Liftera 7.0	1,20 J	-	2000
CANETA 4.5	1,30 J	-	1000
TOTAL			4000

Dr. Vivian Simões Pires

PROTOCOLO ASSINADO |

| LIFT 360

Liftera



CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	1,30 J	-	2000
CANETA 3.0	0,70 J	-	2000
TOTAL			4000

Dr.

Vivian Simões Pires

PROTOCOLO ASSINADO |

| LIFT 360

Liftera



(*) Para braços finos e textura de pele utilizar a caneta de 2.0 mm

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 2.0 (*) Para braços finos e textura de pele utilizar a caneta de 2.0 mm	0,50 J	-	4000



CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 7.0	1,20 J	-	4000
CANETA 4.5	1,30 J	-	4000

CARTUCHO	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
CANETA 3.0	0,70 J	-	4000
CANETA 2.0	0,50 J	-	4000

Face Slimmer



Assinado por:

Dr. Renato Soriani

Conceito: Foi concebido observando a necessidade de tratarmos os diferentes formatos de rosto de forma individualizada.

O rosto redondo, ou mais "pesado", é uma queixa muito comum nos consultórios dermatológicos.




A **Caneta Liftera** permite uma maneira ímpar de tratarmos este tipo de rosto com ultrassom focado baseado em um conhecimento anatômico, principalmente dos compartimentos gordurosos.

O uso da caneta em pontos específicos e associação com "esvaziadores" ou emagrecedores químicos são a chave para o sucesso deste tratamento.

Descrição: Indicado para rostos redondos ou "pesados". Serão 3 sessões com intervalos mensais. É indicado tratar primeiro com o Liftera e depois associar os "esvaziadores" ou emagrecedores químicos.

Benefícios: Afinar a face de acordo com a necessidade de cada paciente.


Pontos de atenção: Observar as enervações superficiais. Avaliar se o paciente tem indicação e atenção ao aplicar as **Canetas Liftera** 4,5 mm e 3,0 mm na região do Jowl.

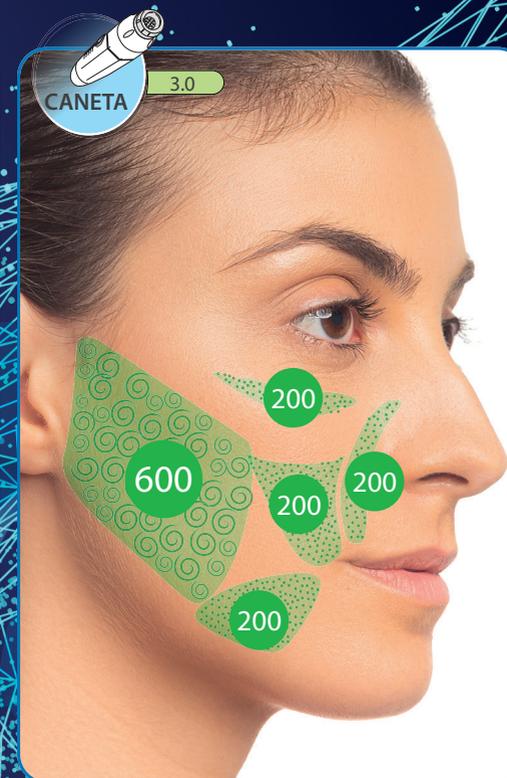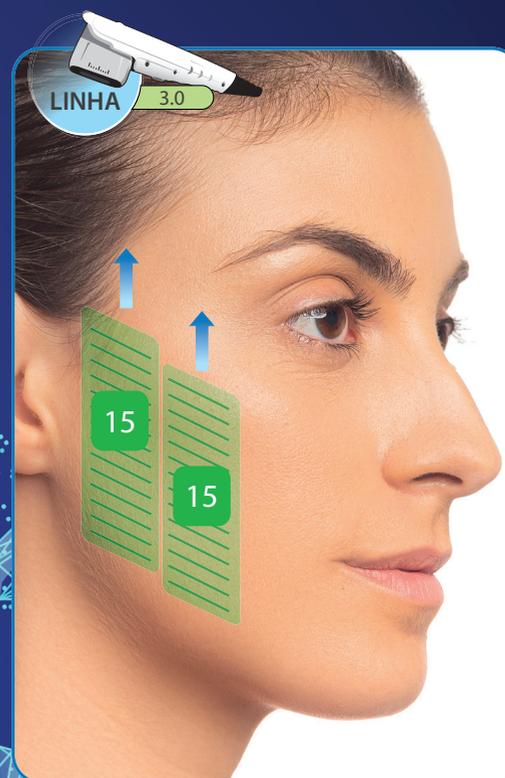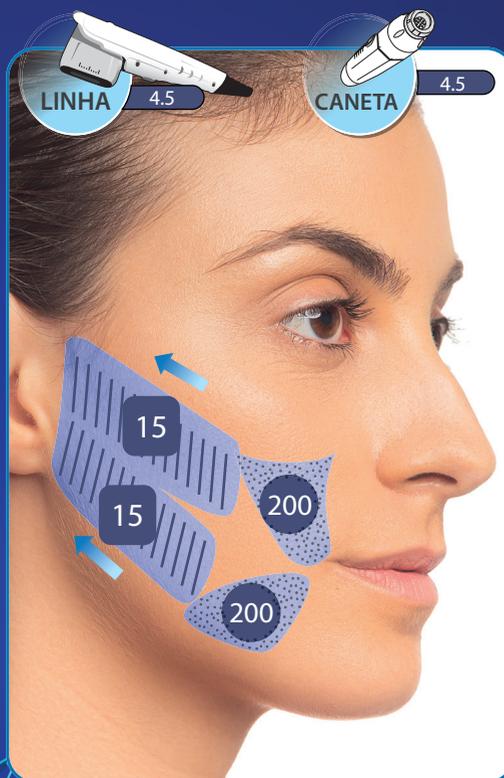

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	1,00 J	60	120	-
*CANETA 4,5 (Bichat)	0,50 J	200	-	400
*CANETA 4,5 (Jowl)	0,50 J	200	-	400
Se houver necessidade		TOTAL	120	800



CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 3.0	0,50 J	30	60	-
CANETA 3.0	0,50 J	600	-	1200
*CANETA 3.0 (Bichat)	0,50 J	200	-	400
*CANETA 3.0 (Jowl)	0,50 J	200	-	400
*CANETA 3.0 (Gordura Nasolabial)	0,50 J	200	-	400
*CANETA 3.0 (Malar)	0,50 J	200	-	400
Se houver necessidade		TOTAL	60	2800

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

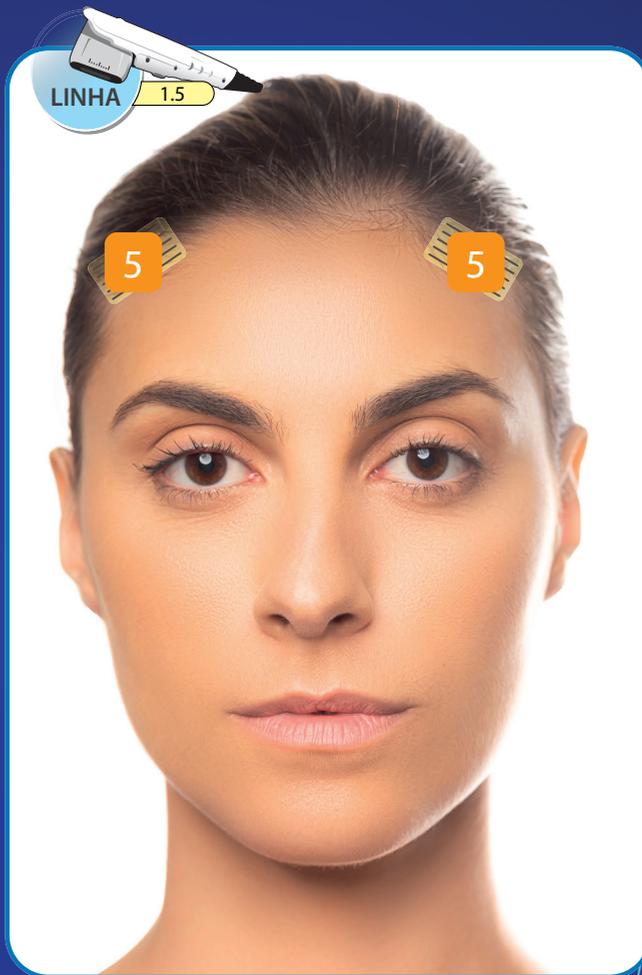

CARTUCHO	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 1.5	0,50 J	5	10	-
CANETA 1.5	0,50 J	600	-	1200
		TOTAL	10	1200

 Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

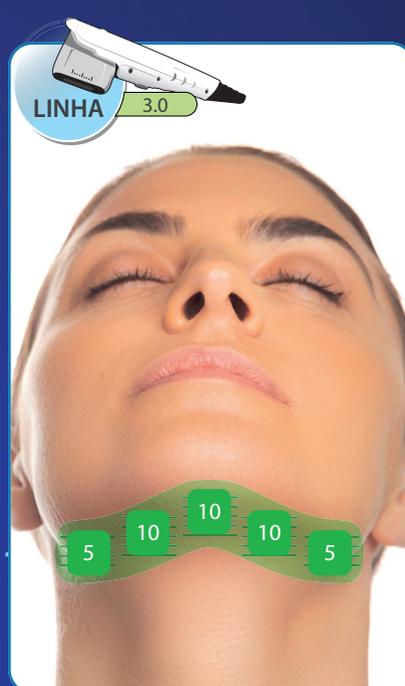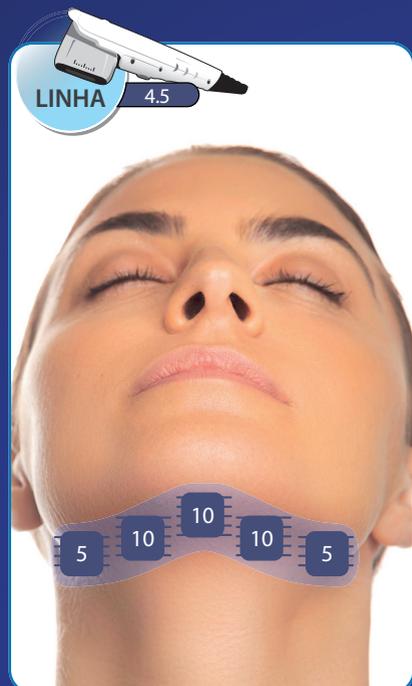

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	HEMIFACE	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	1,00 J	-	40	-
CANETA 4.5	1,20 J	-	-	800
LINHA 3.0	0,50 J	-	40	-
CANETA 3.0	0,50 J	-	-	800
CANETA 1.5	0,50 J	-	-	400
		TOTAL	80	2000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Eye Brow & Eyelid Techlift



Assinado por:

Dr. André Borba

Conceito: Obter rejuvenescimento periocular natural e sem cortes: Retração da pele palpebral, elevação do supercílio e melhora das rítes periorculares.

O protocolo foi desenvolvido para se obter uma retração e bioestimulo da região periocular, melhorando a flacidez da pálpebra superior em pacientes com discreta dermatocálase, elevando também o supercílio através de movimentos que permitam uma maior adesão da pele ao SMAS e promovendo a melhora da tensão de toda a região periocular.

Nota-se que os disparos no sentido contíguo e contrário de rítes periorculares favorecem a melhora da qualidade de pele da região e atenuação das rítes.

Benefícios: Melhora da qualidade de pele de toda região periorbital, retração leve da pele da pálpebra superior e elevação leve a moderada do supercílio. Alguns dos efeitos do protocolo podem ser observados imediatamente.

Pontos de atenção: A caneta sempre deverá ser direcionada no sentido contrário do globo ocular, para evitar disparos inadvertidos, além disso, disparos diretamente sobre a pálpebra superior e na região da placa tarsal são proibidos.

Eye brow & Eyelid Techlift





Assinado por:

Dr. André Borba

Pálpebra Superior: Com o supercílio tracionado para cima, no sentido da têmpora, o médico aplicador realizará 50 disparos em moving technique ao longo do rebordo orbital superior evitando a região da plataforma tarsal, com a caneta apontada para cima, para evitar disparos inadvertidos na região ocular. Em seguida, realiza-se 50 disparos de ancoragem curta, desde o limite inferior até próximo do supercílios. Após, realiza-se os disparos de ancoragem longa que devem atingir até próximo a região da implantação do cabelo. O limite medial de todos os disparos é 0,3 cm do forame supraorbital.

Pálpebra Inferior: A pele deve ser tracionada na região malar, no sentido inferior, com objetivo de facilitar a aplicação na pálpebra inferior, evitando a área ocular. Inicia-se então 50 disparos realizando movimento de semi-círculo na região orbital inferior, seguidos de movimentos paralelos, com intenção de formar um hashtag.


O movimento de hashtag deverá ser repetido na região lateral da órbita, onde concentram-se os "pés de galinha". A potência nesse caso varia conforme a profundidade das rítidias apresentadas em cada paciente. Por fim, o movimento de hashtag deve ser realizado na região lateroinferior da órbita, onde formam-se as "rugas do sorriso". Neste momento, após avaliar a pele do paciente, o médico executor poderá utilizar a ponteira 3.0.

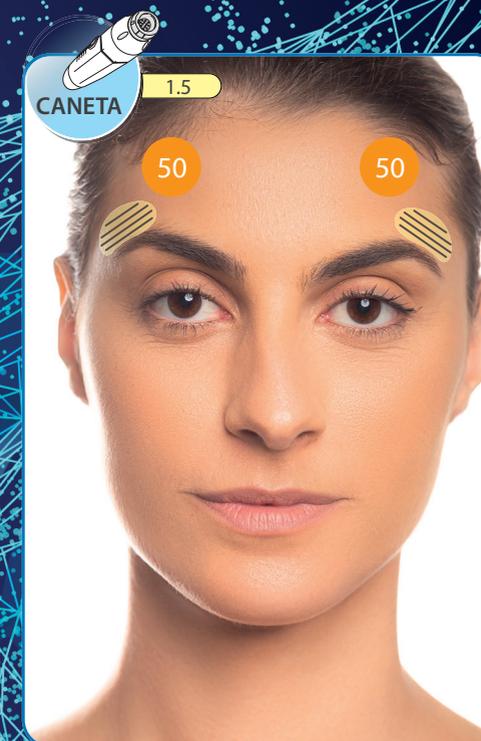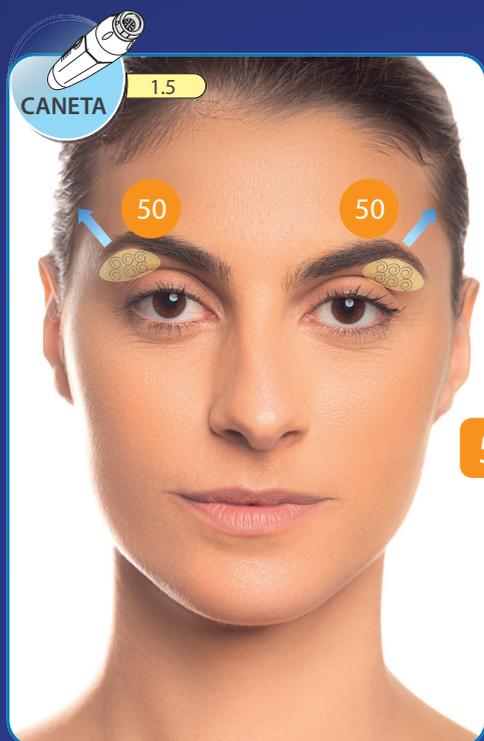

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,20 J	100
CANETA 1.5	0,20 J	100
CANETA 1.5	0,20 J	200
CANETA 1.5	0,30 J	100
	TOTAL	500

- Realizar traços no supercílio no sentido super lateral.
- Durante os disparos o médico que executa deveria realizar uma tração supero lateral na região da têmpora, e na região da cauda do supercílio.
- Os disparos devem atender a essa sequência de execução.
- Ao realizar o procedimento na pálpebra superior, o paciente deverá estar olhando para baixo.



! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

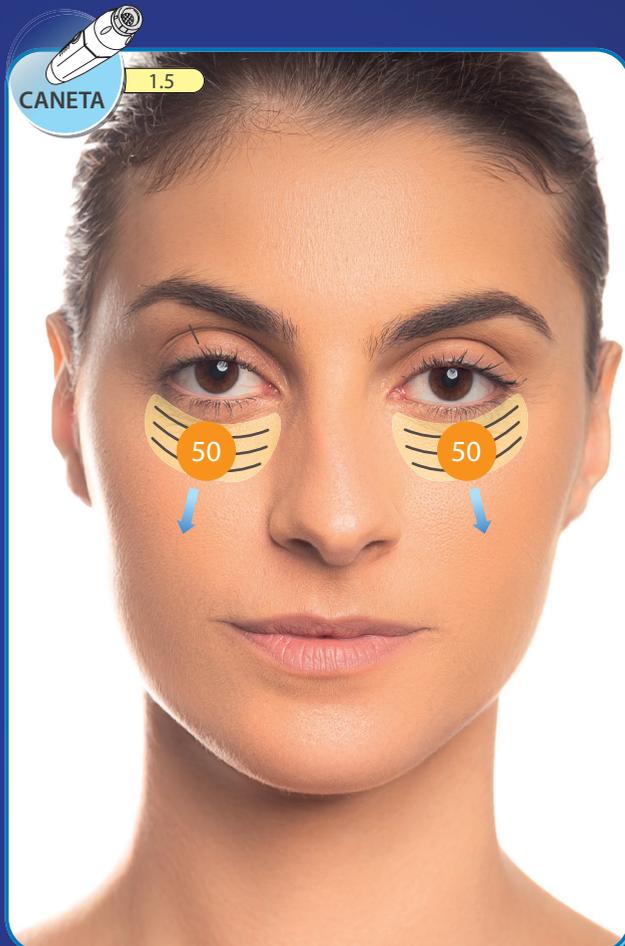

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,20 J	100
TOTAL		100

- Realizar tração da região malar no sentido da seta para aumentar a exposição da pálpebra inferior.
- Ao realizar o procedimento na pálpebra superior, o paciente deverá estar olhando para cima.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

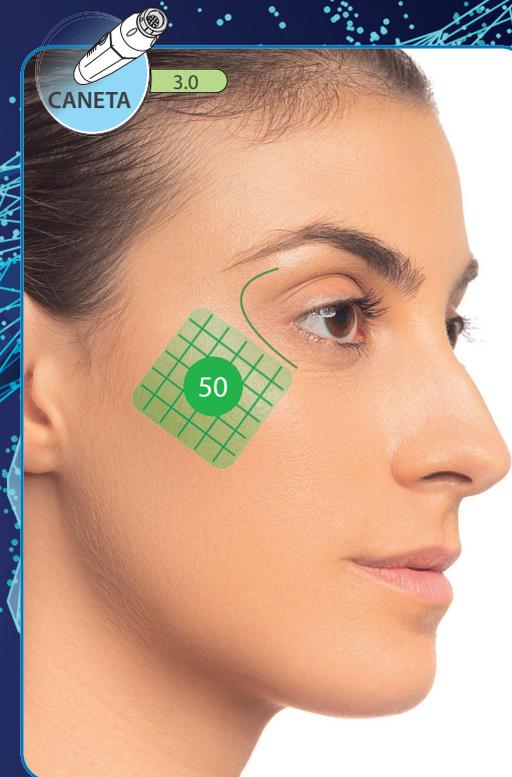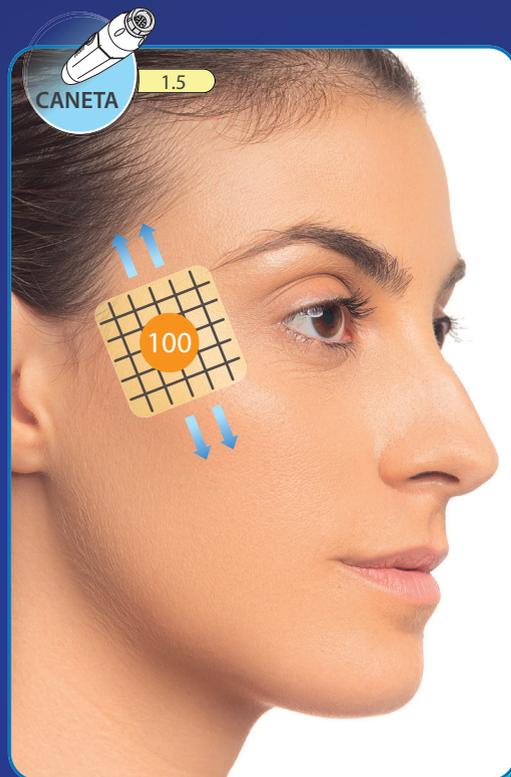

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 1.5	0,20 - 0,40 J	100
CANETA 1.5	0,20 - 0,30 J	50
CANETA 3.0	0,40 J	50
TOTAL		200

• Em paciente com ritida mais profunda deve-se usar potencias maiores (limite ate 0,4).

• O executor devera realizar uma tração superior e inferior na região lateral a órbita.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Power Max Definition



Assinado por:

Dr. Francisco Tribulato

Conceito: O constante aumento de pacientes em busca do corpo perfeito, e com abdômen definido principalmente, trouxe diversas técnicas e tecnologias para a retração de pele e/ou tratamento de gordura. Lipos mais agressivas e mais demoradas surgiram para atender essa demanda, muitas vezes duplicando o tempo cirúrgico com o uso dessas tecnologias. Isso acarretou em um aumento considerável de complicações intra e pós-operatórias, além do aumento de fibroses, irregularidades e aranhas vasculares.

Descrição: Visando maior definição abdominal pós-cirúrgica, otimizando o tempo cirúrgico, além de promover uma retração de pele mais previsível, natural, e sem o risco de fibroses ou irregularidades. Aplicável também em pacientes com baixo índice de gordura abdominal, atletas e pessoas que desejam uma maior definição muscular.

Avaliação: Pacientes pós-lipo, ou pacientes com baixo índice de gordura abdominal, atletas, praticantes de atividades físicas regularmente, e pacientes que desejam uma maior definição muscular.

Power Max Definition



Assinado por:

Dr. Francisco Tribulato

Benefícios: Retração de pele e queima de gordura em pontos e áreas específicas, respeitando as diferenças anatômicas de cada paciente. Procedimento rápido, realizado no consultório, sem necessidade de anestesia ou qualquer estrutura adicional. Baixo custo ao médico, e bom custo-benefício ao paciente (muito melhor por exemplo do que com procedimentos invasivos/intra-operatórios). Fácil execução. Resultados muito satisfatórios e que fidelizam o paciente. Sem "down time". Sem a necessidade de cuidados específicos pós-procedimento.

Pontos de atenção: A marcação deve ser com o paciente em pé, com a musculatura abdominal tensionada, além de uma atenção com o paciente deitado, em movimento de abdominal. Em mulheres enfatizar sulcos verticais. Em homens enfatizar sulcos horizontais.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 7.0	1,5 J	600
CANETA 4.5	1,5 J	600
CANETA 3.0	0,7 J	600
	TOTAL	1800

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	1,2 J	600
LINHA 3.0	0,7 J	600
TOTAL		1200

 Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.





TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 7.0	1,5 J	600
CANETA 4.5	1,5 J	600
CANETA 3.0	0,7 J	600
	TOTAL	1800

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS
LINHA 4.5	1,20 J	600
LINHA 3.0	0,70 J	600
TOTAL		1200

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

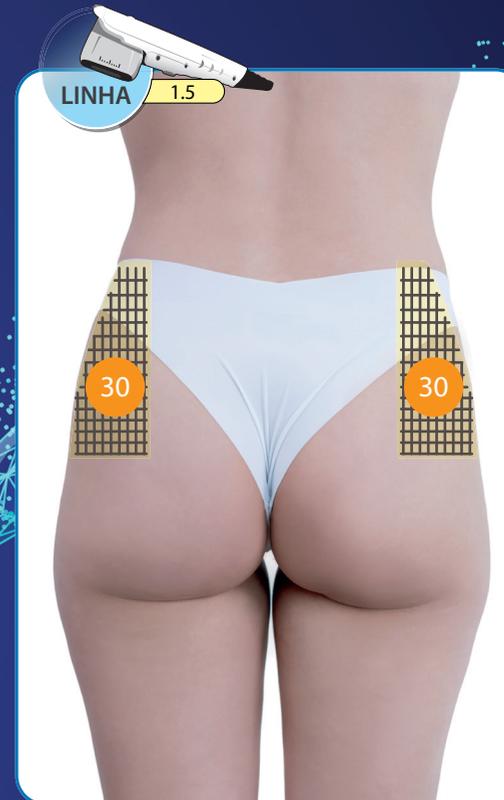
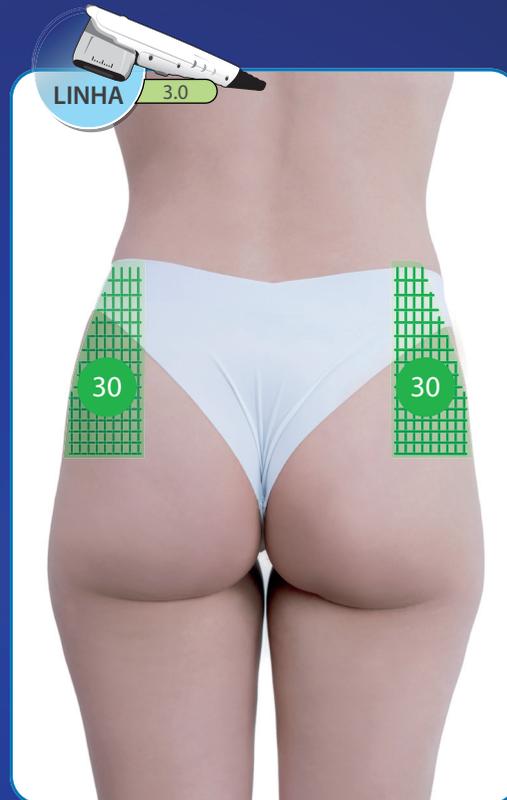


TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS
LINHA 3.0	0,70 J	30
LINHA 1.5	0,50 J	30
TOTAL		60

Foco: Projeção e Lifting

Objetivo: Vetorizar o glúteo, visando o reposicionamento, indo contra o efeito gravitacional.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

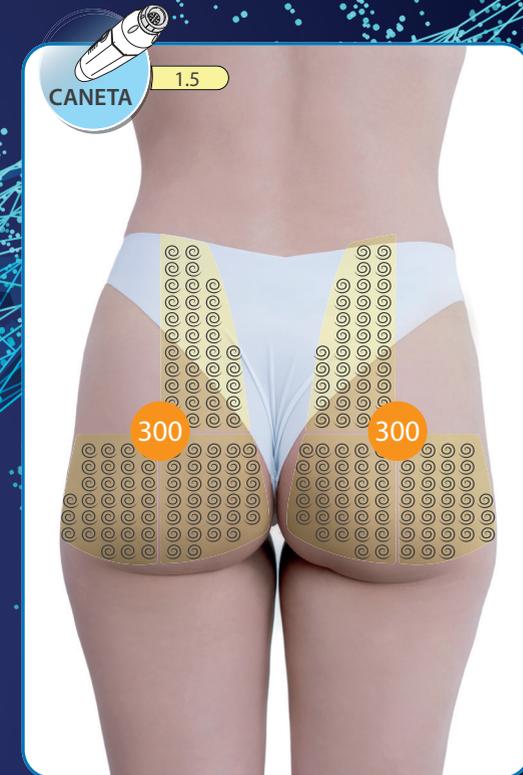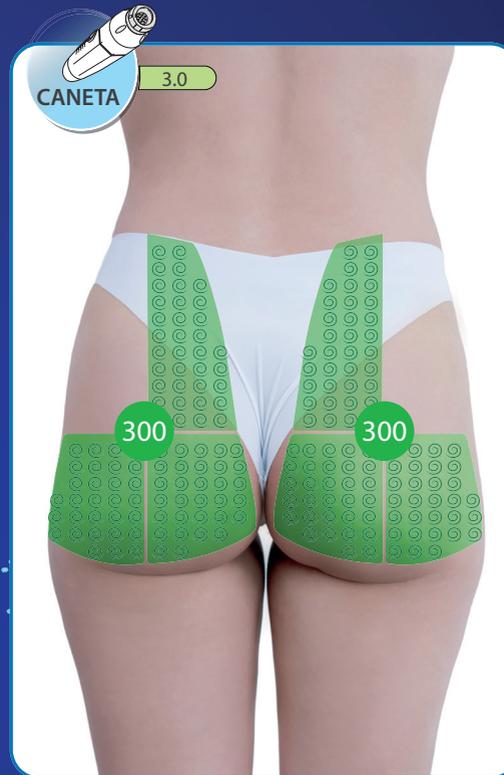

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	1,5 J	800
CANETA 3.0	0,70 J	600
CANETA 1.5	0,50 J	600
	TOTAL	2000

Foco: Textura de pele.

Objetivo: Soltar as fibroses/celulites, e estimular colágeno, visando maior uniformização da pele e diminuição das depressões/sombras provocadas pelas fibroses/celulites.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	1,5 J	600
CANETA 3.0	0,70 J	400
CANETA 1.5	0,50 J	400
TOTAL		1400

Foco: Fortalecer e retrain a pele.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

T-high Definition



Assinado por:

Dr. Luiz Tonon

Descrição: Definição abdominal associado a campo eletromagnético + associação de bioestimulador.

Benefícios: Baixo IMC para definição abdominal tratamento residual de flacidez e gordura.

Pontos de atenção: Aplicação em modo rápido e dinâmico para distribuição homogênea sem lesão tecidual.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS
CANETA 4.5	-	1200
CANETA 7.0	-	1200
	TOTAL	2400

 Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS
CANETA 4.5	-	1200
CANETA 7.0	-	1200
TOTAL		2400

 Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Tight Skin



Assinado por:

***Dra. Karolina
Lavagnoli Colombo***

Conceito: O TightSkin tem o objetivo de tratar a flacidez abdominal em pacientes com baixo percentual de gordura. Os tratamentos corporais são sempre desafiadores porque seus resultados também dependem da genética, do organismo e da disciplina de cada pessoa. Ao receber pacientes com excelente perfil, mas frustrados e insatisfeitos com os resultados de outros procedimentos, desenhei esse protocolo com o Liftera devido à versatilidade e possibilidades da tecnologia. Com o TightSkin, pude proporcionar a firmeza desejada pelos pacientes.

Tight Skin



Assinado por:

**Dra. Karolina
Lavagnoli Colombo**

Descrição: Protocolo indicado para pacientes com pouca gordura abdominal e flacidez importante. São utilizadas ponteiros lineares e caneta. Na região acima do umbigo são feitos vetores para cima. Já na região abaixo do umbigo, são feitos vetores para baixo. Com isso, é possível obter a abertura da região umbilical e melhora de todo o abdome.

Os vários tamanhos de ponteiros, as opções de mexer na potência e no número de disparos, de acordo com cada paciente, levaram a um resultado muito satisfatório, pois é possível trabalhar desde um abdome com zero gordura + flacidez até aquele abdômen com pouca gordura + flacidez. Outros bioestimuladores injetáveis até conseguem entregar certa melhora, mas não valiam o alto investimento.



Avaliação: Paciente magra, sem gordura, com flacidez abdominal importante quando a mesma estava sentada ou inclinada, Já havia realizado procedimentos prévios, mas há muito tempo, não ficando satisfeita.

Benefícios:

- Segurança e conforto na aplicação.
- Praticamente indolor.
- Rápida resposta ao tratamento (com 24h após o procedimento, já há melhora importante).


D^{ra.} Karolina Lavagnoli Colombo

| TightSkin

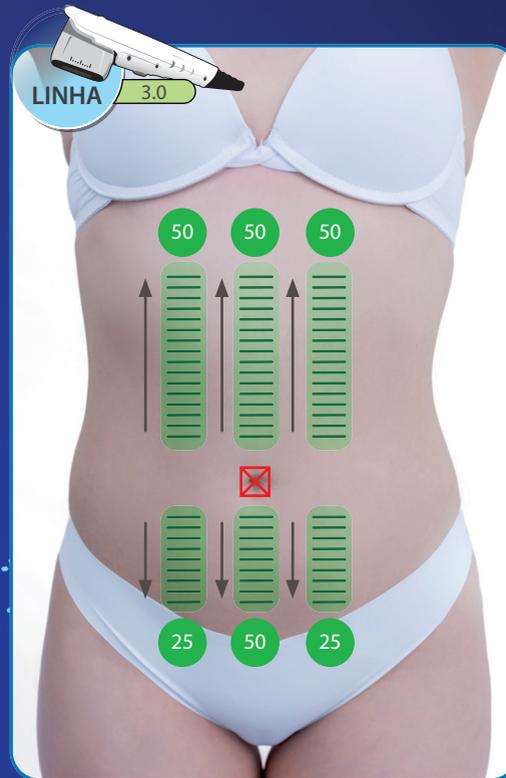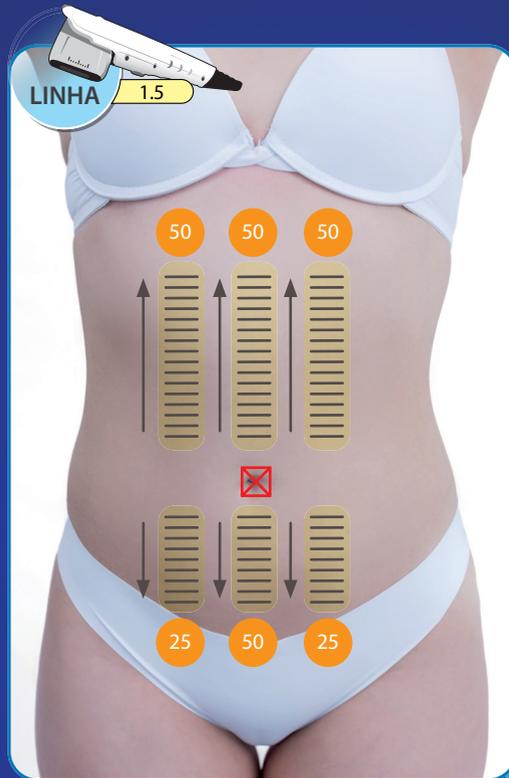

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHA
LINHA 1.5	0,5 J	250
LINHA 3.0	0,7 J	250
LINHA 4.5	0,9 J	250
	TOTAL	750

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



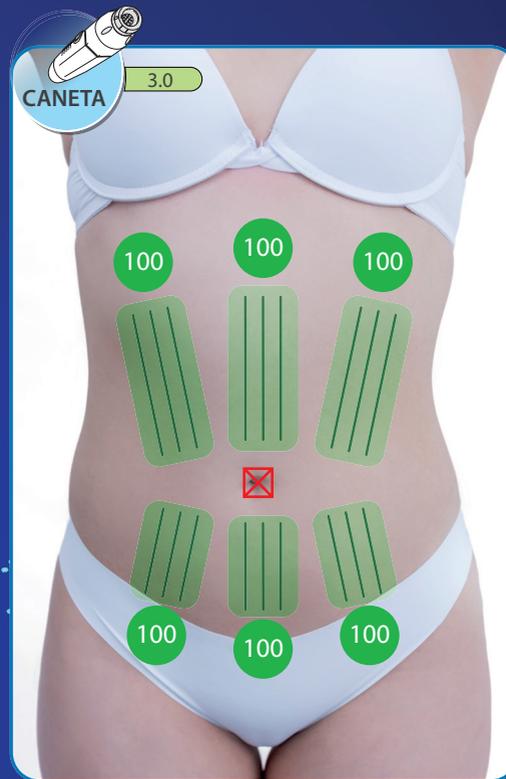


TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHA
CANETA 1.5	0,5 J	600
CANETA 3.0	0,7 J	600
CANETA 4.5	0,9 J	600
	TOTAL	1800

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

D^{ra.} Karolina Lavagnoli Colombo

| TightSkin

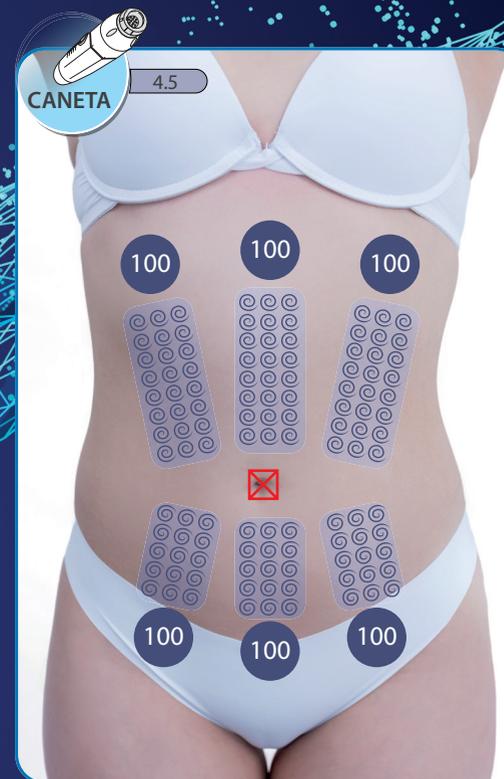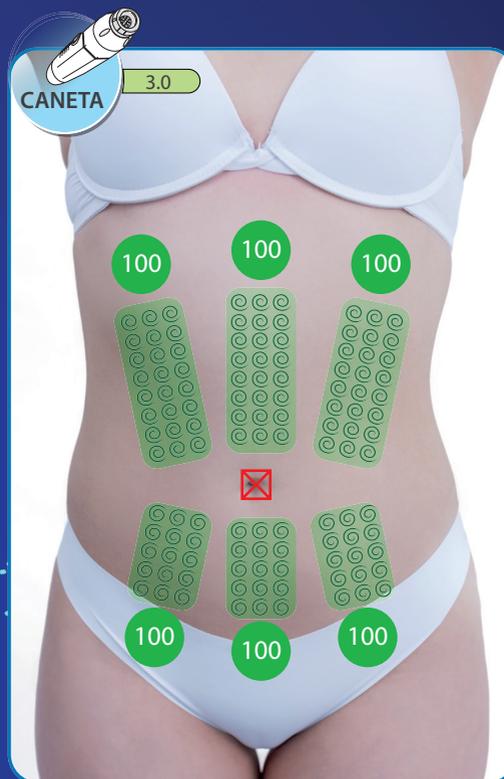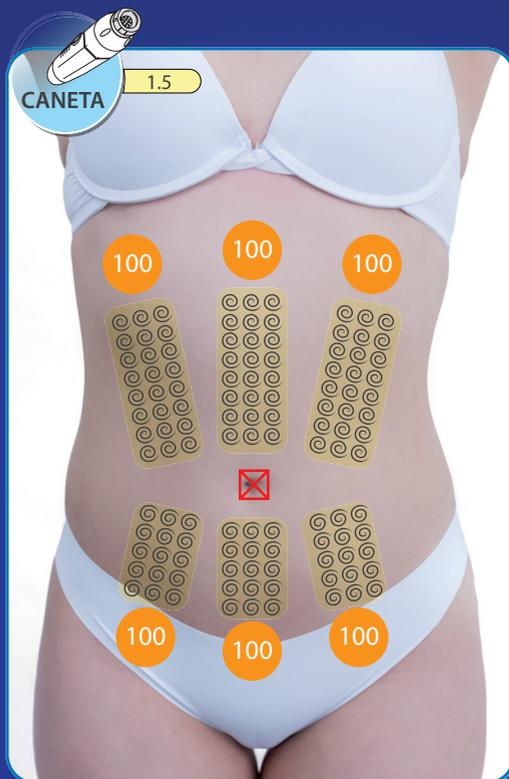

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHA
CANETA 1.5	0,5 J	600
CANETA 3.0	0,7 J	600
CANETA 4.5	0,9 J	600
	TOTAL	1800

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Retract Lobe



Assinado por:


Dr. Amilton Macedo

Conceito: Esta técnica surgiu do número de queixas apresentado por pacientes, principalmente mulheres sobre a flacidez do lóbulo da orelha. O que deixa de maneira inestética a colocação de brincos. Estas pacientes relatam a sensação de pêndulo. Com o passar dos anos perdemos colágeno em todas as regiões do corpo, inclusive no lóbulo da orelha o que a torna mais flácida sendo potencializado pelo uso frequente de adornos como brincos e piercings.

Descrição: Utilizamos a Caneta Liftera na profundidade de 1,5mm em movimento de vetores. É importante apoiar o lóbulo da orelha durante a aplicação com o dedo indicador o que torna o procedimento mais confortável tanto para médico quanto para o paciente. Pode ser realizado até 3 sessões com intervalo de 30 dias e/ou 1 sessão a cada 6 meses.

Benefícios: O objetivo desta técnica é o estímulo de colágeno, retração tecidual, espessamento da derme e redução de linhas finas, que já são notados logo após a primeira sessão.

Avaliação: Atentar para não aplicar disparos na região de cartilagem da orelha, no tragus, no nervo auricular e ramos nervosos, pois o procedimento deve ser realizado apenas no lóbulo da orelha.

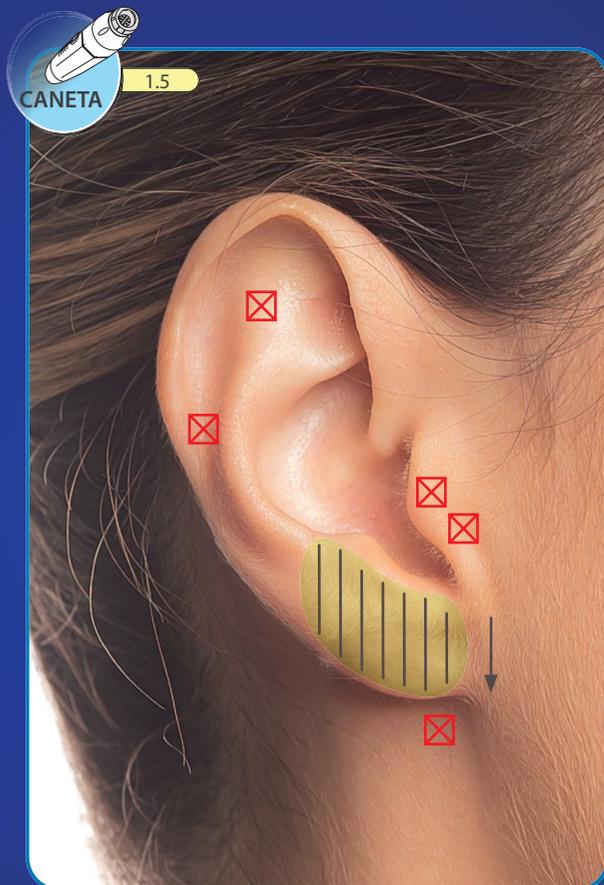

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	PONTOS POR LÓBULO	TOTAL PONTOS
CANETA 1.5	0,3 J - 0,4 J	200	400

OBS: 150 disparos com caneta na região anterior do lóbulo e 50 disparos na região posterior do lóbulo. Totalizando 200 disparos em cada lóbulo (direito e esquerdo).

 Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

LS Lift Face



Assinado por:

Dra. Livia Sabia

Conceito: Sustentação facial através do lifting temporal, estimulando tecidos musculares, gordura e pele a partir da estrutura anatômica de cada paciente. Com as diferentes profundidades e energias de aplicação do Liftera, podemos cruzar os pontos de coagulação linear e circular para melhores resultados.

Descrição: A aplicação direcionada em linha vertical da região mandibular lateral inferior até arco zigomático com profundidades de 4.5mm e 3.0mm ou 3.0mm e 1.5mm de acordo com a estrutura do rosto do paciente; cruzando com aplicação linear partindo da porção posterior ao sulconasogeniano em direção a junção temporoparietal. Após provocar pontos de coagulação linear desenhando "hashtags" preencho possíveis espaços entre os pontos de coagulação com a Caneta Liftera "Point Lift" em movimentos circulares e cruzados na vertical e horizontal, para aumentar o poder de contração e assim obter melhores resultados. Na região temporal, aplicações lineares com aplicador 1.5mm e circulares com a "Point Lift" de 1.5mm em passadas cruzadas direcionadas entre região temporoparietal até o início do couro cabeludo onde serão realizadas aplicações em ponto de sustentação.



LS Lift Face





Assinado por:

Dra. Livia Sabia

Benefícios: Promover a sustentação facial através do lifting facial, abertura do olhar, suavização do Jowl e definição da linha da região malar por meio da estimulação de colágeno na camada SMAS, derme e epiderme. A abertura do olhar e a definição da linha na região malar são efeitos percebidos inicialmente pela tração imediata do estímulo do liftera.



Avaliação:

- Evitar aplicadores com profundidade maior que 3.0mm na região temporal para preservar o ramo temporal do nervo facial;
- Em pacientes com rosto mais magro diminuir ou evitar disparos com transdutor 4.5mm;
- Evitar aplicações com os aplicadores acima de 1.5mm na região pre-auricular.

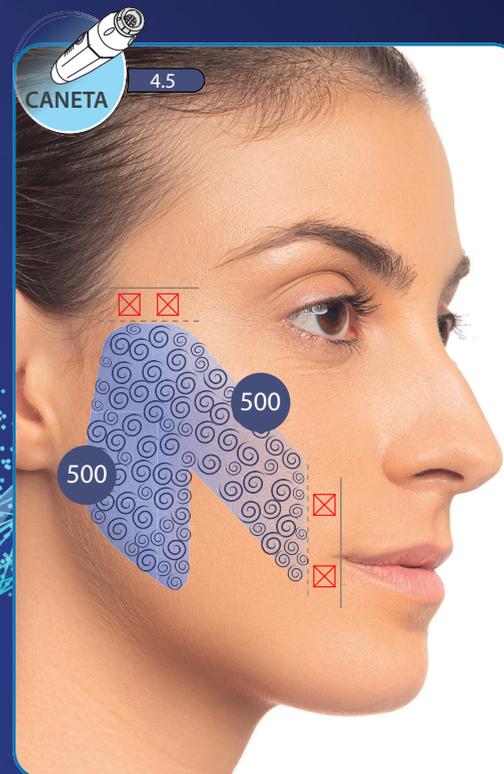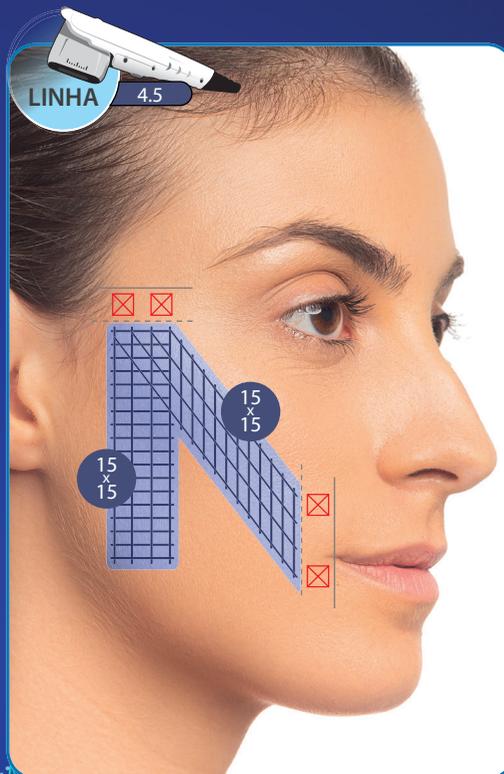

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	MEIA FACE	TOTAL LINHA	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	0,7 J - 1,0 J	60	120	-
CANETA 4.5	0,7 J - 1,0 J	1000	-	2000
	TOTAL	1060	120	2000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

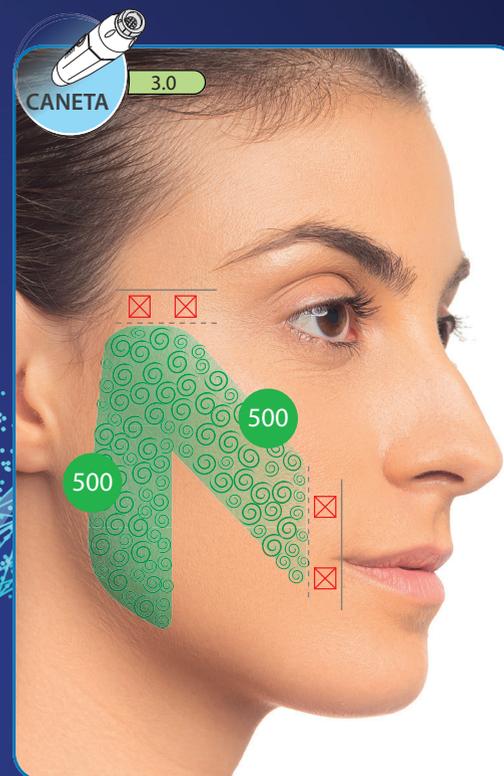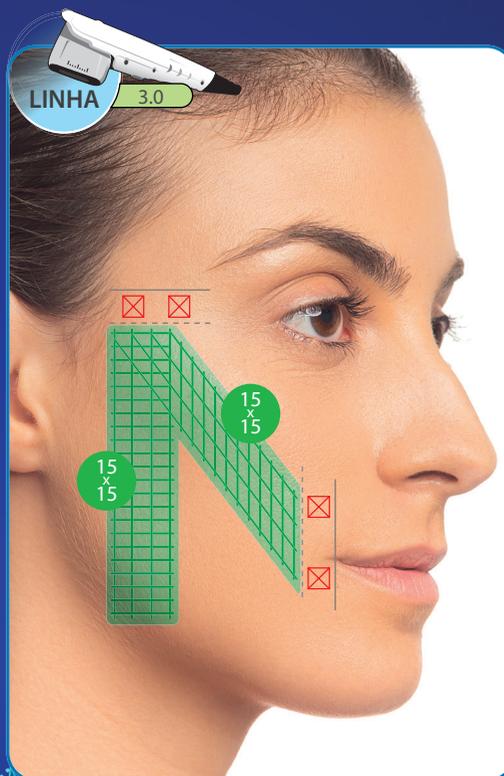

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	MEIA FACE	TOTAL LINHA	TOTAL CANETA
LINHA 3.0	0,7 J	60	120	-
CANETA 3.0	0,7 J	1000	-	2000
	TOTAL	1060	120	2000

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	MEIA FACE	TOTAL LINHA	TOTAL CANETA
LINHA 1.5	0,5 J	30	60	-
CANETA 1.5	0,5 J	250	-	500
	TOTAL	280	60	500

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Yp Glúteos



Assinado por:

Dr. Tiago Silveira

Conceito: Tratamento global dos glúteos com uma única ferramenta, baseado no nosso conhecimento anatômico e na versatilidade de Liftera.

Descrição: Um protocolo para glúteos baseado na avaliação precisa da principal prioridade, queixa ou demanda da região glútea de cada paciente, podendo mesclar, fazer mais de uma ou todas na mesma visita, buscando melhora e embelezamento global da região das nádegas.

Benefícios: Baseado na avaliação em 4 passos, conseguimos obter:

1. Redução da ptose e efeito lifting dos glúteos;
2. Melhora da qualidade e da superfície da pele (celulites grau 1 e 2, "drapeamento da pele", estrias e irregularidades);
3. Embelezamento da "moldura" dos glúteos, com redução da gordura localizada na parte superior e inferior das nádegas, e eventualmente, nas partes centrais;
4. Definição lateral das nádegas, com redução da gordura localizada nos culotes.

Avaliação: Avaliação anatômica precisa das camadas de pele de cada região, para escolha correta das ponteiros com base na indicação da profundidade do alvo da energia, com ação dérmica na busca de qualidade de pele e efeito lifting, e ação hipodérmica com intuito de redução de gordura.



PRIORIDADE 1 – PTOSE

(*) ATENÇÃO!

Avaliar o paciente antes da aplicação de acordo com as prioridades.

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS
LINHA 3.0	-	400
LINHA 4.5	-	400
TOTAL		800

Foco: Ptose e Flacidez.

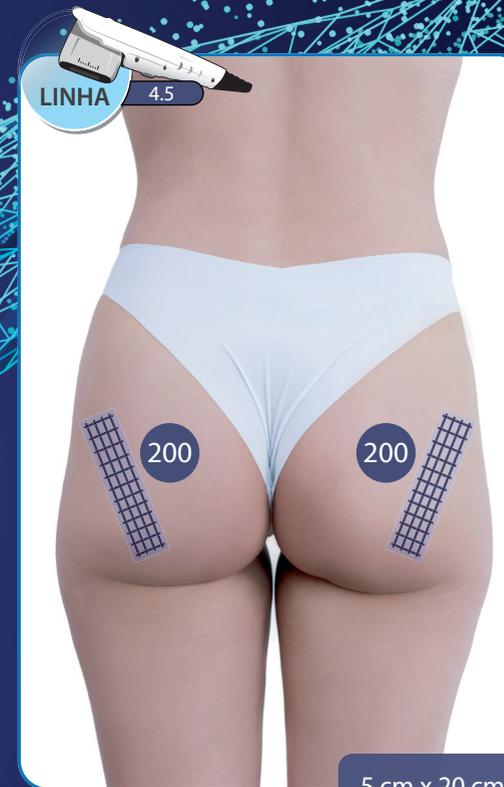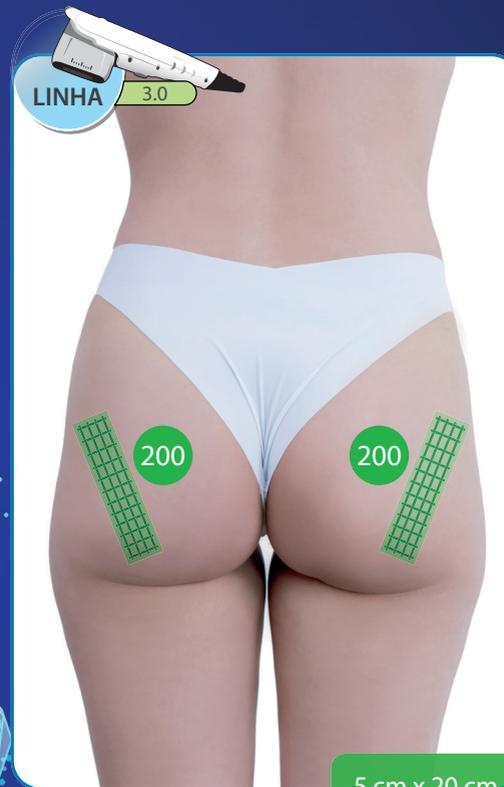

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos. atos.

PRIORIDADE 2 – CELULITES GRAUS 1 E 2



(*) ATENÇÃO!

Avaliar o paciente antes da aplicação de acordo com as prioridades.

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHAS	TOTAL CANETA
LINHA 3.0	-	400	-
CANETA 2.0	-	-	3400
TOTAL		800	3400

Foco: Irregularidades, Qualidade de pele, Estrias, Drapeamento e Celulites graus 1 e 2.


Objetivo: Combater textura, irregularidades, flacidez e celulite grau I e II.

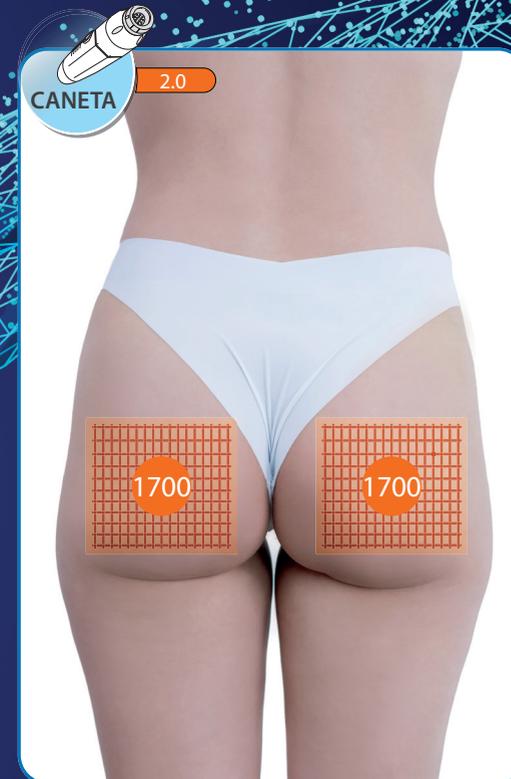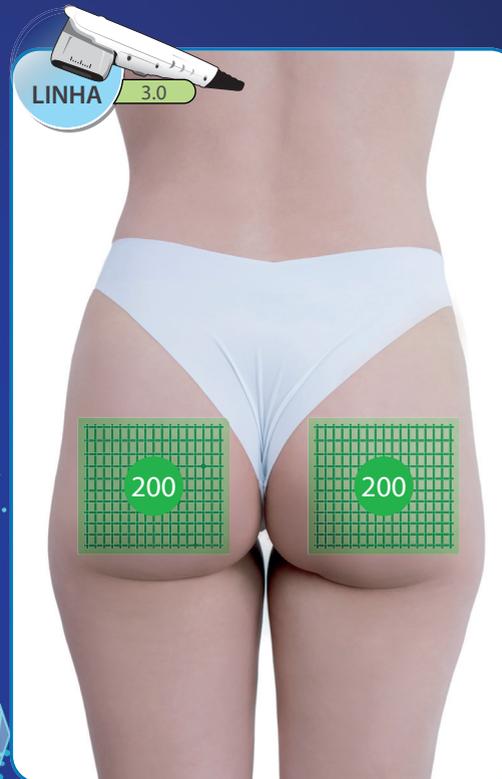

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

PRIORIDADE 3 – GORDURA LOCALIZADA NA “MOLDURA DOS GLÚTEOS”

(*) ATENÇÃO!
Avaliar o paciente antes da aplicação de acordo com as prioridades.

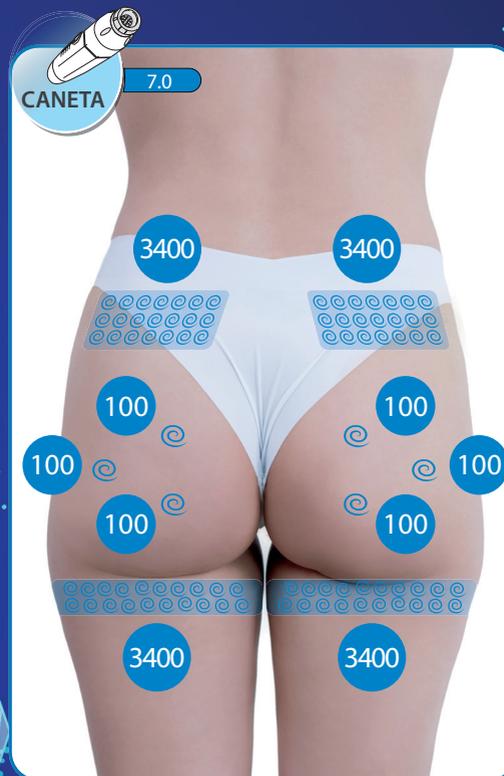

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 7.0	-	14.200
TOTAL		14.200

Foco: Gordura localizada na “moldura dos glúteos” – região lombo-sacra e “bananinha”.

Utilizar a caneta 7.0 cerca de 100x em cada “herniação de gordura”.

⚠ Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

PRIORIDADE 4 – GORDURA LOCALIZADA NO CULOTE

(*) ATENÇÃO!
Avaliar o paciente antes da aplicação de acordo com as prioridades.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 7.0	-	6.800
TOTAL		14.200

Foco: Gordura localizada no culote.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Keypoints



Assinado por:




Dr. Carlos Bautzer

Conceito: Utilizando o conhecimento anatômico, o KEYPOINTS corporal se trata de utilizar a melhor tecnologia para a estruturação dos glúteos.

Descrição: O Autor desenvolveu a aplicação se baseando na entrega de energia digital microfocada , onde de acordo com uma avaliação prévia , podemos calcular a profundidade das estruturas a serem tratadas.

Benefícios: Na técnica desenvolvida não há perda de energia em disparos, pelo contrário, utilizamos a quantidade necessária para cada caso clínico

Avaliação: A anamnese inclui a realização do PINCH TEST que pode ser feita com a mão ou um adipometro, dessa forma conseguimos avaliar a profundidade da fáscia muscularis superficial e profunda , bem como a espessura da camada de gordura . O tratamento é individualizado bem como seus resultados.

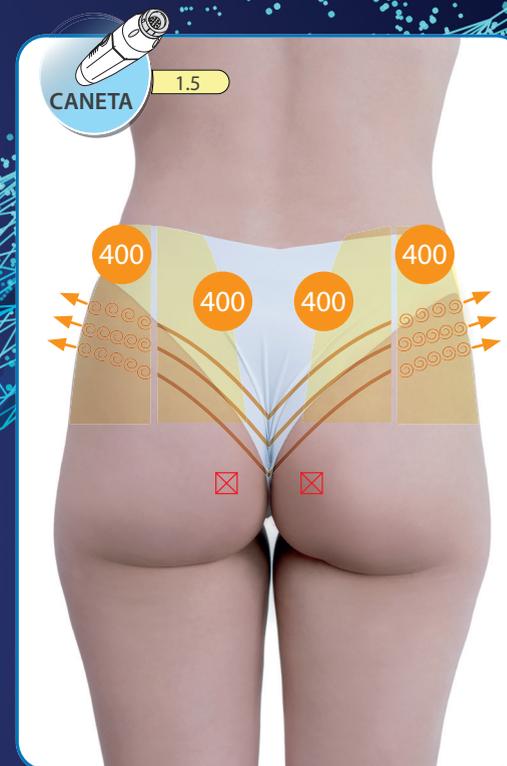
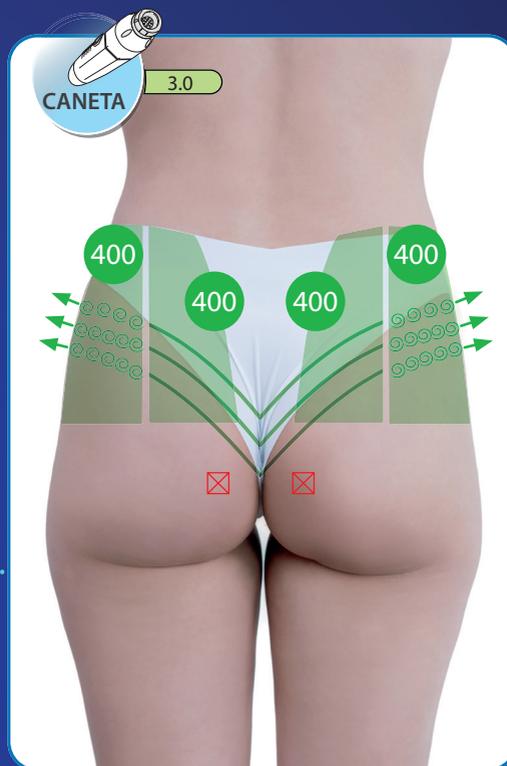
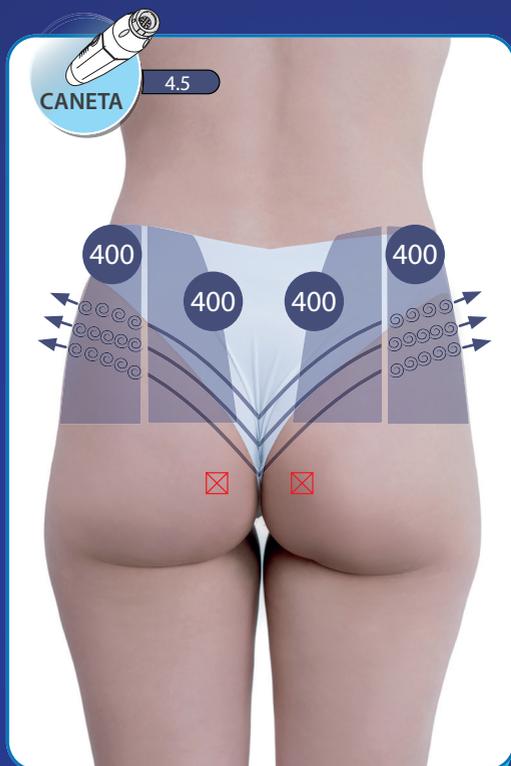


TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	4,0 - 7,0 J	1600
CANETA 3.0	4,0 - 7,0 J	1600
CANETA 1.5	4,0 - 7,0 J	1600
	TOTAL	4800

OBS: Ao utilizar a caneta é necessário fazer diversos movimentos para não super aquecer uma mesma área e não consumir gordura.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

GLÚTEO MAGRO

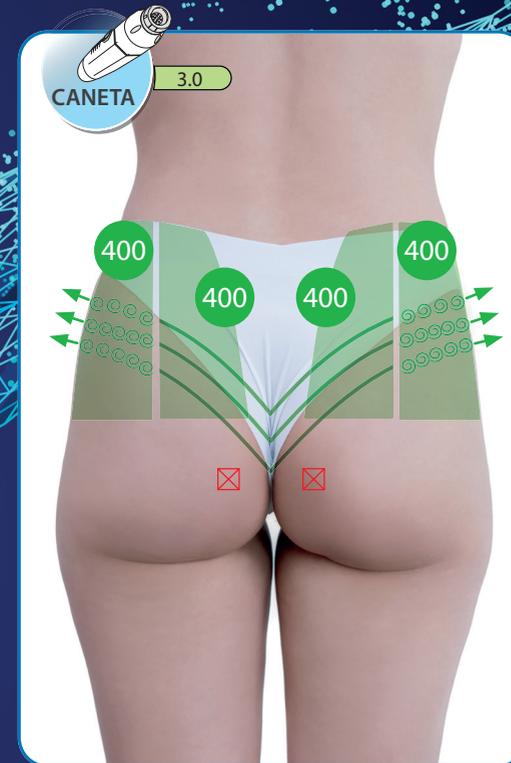
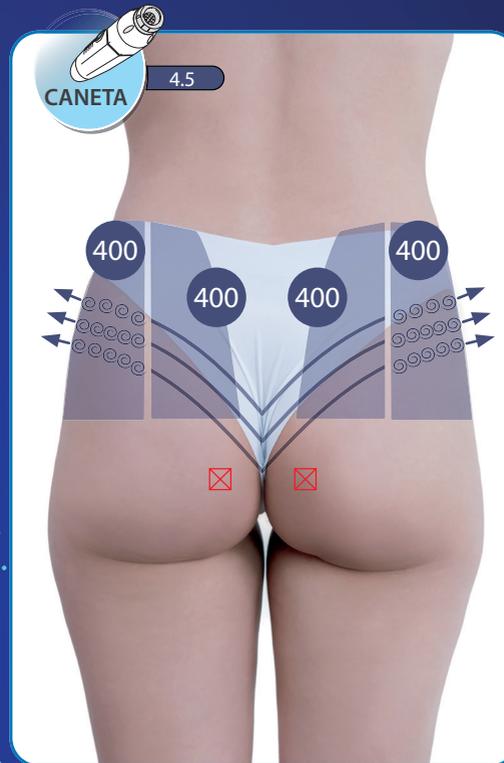
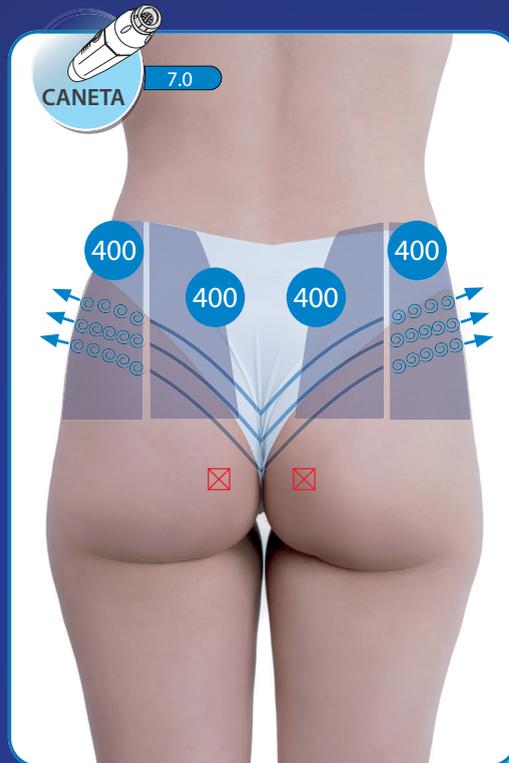


TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 7.0	4,0 - 7,0 J	1600
CANETA 4.5	4,0 - 7,0 J	1600
CANETA 3.0	4,0 - 7,0 J	1600
	TOTAL	4800

OBS: Ao utilizar a caneta é necessário fazer diversos movimentos para não super aquecer uma mesma área e não consumir gordura.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

GLÚTEO GORDO

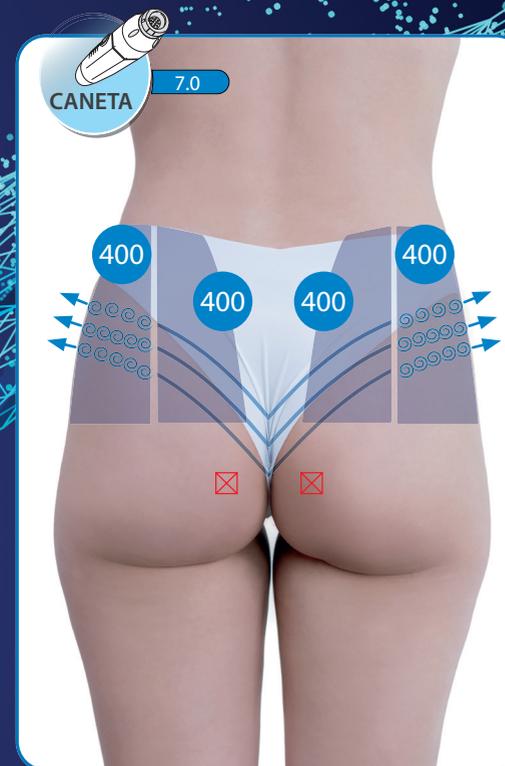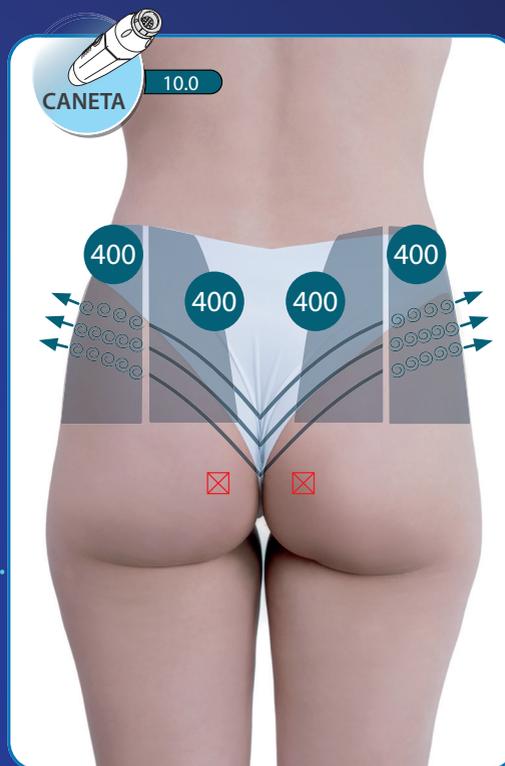
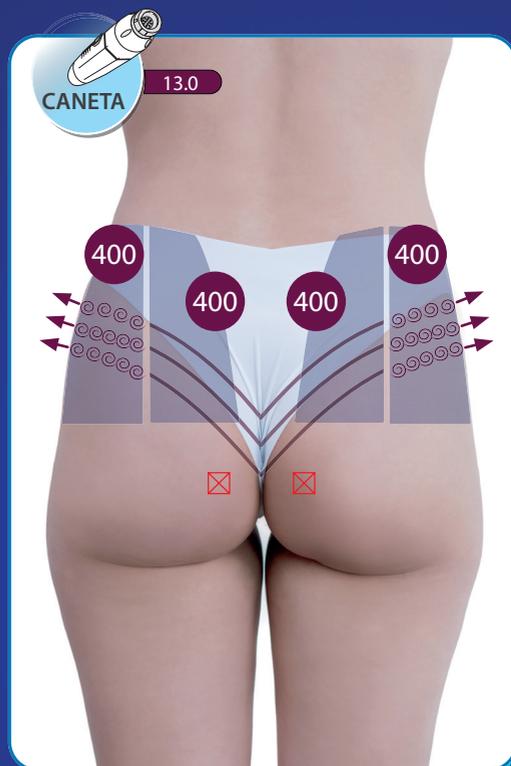


TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 13.0	4,0 - 7,0 J	1600
CANETA 10.0	4,0 - 7,0 J	1600
CANETA 7.0	4,0 - 7,0 J	1600
	TOTAL	4800

OBS: Ao utilizar a caneta é necessário fazer diversos movimentos para não super aquecer uma mesma área e não consumir gordura.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

TABELA DE REFERÊNCIA PARA USO DO ADIPÔMETRO

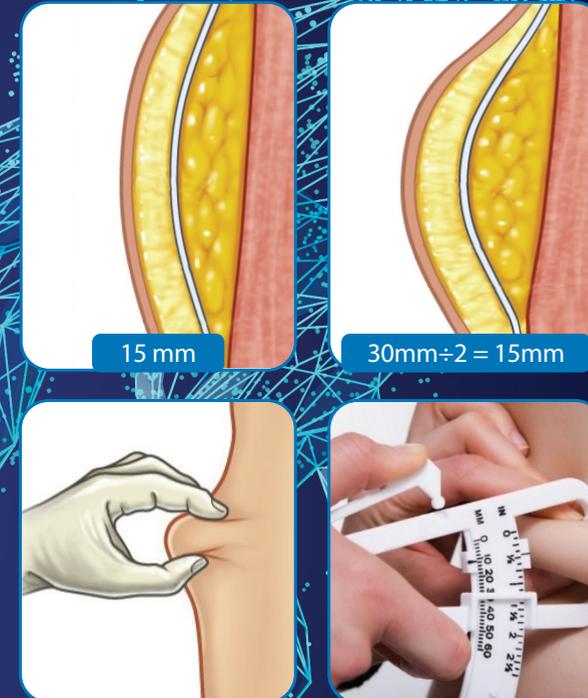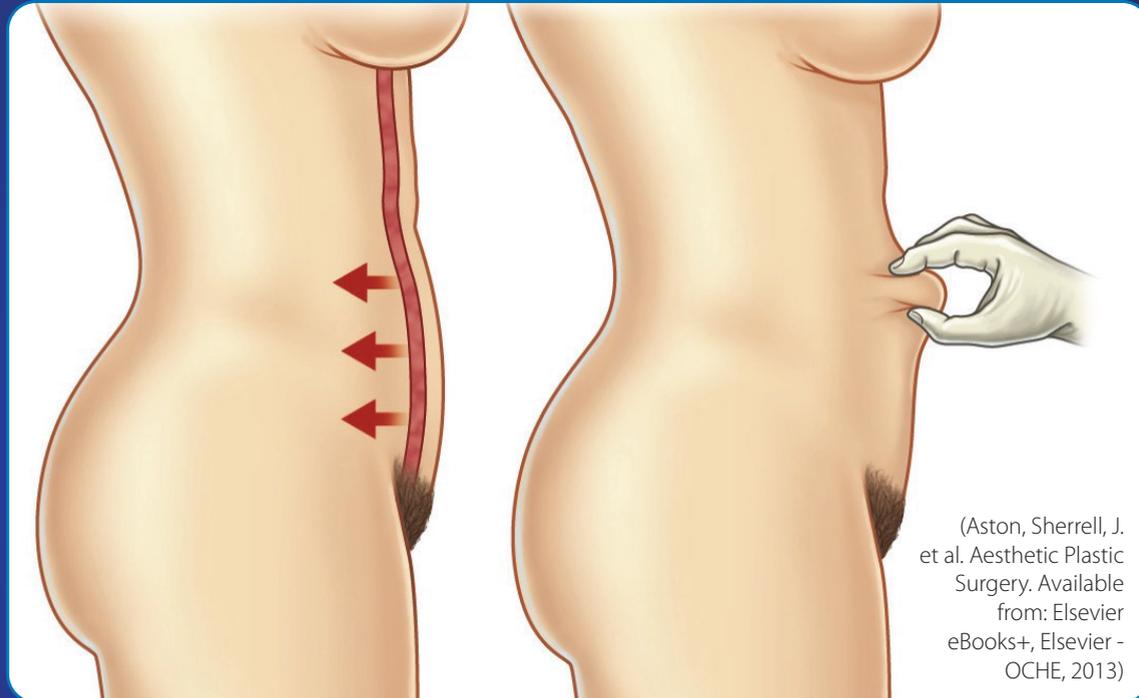

É importante pinçar (pintch) para avaliar o grau de flacidez, camada adiposa e a espessura dérmica.

1. Pedir para o paciente retrain o músculo abdominal.
2. Fazer o Pintch Test (Pinçar).
3. Utilizar o adipômetro para medir a dobra.

Dividir o valor medido no adipômetro por 2, para determinar a espessura da camada de adipócitos.

*Notar que dependendo da região do corpo existe uma fáscia entre o subcutâneo profundo e o subcutâneo superficial (Item. 1.1).

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

PINCH TEST - ADIPÔMETRO

A seguinte tabela tem como objetivo auxiliar na escolha das profundidades dos transdutores **Linha ou Caneta Liftera** com base na prega medida. Deve-se observar que **(conforme item 1.1)** em algumas regiões do corpo existe a presença de uma fáscia superficial que divide o subcutâneo em subcutâneo superficial e subcutâneo profundo.

PREGA	FLACIDEZ	TECIDO ADIPOSEO <i>*Observar áreas com presença de fáscia de scarpa.</i>	FÁSCIA MUSCULAR
10mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3mm / 4,5mm	4,5mm
20mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3mm / 4,5mm / 7mm	10mm
30mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3mm / 4,5mm / 7mm / 10mm	13mm
>40mm	1,5mm / 2,0mm / 3,0mm	3mm / 4,5mm / 7mm / 10mm / 13mm	-

! Recomendamos utilizar apenas Caneta nas profundidades: 3,0mm 2,0mm e 1,5mm.

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Lift-C



Assinado por:

Dra. Soraya Chantre

Conceito: Este protocolo foi desenvolvido mediante frequente insatisfação de pacientes em relação a resultados prévios com outros aparelhos de US Microfocado na região das bochechas e contorno facial, principalmente próximo ao jowl, e à necessidade de tratarmos os diferentes pacientes com diferentes formatos de rosto e graus de flacidez, de forma individualizada, com atenção especial a diversidade desde faces mais pesadas à pacientes em pós-operatório de cirurgia bariátrica que desejem postergar a necessidade de cirurgia plástica, dois extremos de necessidade relacionados ao jowl e à perda de contorno facial.

O incremento do uso da caneta Liftera permite atingir com eficácia pontos específicos, anteriormente não cobertos pela aplicação de disparos em linha e tem amplo benefício quanto a personalização da entrega de resultados e à utilização mais segura próxima a áreas de maior risco. Vale ressaltar que a associação deste protocolo com a tecnologia do Futera tem se mostrado bastante eficaz para o sucesso do tratamento deste tipo de queixa.



Lift-C



Assinado por:




Dra. Soraya Chantre

Descrição: Indicado para pacientes com perda de contorno facial, com queixas de flacidez de pele, envelhecimento e sensação de peso ou sobra de pele no terço inferior da face com as devidas adaptações quanto as indicações de acúmulo de gordura e/ou flacidez na região do jowl. Sugerida a associação com Futera para otimizar o tratamento multi-camadas e melhora na qualidade da pele e firmeza da região. É indicado tratar primeiro com o Liftera e depois associar Futera e/ou esvaziadores químicos de gordura, se aplicável.

Benefícios: Otimizar resultados na definição do contorno e afinamento faciais, de acordo com a necessidade de cada paciente. Promover sustentação da face, amenizando o peso do jowl, e com isso melhorar também a firmeza e a qualidade da pele.




Avaliação:

- Proteger e atentar ao posicionamento anatômico de nervos superficiais.
- Todo tratamento pode e deve ser personalizado e adaptado às necessidades individuais dos pacientes, conforme os seguintes critérios:
- Avaliar indicação de consumo de gordura na região do jowl, e atenção ao aplicar as canetas 4,5 e 7,0, no caso de faces mais "pesadas".
- Avaliar o uso da caneta 2,0 (em equivalência aos disparos que seriam feitos com a de 4,5) em casos de pacientes com flacidez, sem acúmulo de gordura na região.

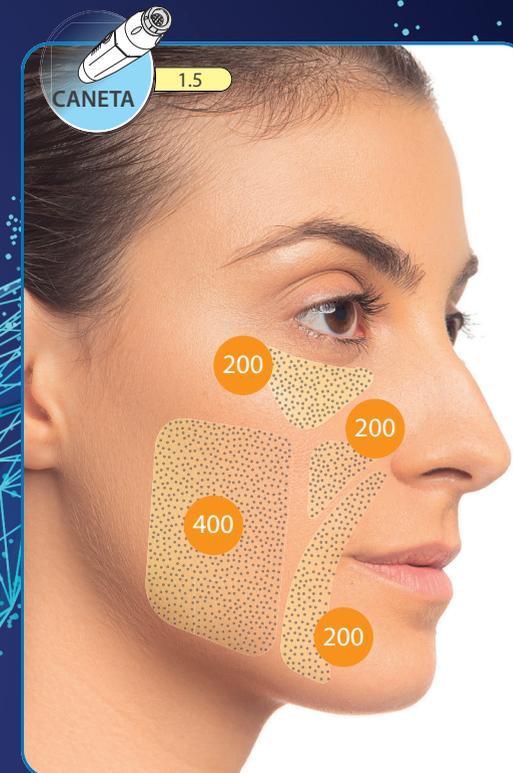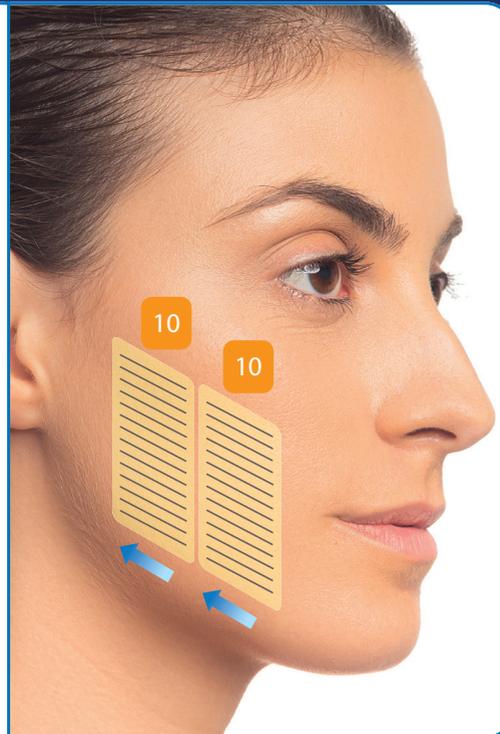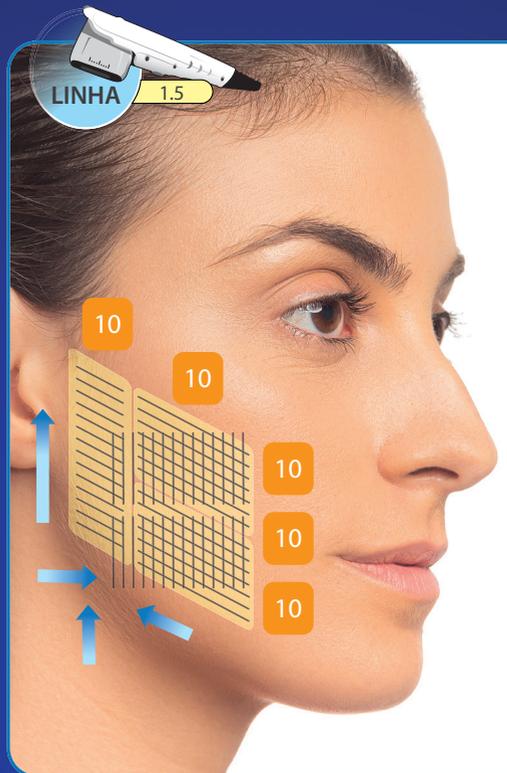

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	MEIA FACE	TOTAL LINHA	TOTAL CANETA
LINHA 1.5	0,5 J	70	140	-
CANETA 1.5	0,5 J	1000	-	2000
	TOTAL	1060	140	2000


! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

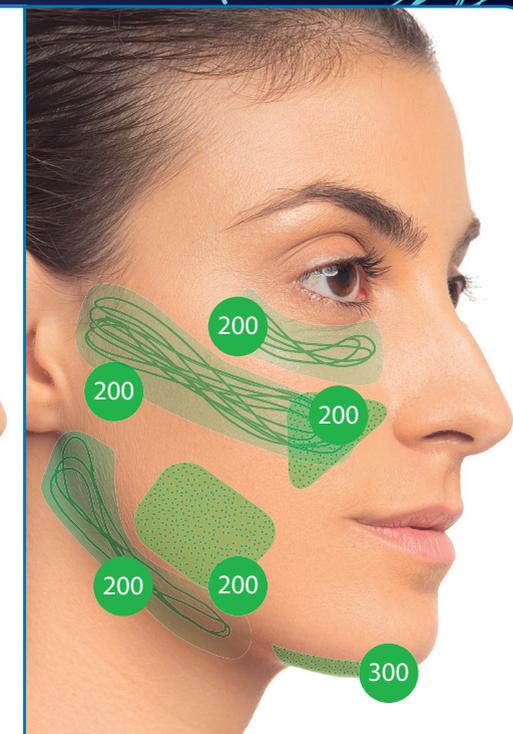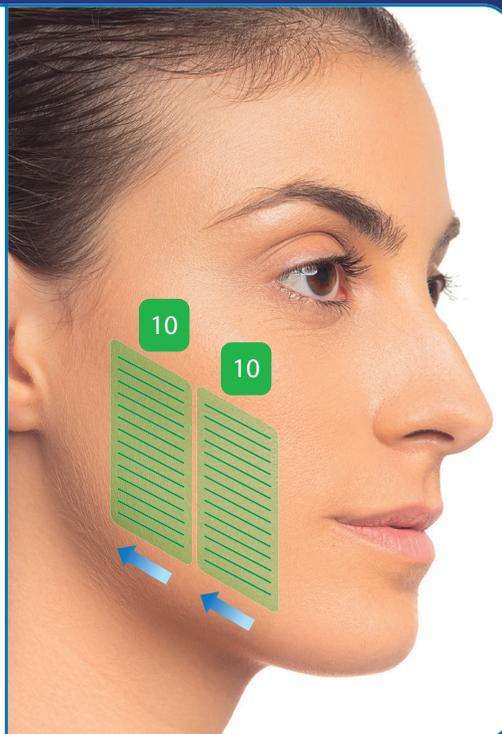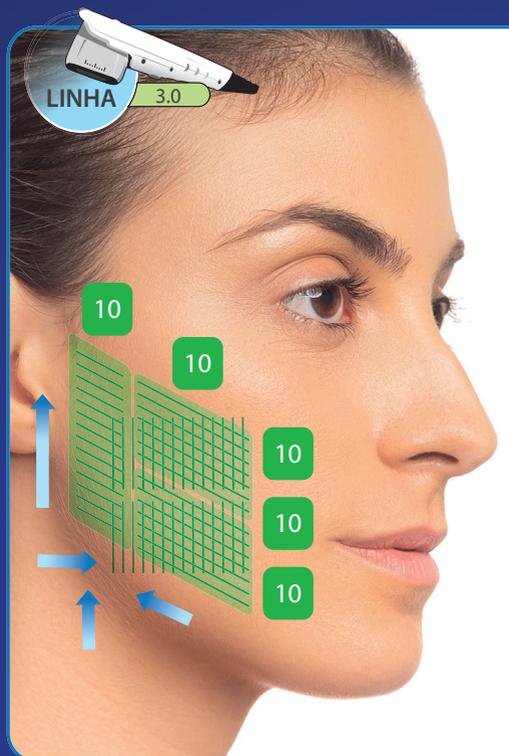

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	MEIA FACE	TOTAL LINHA	TOTAL CANETA
LINHA 3.0	0,7 J	70	140	-
CANETA 3.0	0,7 J	1400	-	2800
CANETA 3.0	0,7 J	300	-*	600
	TOTAL	1770	140	3400

*Submento

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

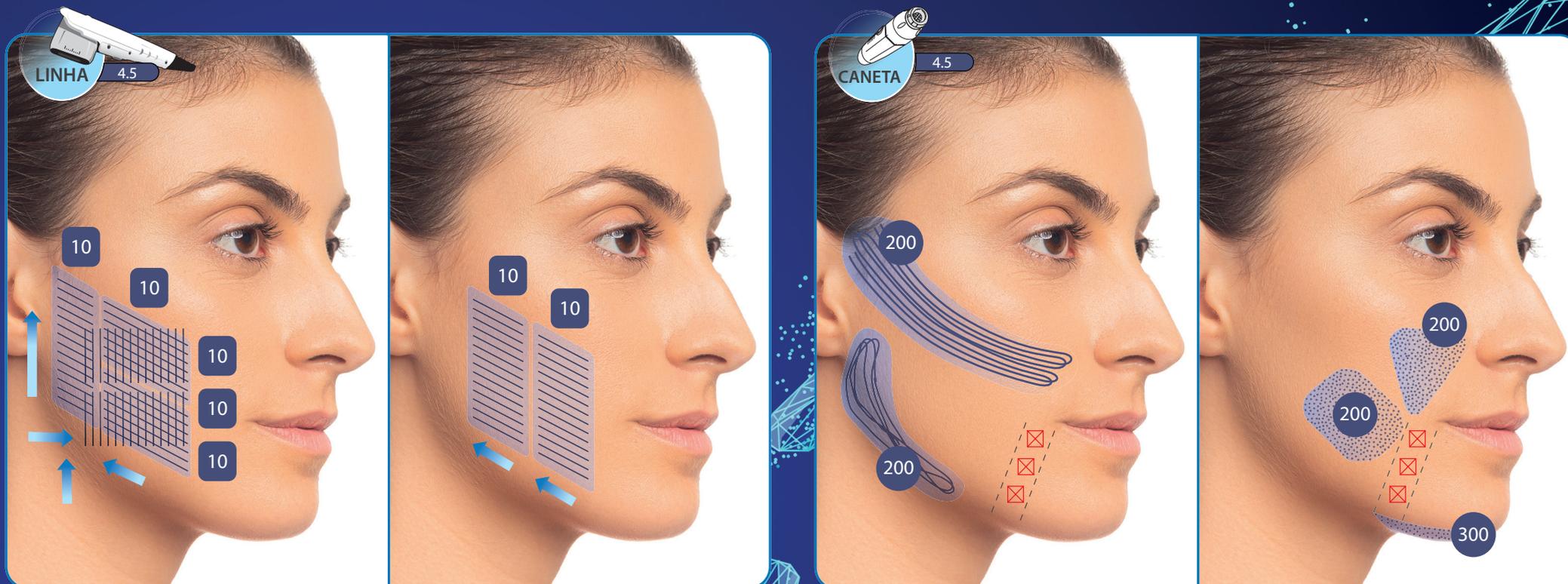

TRANSDUTOR	POTÊNCIA	MEIA FACE	TOTAL LINHA	TOTAL CANETA
LINHA 4.5	1,5 J	70	140	-
CANETA 4.5	1,5 J	800	-	1600
CANETA 4.5	1,5 J	300	-*	600
CANETA 4.5	1,5 J	200	-*	400
	TOTAL	1370	140	2600

*Submento

*Contorno

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

Face Frame Lifting



Assinado por:


Dra. Fernanda Nunes

Conceito: Técnica desenvolvida para lifting de face com foco em trabalhar a região posterior a linha ligamentar com maior energia e em múltiplas camadas

Descrição: Possibilidade de combinação da técnica com aplicação do Sculptra em frame para potencializar os resultados

Benefícios: Lifting facial, melhora de contorno da face e redução do jowl.

Avaliação: Uso da caneta 4.5 em área infrazigomática com maior número de disparos pode acarretar consumo de compartimento de gordura

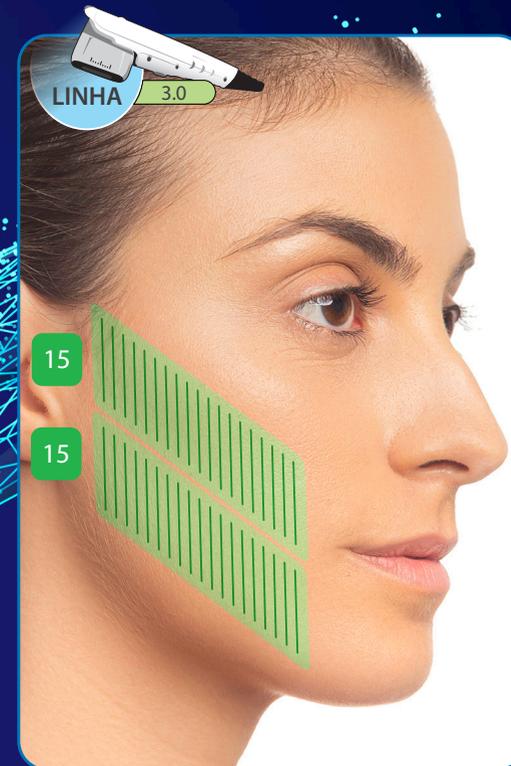


TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL LINHA
LINHA 4.5	0,90	50
LINHA 3.0	0,70	90
LINHA 3.0	0,70	60
TOTAL		200

! Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.



TRANSDUTOR	POTÊNCIA	TOTAL CANETA
CANETA 4.5	0,90	800
CANETA 3.0	0,70	1.600
CANETA 2.0	0,70 J	1.600
TOTAL		4.000

 Não recomendamos o uso deste conteúdo como base para a realização de procedimentos.

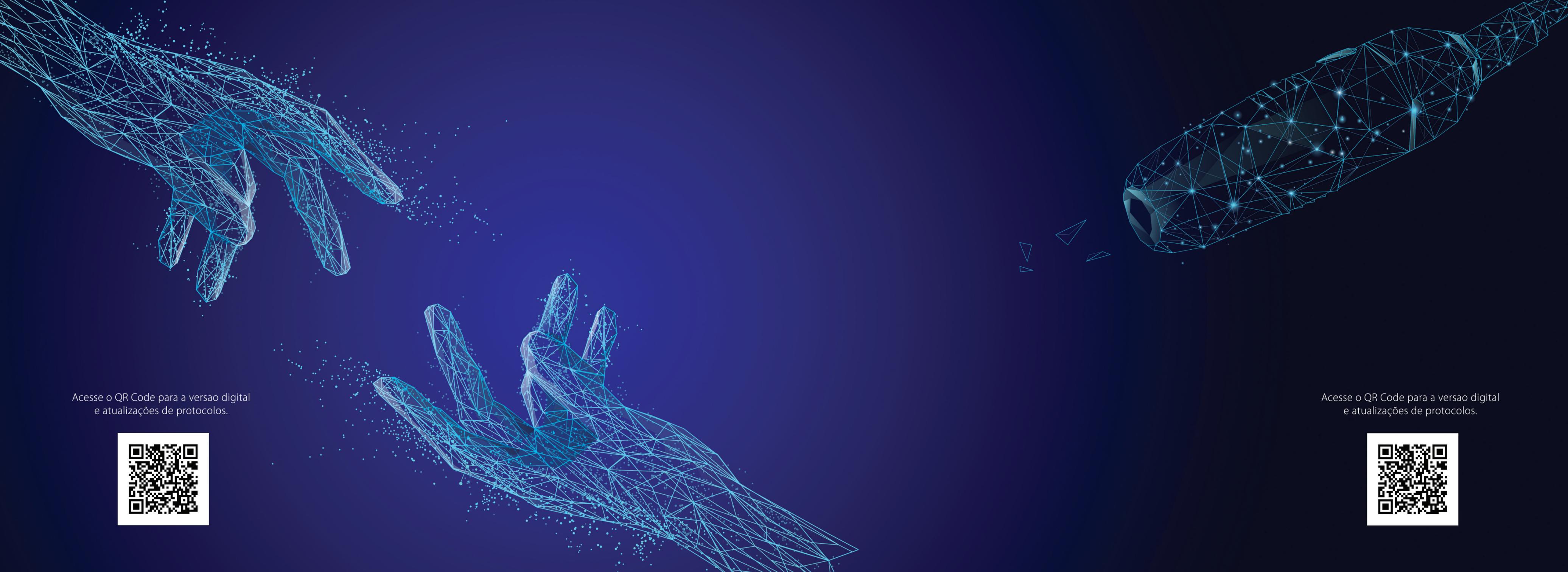

Acesse o QR Code para a versão digital
e atualizações de protocolos.



Acesse o QR Code para a versão digital
e atualizações de protocolos.

