



Liftera®

Liftera® V2 Vision

Protocolo
de tratamento



Este guia de tratamento foi desenvolvido e homologado pelos dermatologistas Dr. Renato Soriani, CRM 121.106 e Dra. Clarissa Da Hora CRM 107.522, para auxiliar no tratamento das diferentes indicações e regiões da face e do corpo com o ultrassom microfocado digital Liftera. Os protocolos apresentados podem ser complementados com o conhecimento anatômico e a experiência clínica de cada médico para individualizar os tratamentos de acordo com as indicações e necessidades de seu paciente.

Índice | Protocolo Corporal

1

- 1.1 - Áreas Anatômicas
- 1.2 - Compartimentos de Gordura
- 1.3 - Cuidados com a Aplicação

2

- 2.1 - Caneta Liftera V2 - Aplicação em Vetores
- 2.2 - Caneta Liftera V2 - Aplicação em Vetores

3

- 3.1 - Full Face - Submandibular
- 3.2 - Full Face - Terço Inferior
- 3.3 - Full Face - Pálpebras e Terço Superior
- 3.4 - 1/3 Inferior - Padrão (Full), flacidez e volume
- 3.5 - 1/3 Inferior - Preservar o volume do Zigomático Malar e Submalar
- 3.6 - 1/3 Inferior - Sulco nasolabial - Flacidez / Gordura
- 3.7 - 1/3 Superior
- 3.8 - Full Face - Textura da pele
- 3.9 - Pescoço - Caneta Liftera V2
- 3.10 - Colo

01


ultra

Áreas anatômicas




1.1 - ÁREAS ANATÔMICAS

O tamanho e formato das áreas **podem** variar de acordo com a anatomia de cada paciente.

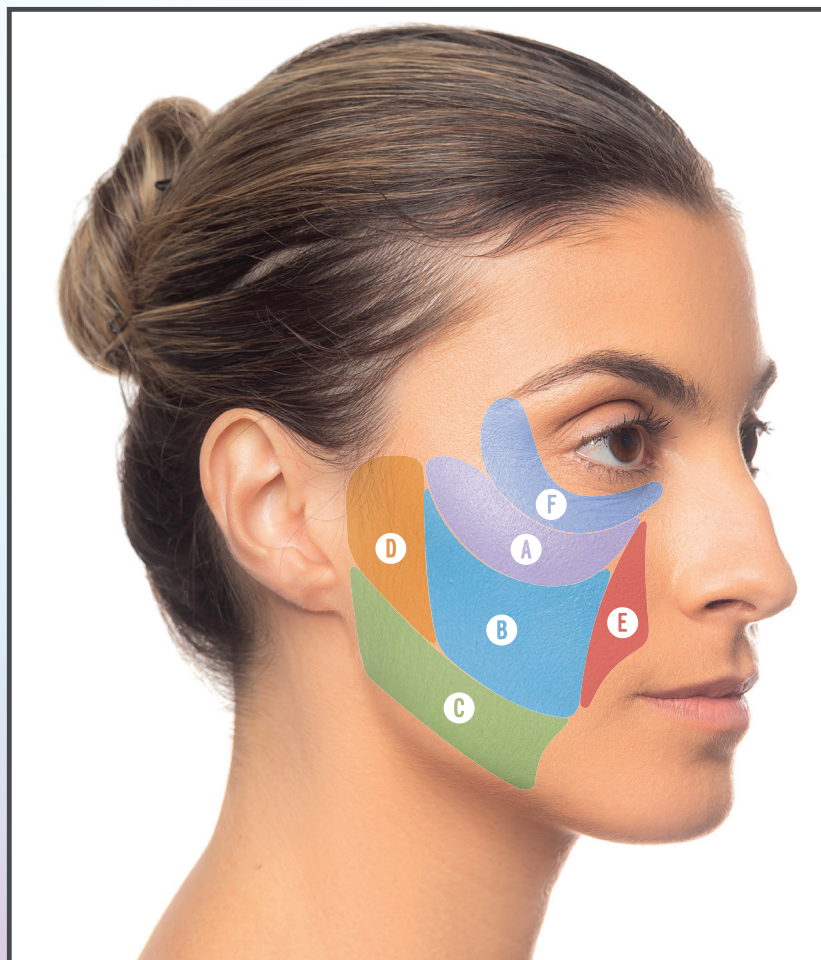


- A Zigomático Malar
- B Submalar
- C Linha da Mandíbula
- D Pré Parotídea
- E Nasolabial
- F Orbicular

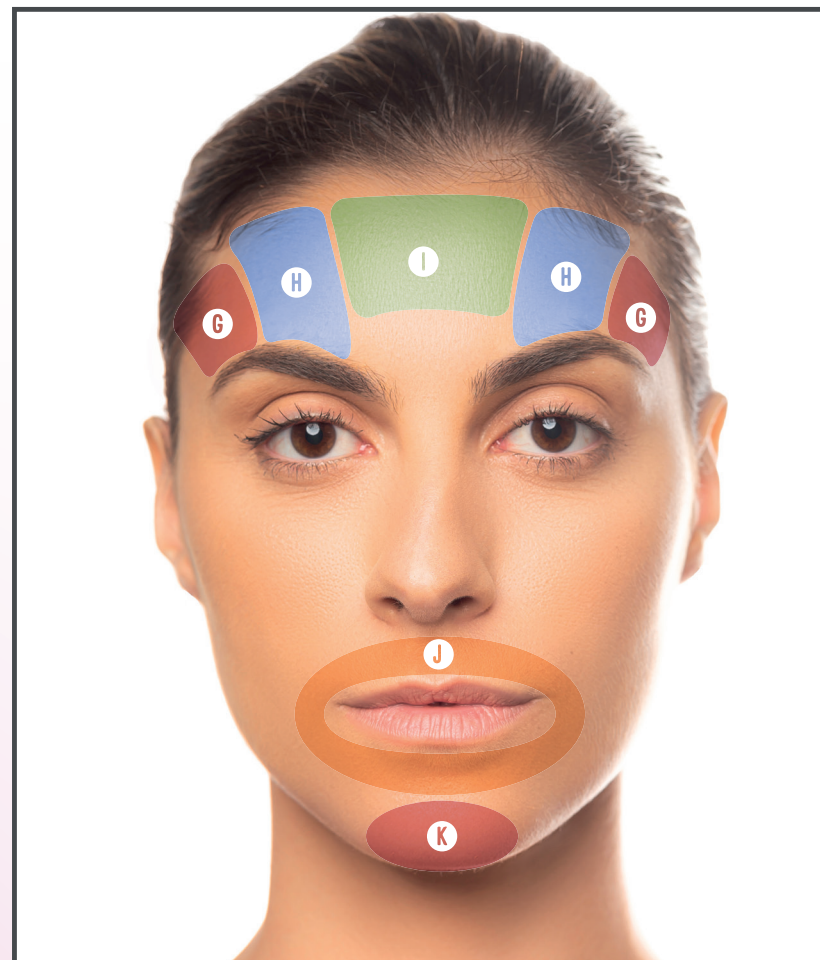

- G 1/3 Lateral Sobrancelhas
- H 1/3 Médio Sobrancelhas
- I Fronte
- J Perioral
- K Mento

1.2 - COMPARTIMENTOS DE GORDURA

Os tratamentos com Liftera permitem “esculpir” os pacientes preservando e suavizando os compartimentos de gordura faciais.

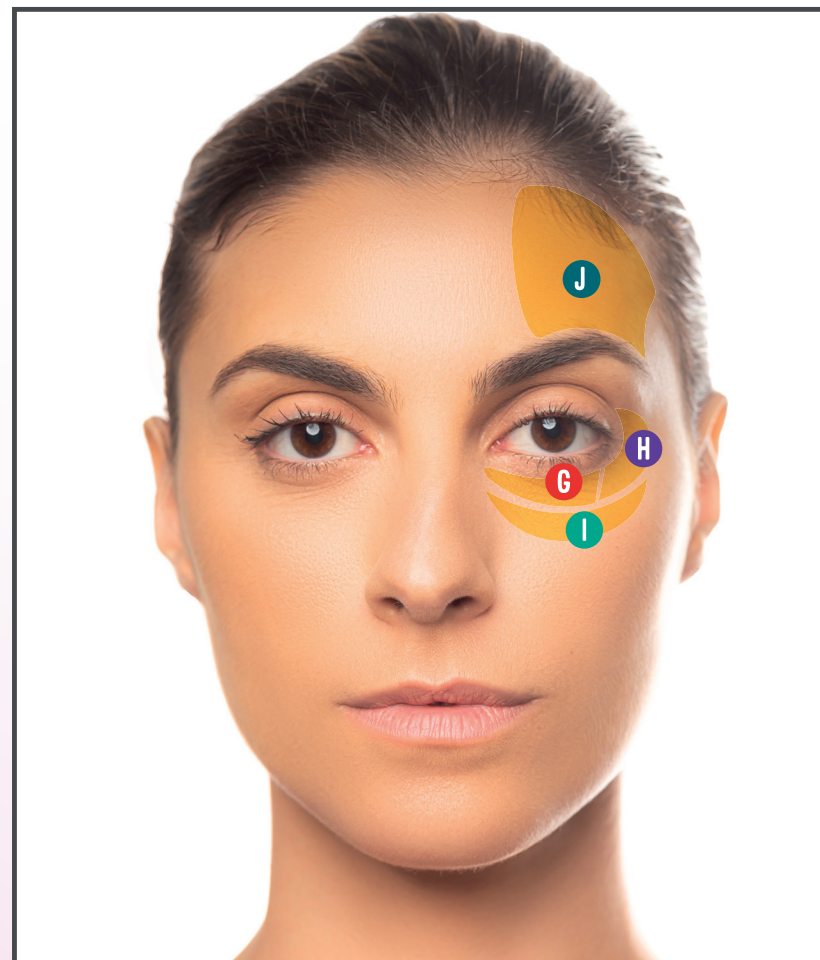

A Malar medial superficial

B Submalar profundo

C Malar Intermediário

D Temporolateral

E Jowl

F Nasolabial Superficial


G Periorbital inferior

H Periorbital lateral


I Suborbicular

J Frontal

1.3 - CUIDADOS COM A APLICAÇÃO

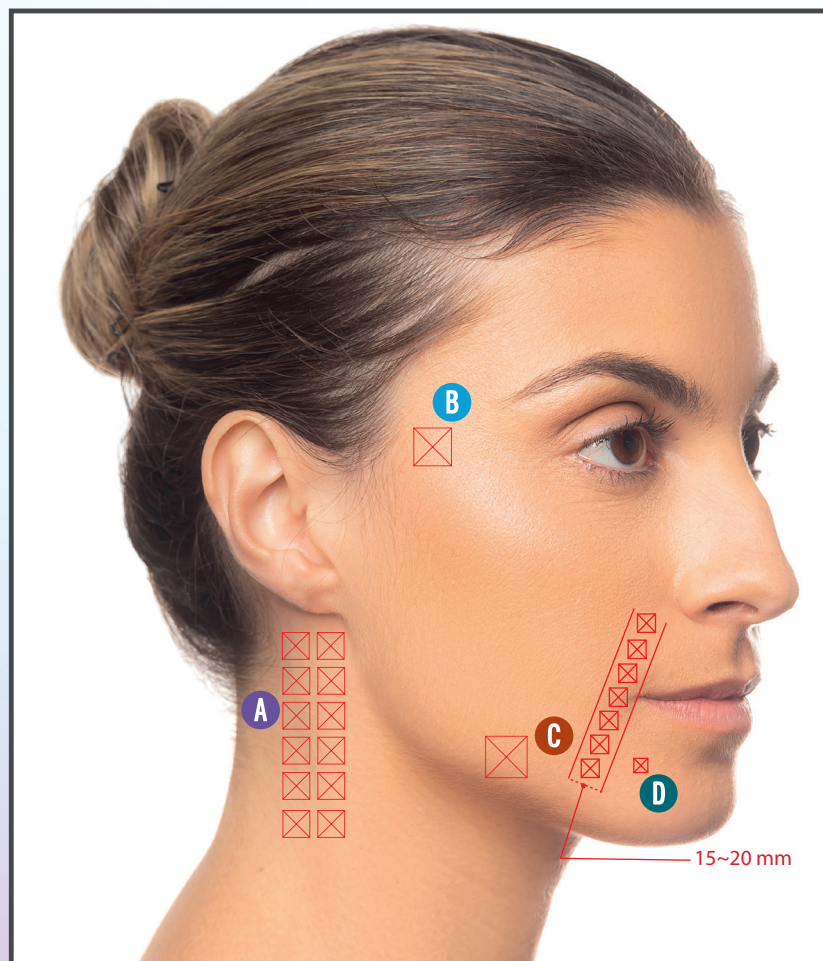

- A** Região Auricular
- B** Região Temporal
- C** Nervo Marginal da Mandíbula
- D** Mentoniano

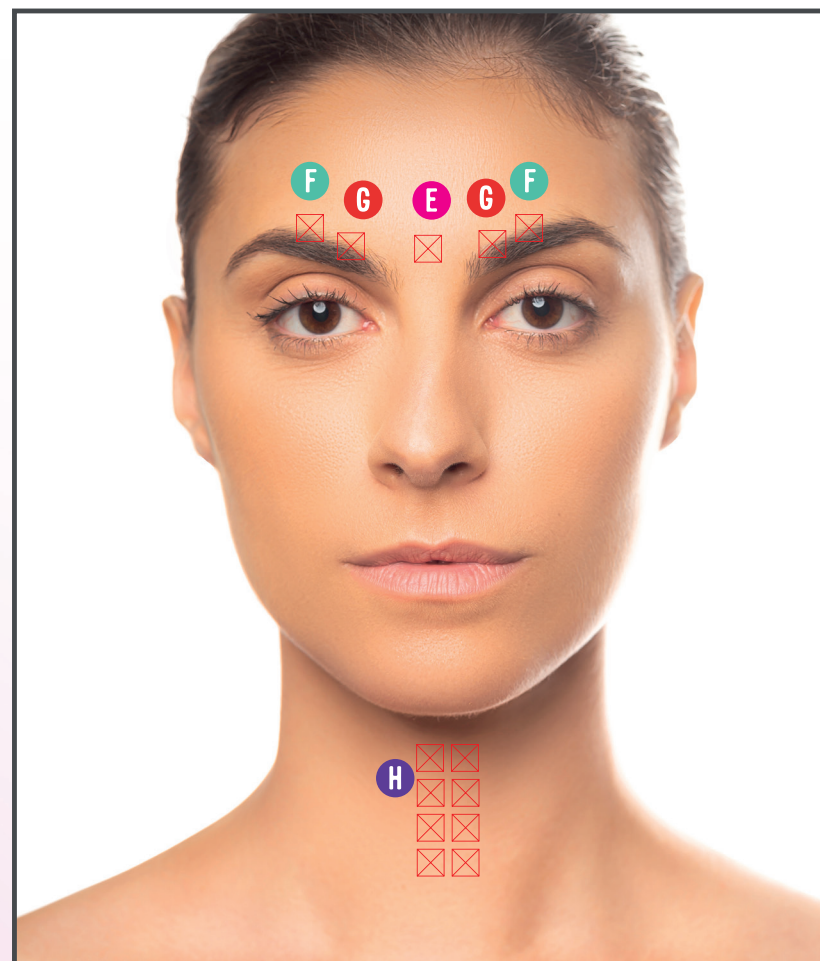



- E** Glabella
- F** Nervo Supraorbital
- G** Nervo Supratroclear
- H** Tireóide

02

Aplicações



2.1 - CANETA LIFTERA V2 | Aplicação em vetores

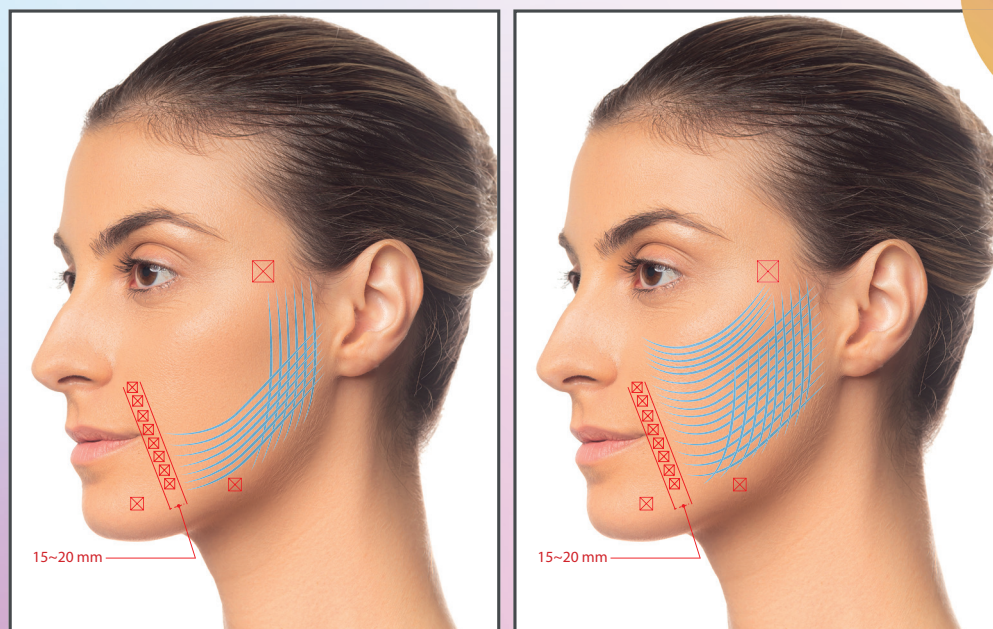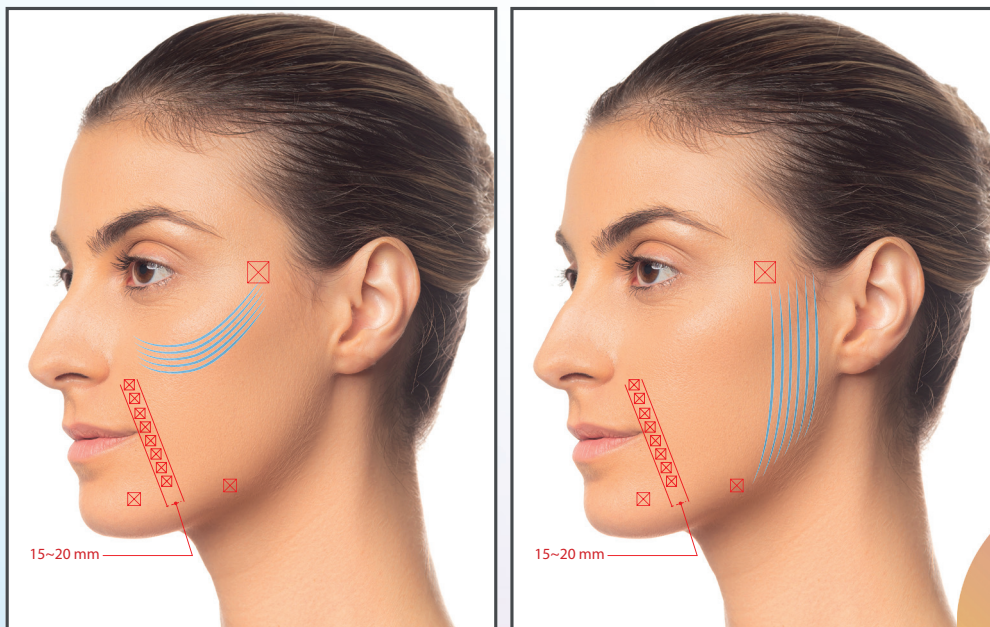


! DESCRIÇÃO

- As aplicações em vetores são utilizadas para desenhar linhas mais orgânicas de coagulação.
- Os vetores podem ser aplicados paralelamente em uma única direção ou em protocolos cruzados (hashtags).
- A distância entre cada vetor é de 5 mm.

! ATENÇÃO

- 1º Acoplar a Caneta Liftera V2 na pele; 2º Iniciar o movimento; 3º Apertar o botão de disparo.
- Sempre movimentar a Caneta Liftera V2 enquanto estiver disparando.
- Nunca deixar a Caneta Liftera V2 parada em um mesmo local da pele enquanto dispara.
- Ao finalizar o vetor, soltar o botão e então remover a Caneta Liftera V2, para evitar a superficialização dos pontos de coagulação.
- Evitar sobreposição dos vetores.

2.2 - CANETA LIFTERA V2 | Aplicação em vetores

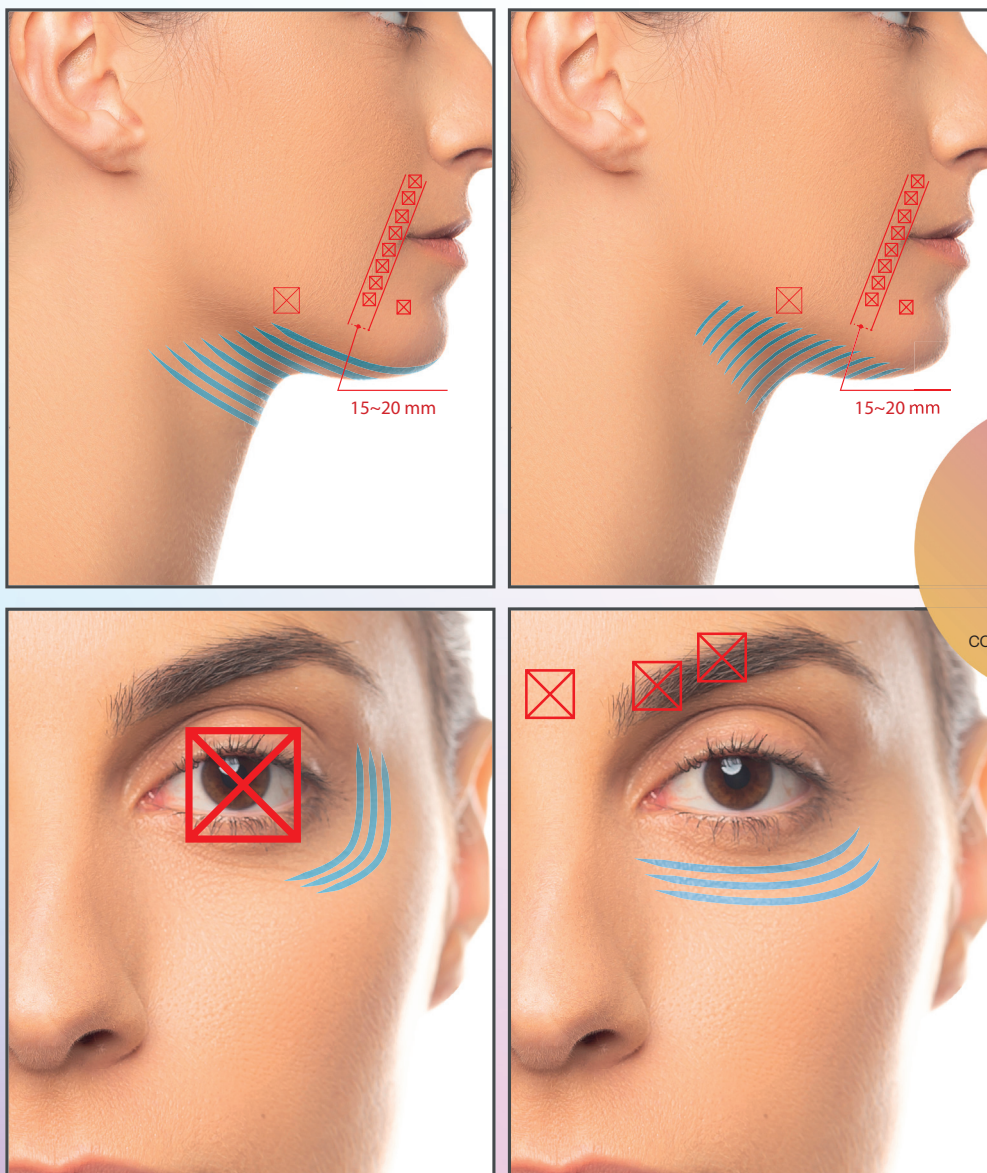

NÃO APLICAR EM DIREÇÃO AO GLOBO OCULAR



! DESCRIÇÃO

- A Caneta Liftera V2 em regiões submandibulares, periorbitais e periorais oferecem mais conforto ao paciente e precisão na aplicação.
- Para individualizar e focar nas indicações de cada paciente, acompanhar a anatomia aplicando linhas paralelas e espaçadas de 5 mm.

! ATENÇÃO

- 1º Acoplar a Caneta Liftera V2 na pele; 2º Iniciar o movimento; 3º Apertar o botão de disparo.
- Sempre movimentar a Caneta Liftera V2 enquanto estiver disparando.
- Nunca deixar a Caneta Liftera V2 parada em um mesmo local da pele enquanto dispara.
- Ao finalizar o vetor, soltar o botão e então remover a Caneta Liftera v2, para evitar a superficialização dos pontos de coagulação.
- Evitar sobreposição dos vetores.
- Em regiões menores e delicadas sugerimos utilizar uma frequência de disparo de 5 Hz.



03


Protocolos

3.1 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | Full Face - Submandibular




Tabela	Potência	Total de pontos
Caneta 4.5	Level 7	740
Caneta 3.0	Level 4	740
		1480

3.2 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | Full Face - Terço Inferior.

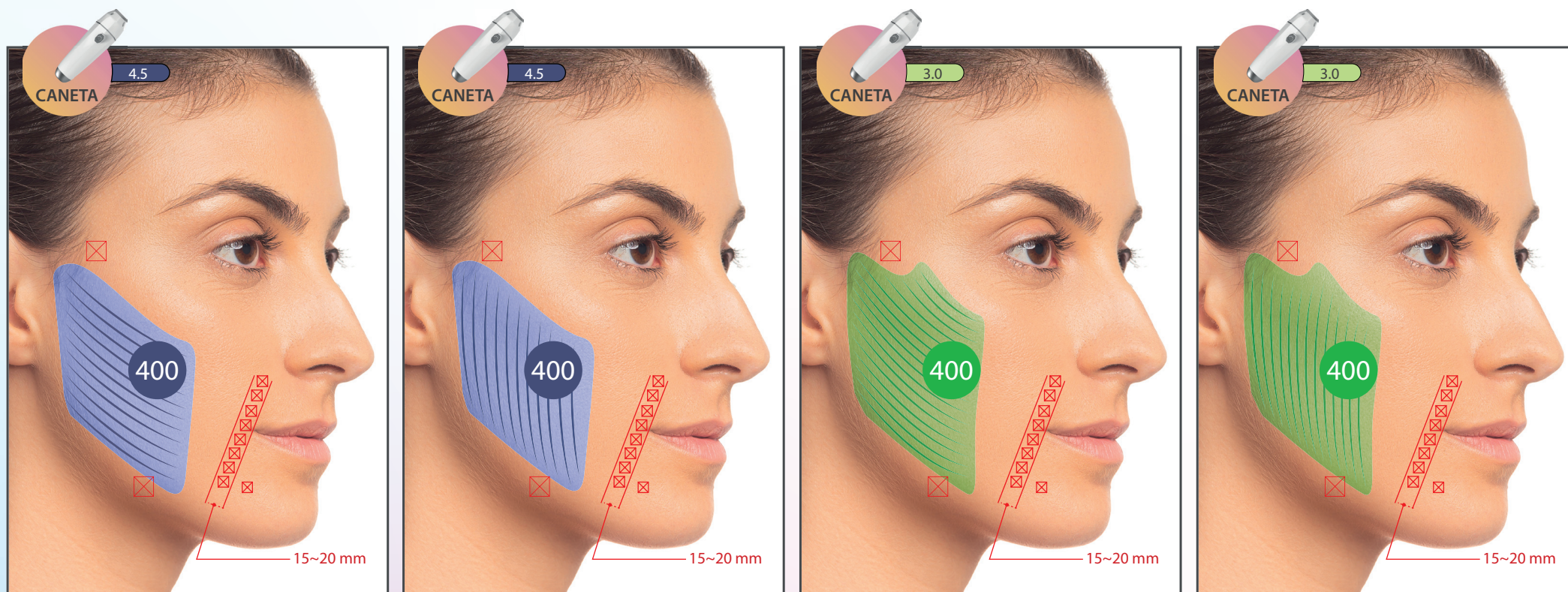


Transdutor	Potência	Meia face	Total de pontos
Caneta 4.5	Level 7	800	1600
Caneta 3.0	Level 4	800	1600
			3200

ÁREAS ANATÔMICAS

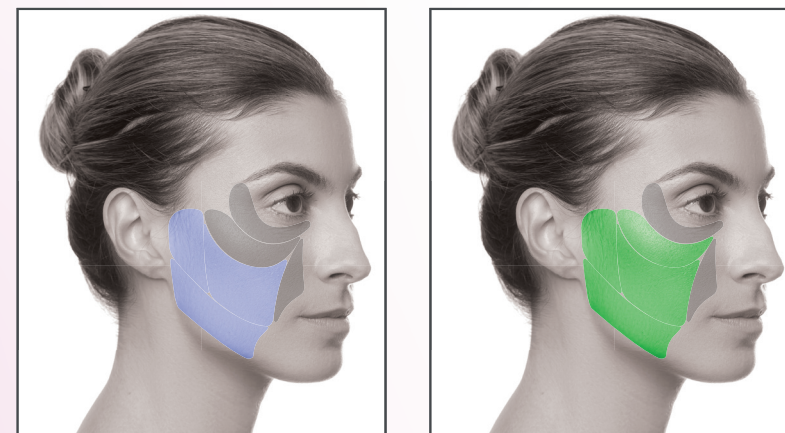

3.3 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | Full Face - Pálpebras e Terço Superior

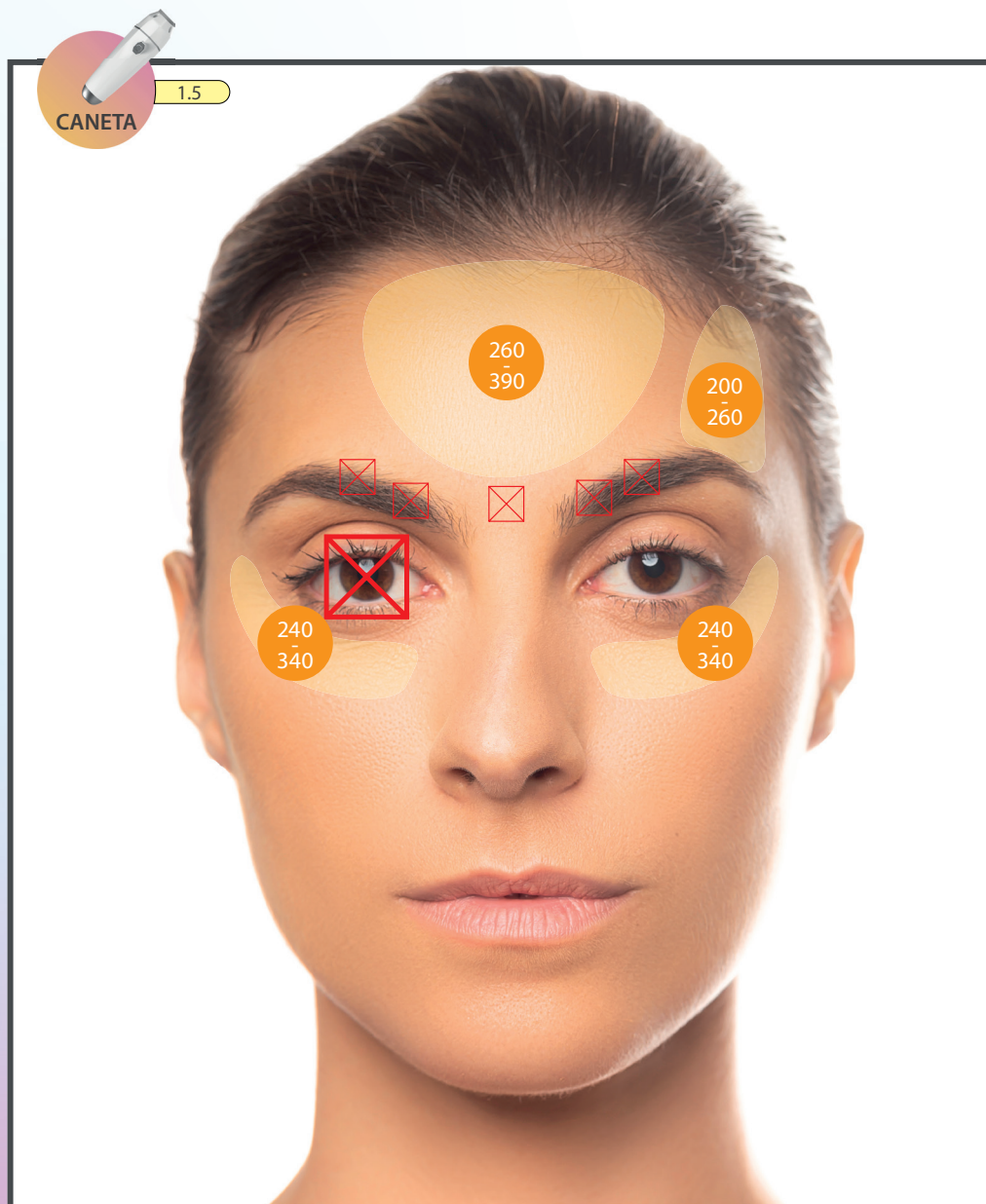

Região frontal

Transdutor	Potência	Meia face	Total de pontos
Caneta 1.5	Level 2	-	260 a 390

Sobrancelhas


Transdutor	Potência	Meia face	Total de pontos
Caneta 1.5	Level 2	200 a 260	400 a 520

Pálpebra inferior

Transdutor	Potência	Meia face	Total de pontos
Caneta 1.5	Level 2	240 a 340	480 a 680


NÃO APLICAR EM DIREÇÃO AO GLOBO OCULAR

3.4 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 INFERIOR - Padrão (Full), flacidez e volume.

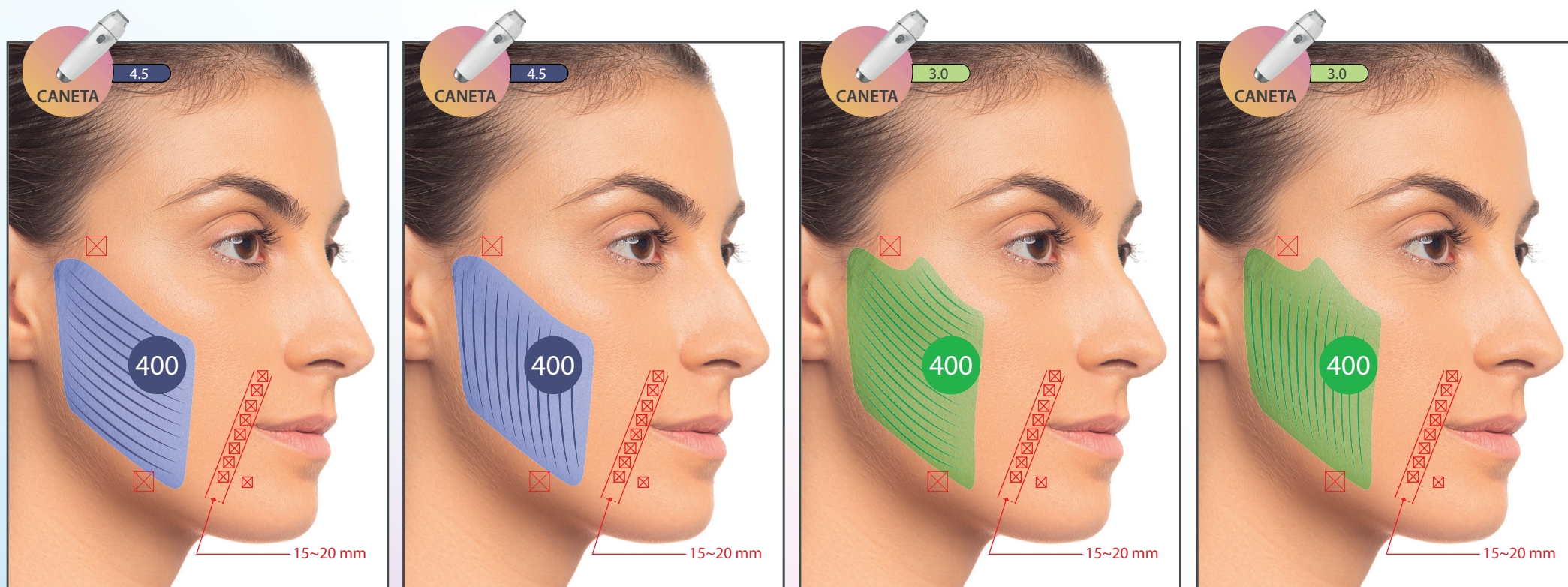

Transdutor	Potência	Meia face	Total de pontos
Caneta 4.5	Level 7	800	1600
Caneta 3.0	Level 4	800	1600
			3200

ÁREAS ANATÔMICAS

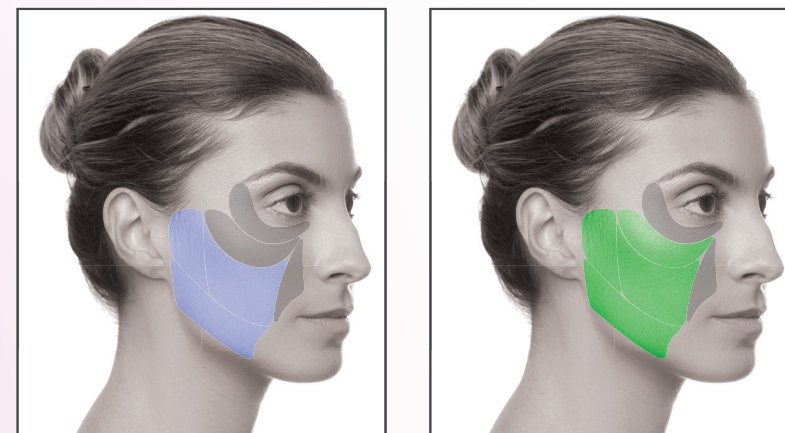



Para maior compactação de gordura

3.5 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 INFERIOR - Preservar o volume do Zigomático Malar e Submalar.




Paciente sem profundidade na face, não fazer aplicadores de 4,5 mm. Substituir por aplicadores de 3,0 mm e 1,5 mm.

ÁREAS ANATÔMICAS

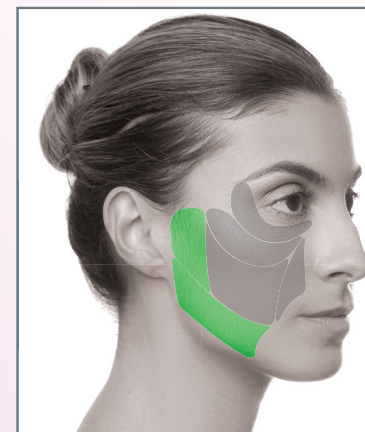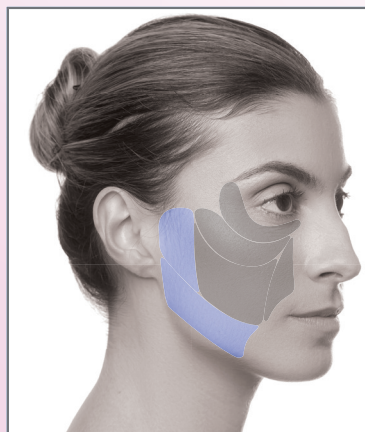


Transdutor	Potência	Meia face	Total de pontos
Caneta 4.5	Level 7	600	1200
Caneta 3.0	Level 4	800	1600
			2800

3.6 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 INFERIOR - Sulco nasolabial - Flacidez / Gordura

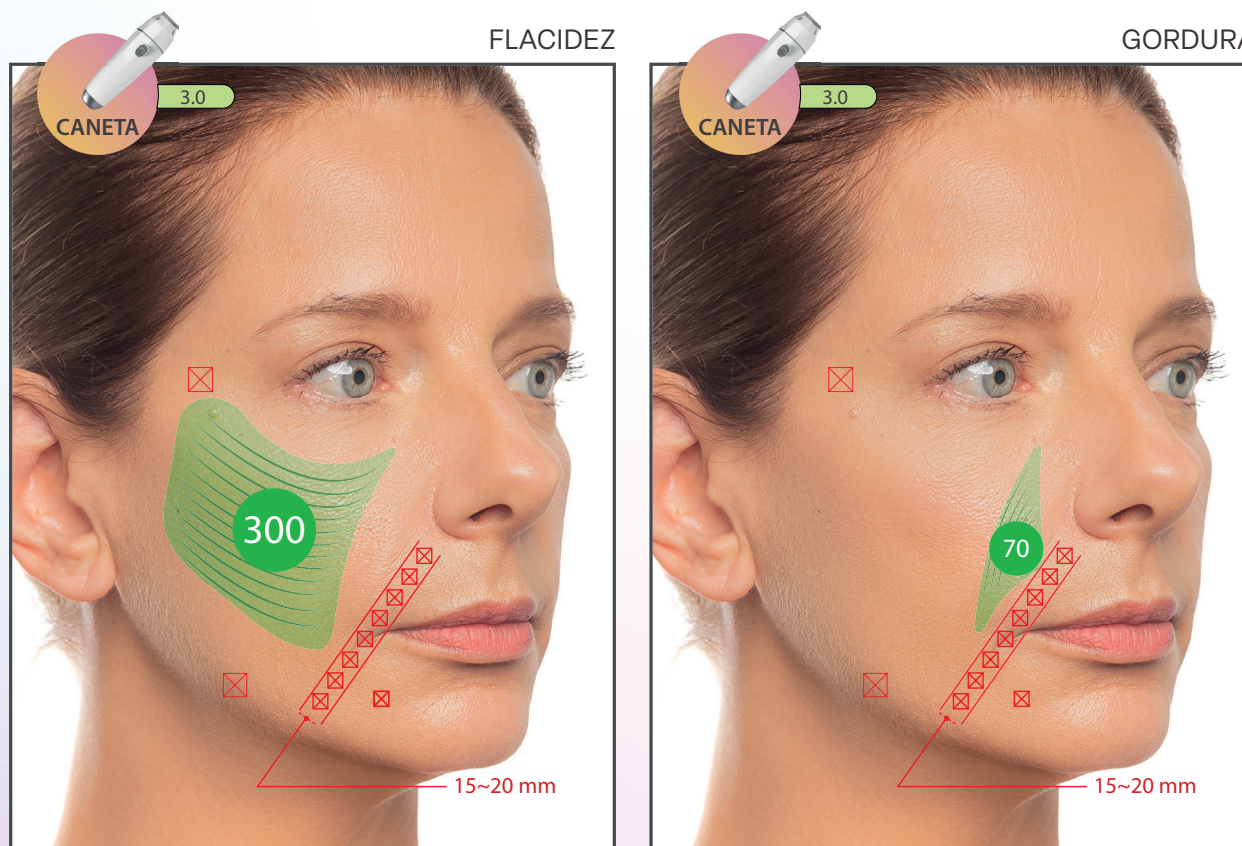


ÁREAS ANATÔMICAS

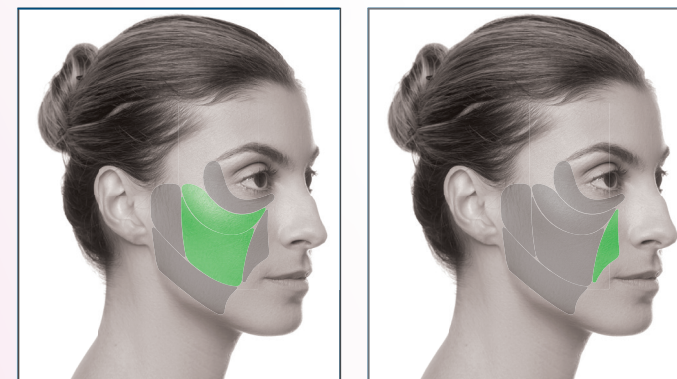


Flacidez	Transdutor	Potência	Total de pontos	Total de pontos
	Caneta 3.0	Level 4	300	600
				600
Gordura	Transdutor	Potência	Meia face	Total de pontos
	Caneta 3.0	Level 4	70	140
				140

3.7 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | 1/3 SUPERIOR

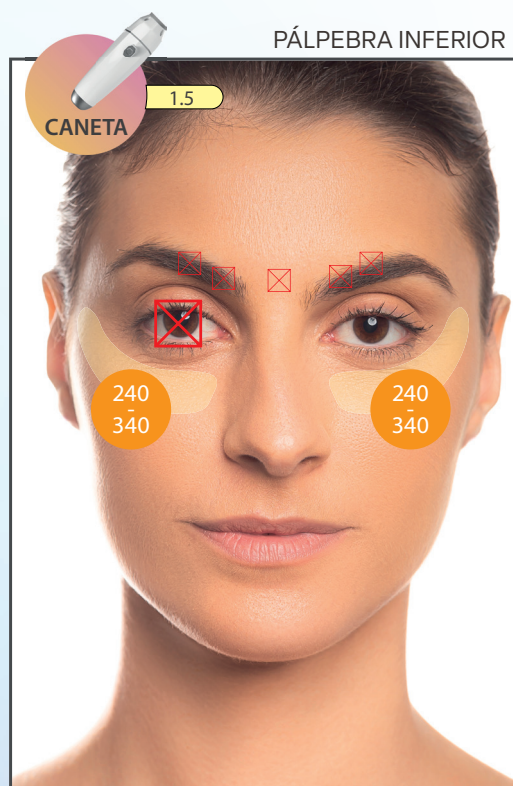


Pálpebra inferior

Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	240 a 340	480 a 680

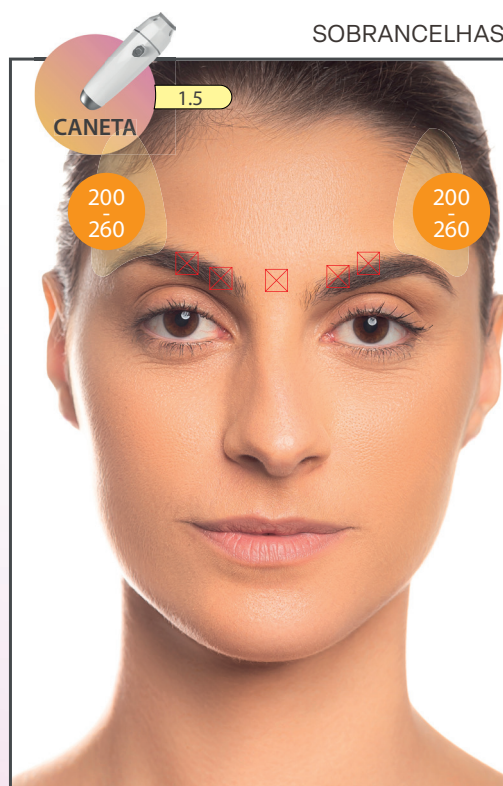

Sobrancelhas

Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	200 a 260	400 a 520


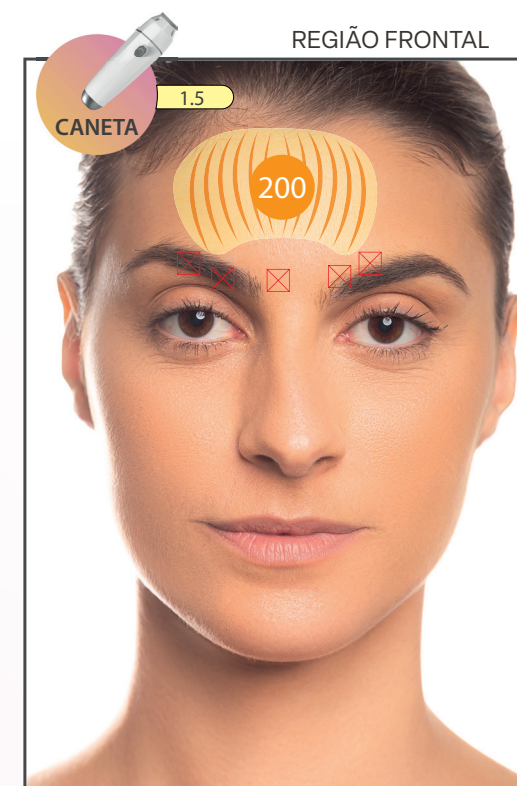


Região frontal (efeito toxina)

Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	-	200

NÃO APLICAR EM DIREÇÃO
AO GLOBO OCULAR

3.8 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | Full Face - Textura da pele.

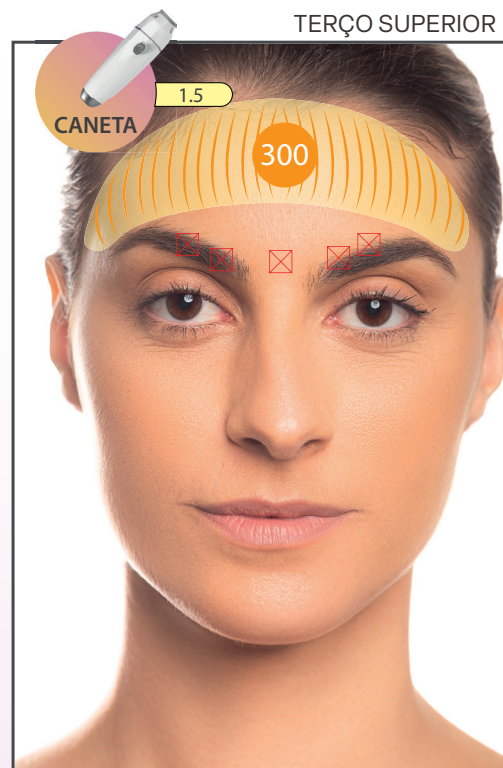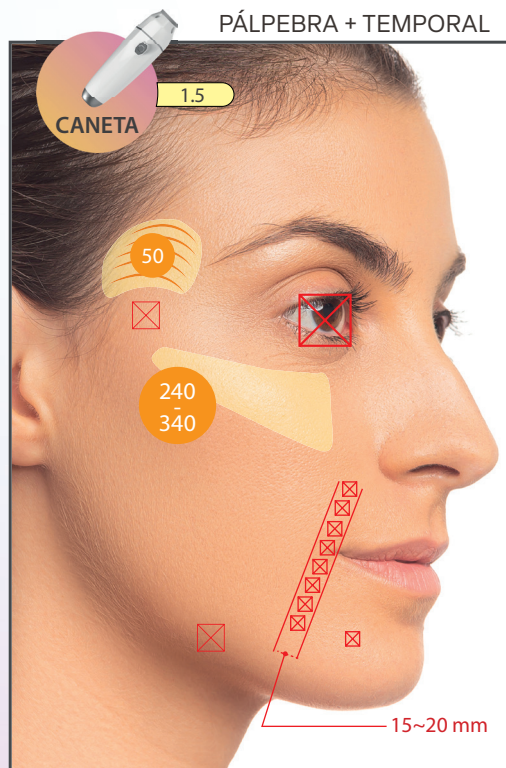

Terço inferior

Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	600	1200

Região temporal

Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	50	100

Terço superior

Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	-	300

Perioral


Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	-	300 a 400

Pálpebra inferior

Transdutor	Potência	Meia face	Total pontos
Caneta 1.5	Level 2	240 a 340	480 a 680



NÃO APLICAR EM DIREÇÃO AO GLOBO OCULAR

3.9 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | PESCOÇO - Somente Caneta Liftera V2.

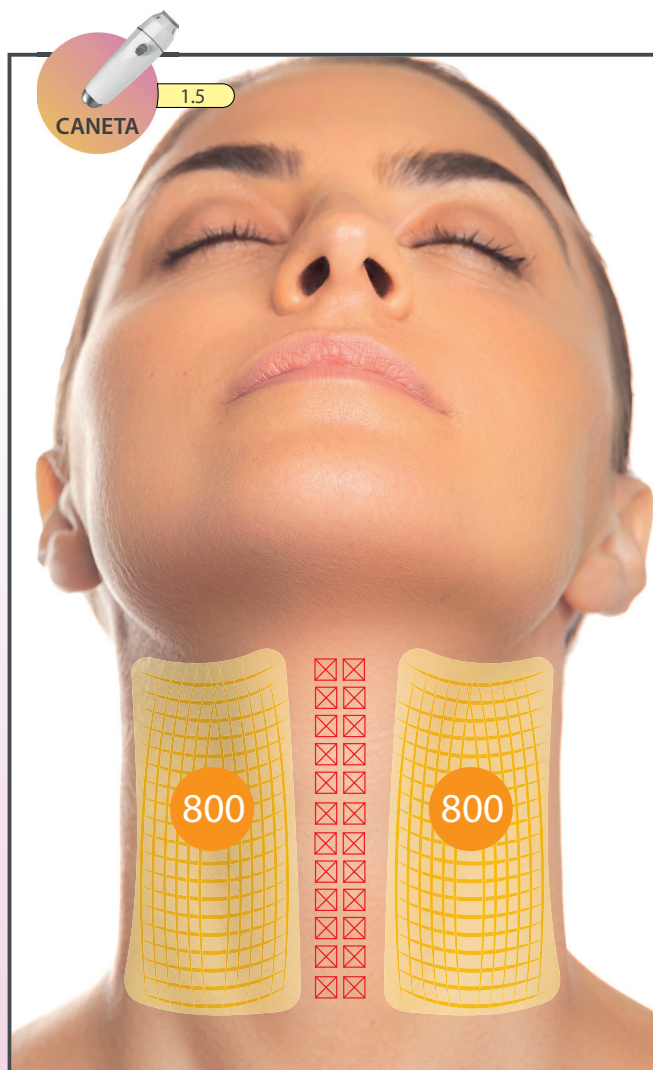

Transdutor	Potência	Total de pontos
Caneta 3.0	Level 4	1600
Caneta 1.5	Level 2	1600
		3200

3.10 - APLICAÇÃO PROTOCOLO | COLO

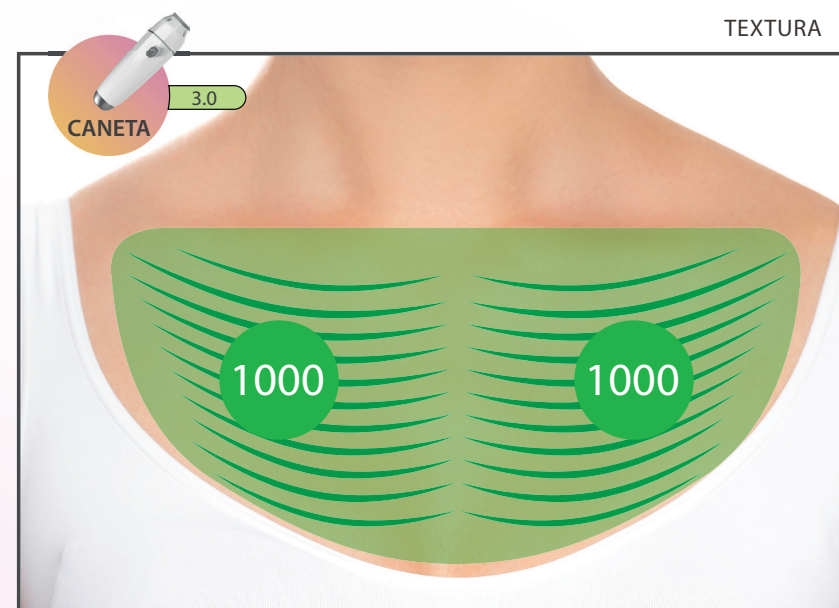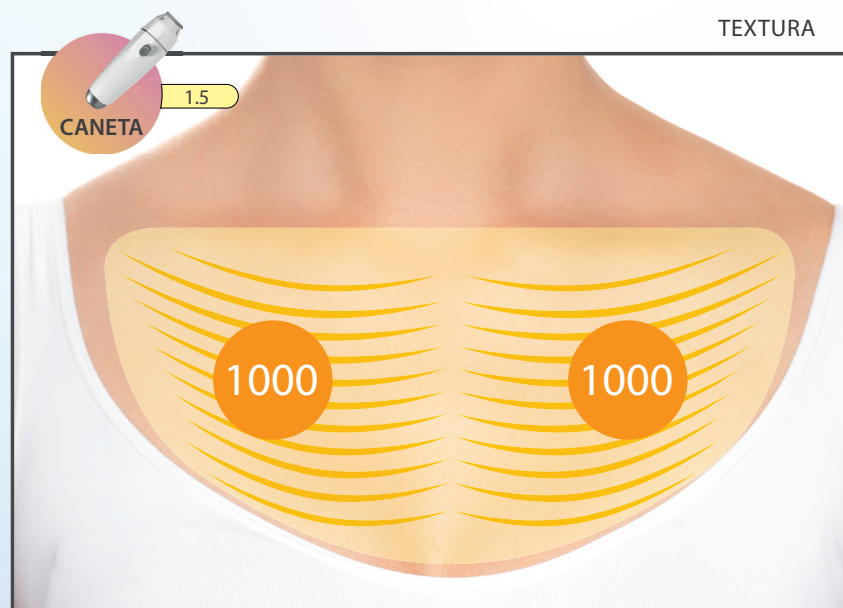

Textura

Transdutor	Potência	Total de pontos
Caneta 3.0	Level 4	2000
Caneta 1.5	Level 2	2000
		4000